

AD-30D

Bastone Devon con impugnatura destra

AD-30S

Bastone Devon con impugnatura sinistra

AD-31M

Bastone Dorset marrone

AD-31N

Bastone Dorset nero

AD-32M

Bastone Bristol marrone

AD-32N

Bastone Bristol nero

AD-33B

Bastone York blu

AD-33G

Bastone York grigio

AD-33N

Bastone York nero

Descrizione

Modello Devon. Bastone in alluminio con impugnatura anatomica destra o sinistra regolabile a 10 differenti livelli d'altezza da 75 a 98 cm. Puntale in gomma. Colore nero.

Modello Dorset. Bastone in alluminio con impugnatura ergonomica regolabile a 10 differenti livelli d'altezza da 79 a 102 cm. Puntale in gomma. Disponibile nei colori marrone e nero.

Modello Bristol. Bastone in alluminio con impugnatura in legno pieghevole e regolabile a 5 differenti livelli d'altezza da 83 a 93 cm. Puntale in gomma. Disponibile nei colori marrone e nero.

Modello York. Bastone in alluminio con impugnatura morbida regolabile a 10 differenti livelli d'altezza da 75 a 98 cm. Puntale in gomma. Disponibile nei colori blu, grigio e nero.

Regolazione dell'altezza

- Allentare la ghiera a vite ed esercitare una leggera pressione sulla spina di bloccaggio.
- Regolare all'altezza desiderata.
- Assicurarsi dell'avvenuto bloccaggio controllando che la spina sia centrata nel foro della misura individuata.
- Serrare nuovamente la ghiera a vite.

Portata

113 kg per tutti i modelli

Pulizia e manutenzione

Pulire con un panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. Controllare periodicamente lo stato ed il corretto fissaggio del puntale in gomma. In caso di usura, provvedere alla sostituzione immediata.

Avvertenze

Impiegare il dispositivo con cautela su superfici bagnate o scivolose ed in presenza di fondo inclinato o sconnesso. Verificare, prima dell'utilizzo, il corretto posizionamento della spina di bloccaggio nel foro della misura desiderata ed il serraggio della ghiera a vite.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>BASTONI N ALLUMINIO</p>	<p>Rev 01</p> <p>Ottobre 2010</p>
--	--	---

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.

Confezione 25 pezzi

Codice CND: Y120399

Progressivo di registrazione: 334959

Produttore **INTERMED srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE