

Codice	Descrizione
<b>PRACTICA ET39</b>	Carrozzina da trasporto misura 39
<b>PRACTICA ET42</b>	Carrozzina da trasporto misura 42
<b>PRACTICA ET45</b>	Carrozzina da trasporto misura 45
<b>PRACTICA ET48</b>	Carrozzina da trasporto misura 48
<b>PRACTICA ET51</b>	Carrozzina da trasporto misura 51

**Descrizione ed indicazioni**

Carrozzine da trasporto con telaio pieghevole in acciaio e braccioli desk ribaltabili indicata per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione traumatica o congenita della funzionalità degli arti inferiori. Le misure 39, 42 e 45 sono dotate di crociera singola. Le misure 48 e 51 sono equipaggiate di doppia crociera.

- Ruote posteriori piene.
- Pedane estraibili e regolabili.
- Fascia ferma-gambe regolabile in nylon.
- Cintura addominale con chiusura anteriore tramite fibbia di plastica.
- Freni registrabili in acciaio.
- Maniglie di spinta in materiale plastico.
- Colore nero martellato.

**Materiali componenti**

Telaio e braccioli	Acciaio
Pannello braccioli	Plastica
Poggia-braccio	PVC imbottito
Seduta e schienale	Nylon imbottito
Ruotini anteriori	PVC
Ruote posteriori	PU morbido
Poggiapiedi	Plastica
Fascia ferma-gambe	Nylon

**Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Per un corretto utilizzo del dispositivo, consultare le "Istruzioni per l'uso".

#### **Dati tecnici**

<b>Portata misure 39, 42 e 45</b>	<b>120 kg</b>
<b>Portata misure 48 e 51</b>	<b>140 kg</b>
Diametro tubi telaio	22 mm
Diametro tubi crociera	26 mm
Diametro ruote posteriori	300 mm
Diametro ruote anteriori	200 mm con spessore 25 mm

<b>Seduta</b>	<b>Larghezza totale</b>	<b>Altezza seduta</b>	<b>Peso</b>
<b>39 cm</b>	52 cm	50 cm	da 19 kg
<b>42 cm</b>	55 cm	50 cm	da 19 kg
<b>45 cm</b>	58 cm	50 cm	da 19 kg
<b>48 cm</b>	61 cm	50 cm	da 19 kg
<b>51 cm</b>	64 cm	50 cm	da 19 kg

#### **Conservazione e smaltimento**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

#### **Manutenzione e pulizia**

Sono necessari controlli periodici per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente.

<b>Freni</b>	Verificare lo stato dei tamponi, eventuali movimenti di gioco e l'efficacia della frenata.
<b>Tele</b>	Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare attenzione alla presenza di tagli o strappi.
<b>Ruote</b>	Verificare lo stato di usura dei pneumatici. Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al telaio e ruotare facilmente. Controllare periodicamente lo stato generale e la funzionalità dei perni.
<b>Braccioli</b>	Verificare lo stato delle imbottiture. Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale.
<b>Poggia-piedi</b>	Verificare che le pedane non presentino rotture e che siano ben fissate ai supporti metallici.
<b>Bulloneria</b>	Verificare il corretto fissaggio e la tenuta di viti e bulloni.

#### **Garanzia**

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti soggette ad usura.

<b><u>Codice CND</u></b>	<b>Y122103</b>
<b><u>Repertorio</u></b>	<b>PRACTICA ET39 1146894/R</b>
	<b>PRACTICA ET42 1146993/R</b>
	<b>PRACTICA ET45 1146994/R</b>
	<b>PRACTICA ET48 1146995/R</b>
	<b>PRACTICA ET51 1146996/R</b>

**Produttore**    **INTERMED srl**

#### **Accessori disponibili**

<b>PE-20P</b>	Pedane elevabili misura 39
<b>PE-20</b>	Pedane elevabili misura 42, 45, 48 e 51
<b>PE-11D</b>	Bracciolo lungo destro
<b>PE-11S</b>	Bracciolo lungo sinistro

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

