



Sgabello da comodo

Cod. 90100002



Comoda Mod. VC002

Cod. 90100012



Comoda Mod. VC001

Cod. 90100008



Prodotto Conforme **CE**

MANUALE D'USO

VAIMAS SRL
via Volpato, 39
36035 Marano Vicentino VI

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =








Direttiva 93/42 CEE
Ausili Medici Classe I
Rev. 1,4

INFORMAZIONI GENERALI

Lo sgabello da comodo, la sedia VC001 e la sedia VC002 sono stati progettati e realizzati per l'inserimento su WC al fine di consentire alle persone disabili o con difficoltà motorie, di espletare in sicurezza le proprie funzioni fisiologiche. Inoltre, in via del tutto temporanea e in casi di estrema urgenza, può essere utilizzato come WC.

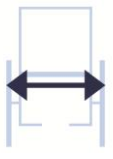DATI TECNICI

1. *Struttura in acciaio cromato*
2. *Schienale e sedile con tappo WC, asportabili*
3. *Dispositivo WC con bacinella*
4. *Braccioli imbottiti*
5. *Misure in cm:*

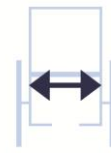							
Sgabello	52	70-78	60	20	90	42	46
VC001	52	94-102	60	20	90	42	46
VC002	52	100	80	20	90	42	46

VERSIONI

SGABELLO DA COMODO- senza ruote e senza pedane con piedini regolabili in altezza 3 posizioni passo 40

VC001- senza ruote e senza pedane con piedini regolabili in altezza 3 posizioni passo 40, schienale in similpelle lavabile estraibile

VC002 - con ruote piroettanti Ø 80 mm (di cui 2 con freno) e pedane in plastica con poggia piede regolabile in altezza


MONTAGGIO

- *Estrarre dall'imballo in cartone la sedia da comodo completa*
- *Rimuovere eventualmente lo scotch dalle ruote e dalla bacinella W.C.*

Per il montaggio della sedia da comodo, basta seguire le istruzioni ed eseguire le regolazioni al seguito:

Togliere le viti presenti nell'attacco al schienale; inserire lo schienale, quindi riposizionare le viti e fissare coadiuvandosi di due chiavi per dadi da 8 mm.

Procedere con il montaggio dei braccioli utilizzando un cacciavite a croce; inserire le viti negli appositi fori, quindi fissare:

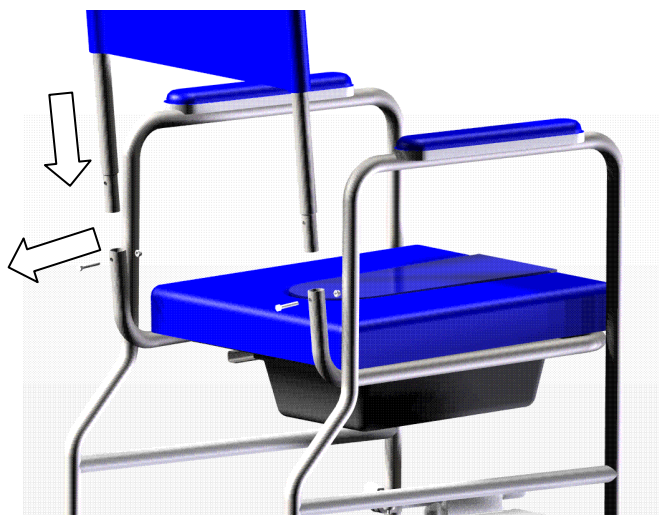

REGOLAZIONI


Gambe Per lo Sgabello da Comodo e il modello VC001 c'è la possibilità di regolare tre altezze di seduta a seconda della posizione del blocco per mezzo del piolo a molla. Per regolare l'altezza spingere con il pollice il piolo all'interno del tubo e con una piccola rotazione spostare la gamba alla posizione voluta. Prestare attenzione che tutte e quattro le gambe siano posizionate alla stessa altezza.

Pedane Aprire il morsetto (figura) che fissa il porta pedana alla gamba della sedia.

Ruotare verso l'esterno il porta pedana fino a portarlo nell'asse ideale gamba anteriore-gamba posteriore (Figura a lato).

Serrare il morsetto fino a bloccare con sicurezza il porta pedana alla gamba della sedia.

Abbassare le pedane in plastica poggia piedi. Regolare l'altezza della pedana nella posizione desiderata.

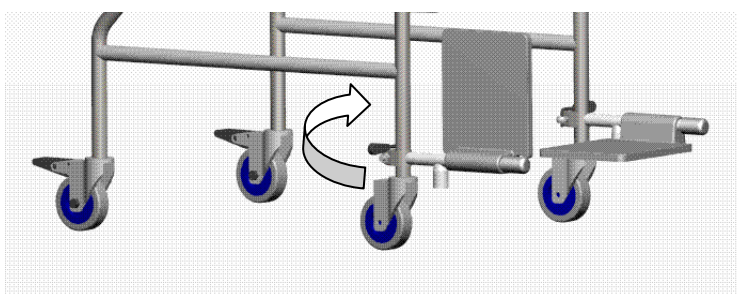

MANUTENZIONI

CONTROLLI

Settimanali: Controllo dello stato di pulizia del sedile e della bacinella W.C.

Mensili: verifica del fissaggio delle viti dello schienale.

Per il modello VC002 controllare il gioco delle ruote piroettanti, controllare il fissaggio della ruota al fusto della sedia coadiuvandosi con una chiave da 9 mm

PULIZIA

Pulire completamente la sedia settimanalmente con prodotti detergenti comuni, **non** usare acidi, o prodotti abrasivi .

UTILIZZO

- Il paziente, qualora le sue capacità non siano tali da garantire un sicuro utilizzo della sedia da comodo, per sedersi o alzarsi deve essere sempre assistito da una persona con normali capacità motorie;
- Per agevolare la seduta e l'alzata dell'utilizzatore, sollevare le pedane in plastica;
- In fase di seduta od alzata **BLOCCARE con il freno le ruote posteriori (solo mod. VC002)** agendo con il piede sulla staffa in plastica posta nella parte superiore della ruota;
- Qualora il paziente necessiti di assistenza, l'operatore, durante la fase di seduta, dovrà tenere ferma la sedia con le mani ponendosi nella parte posteriore (per entrambi i modelli);
- **VC002: Durante la fase di seduta e alzata del paziente dalla comoda è severamente proibito appoggiare i piedi sulle pedane in plastica!**
- **VC002:** Durante la fase di trasporto il paziente deve tenere appoggiati i piedi sulle pedane in plastica e mantenere un corretta seduta
- Prima di introdurre la sedia da comodo sul W.C. e far sedere il paziente, rimuovere la bacinella W.C. in plastica e il tappo imbottito posto sul sedile.

ASSISTENZA

Nel caso che qualche componente, fuori dall'ordinaria manutenzione, si dovesse deteriorare, rivolgetevi al vostro distributore oppure direttamente in sede VAIMAS s.r.l. I nostri tecnici saranno a vostra disposizione.

SICUREZZA

- **PORTATA MASSIMA 90 KG**
- **Usare esclusivamente per gli usi previsti dal fabbricante.**
- **Assistere sempre il paziente durante la fase di sollevamento in piedi e mentre si siede.**
- **Per il modello VC002 frenare le ruote posteriori quando l'utilizzatore si alza e si siede sulla comoda.**
- **Durante la fase di alzata e seduta non appoggiare i piedi sulla pedana in plastica.**
- **Ogni eventuale modifica o rimessa a nuovo deve essere approvata dal fabbricante.**
- **Ogni uso diverso da quello previsto dal fabbricante può arrecare danni alla salute del paziente.**
- **Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati dall'utilizzo scorretto o non previsto nel presente manuale.**

Avvertenza: *Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.*