

## CORSETTI UNISEX AUTOMODELLANTI

### CORSETTO LOMBO-SACRALE ALTO CON PANNELLO PLASTICO TERMOFORMABILE Art. 574 - 584

Supporto immobilizzante della regione lombo-sacrale con funzione di attenuazione dello stato doloroso nei casi di patologie posturali, degenerative o muscolari. Grazie alla praticità e facilità di applicazione ed al perfetto adattamento a qualsiasi forma e misura, è garantito il massimo comfort ed una ampia possibilità di regolazione.



Art. 584



Art. 574

#### Indicazioni

- Patologie posturali: Scoliosi - Dismetria del bacino - Lombalgie - Lombosciatalgie - Iper/ipo-lordosi lombare - Ipo/ipercifosi sacrale.
- Patologie degenerative: Osteoporosi - Spadiloartrosi - Contratture muscolari lombo sacrali
- Patologie raumatiche: Discopatie - Protrusioni - Ernia discale.

#### Caratteristiche


E' costituito da una struttura elastica di cotone, all'interno della quale sono inserite delle aste automodellanti e flessibili. Su queste scorrono dei tiranti rigidi che, incrociandosi nella parte posteriore al momento dell'allacciatura, irrigidiscono l'intera struttura ed immobilizzano in modo efficace la regione lombo-sacrale.

#### Benefici

Pratico e facile da indossare si adatta perfettamente alle diverse caratteristiche fisiche. L'esclusivo sistema di chiusura modulare con bloccaggio progressivo, **brevettato da Pavis**, risponde in modo molto funzionale alle esigenze di immobilizzo delle diverse fasi evolutive delle varie patologie e consente di differenziare il grado di tensione in tre aree distinte della regione lombo-sacrale.


#### Componenti specifici

Esclusivo tessuto PAVIS in cotone, anallergico e traspirante.

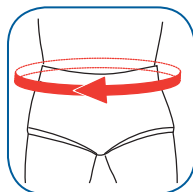


**New EDGE<sup>®</sup>**  
LINE

| Size                          | S     | M     | L      | XL      | XXL     | 3XL     |
|-------------------------------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| Circonferenza del bacino (CM) | 60-80 | 75-90 | 85-110 | 105-120 | 120-140 | 135-153 |

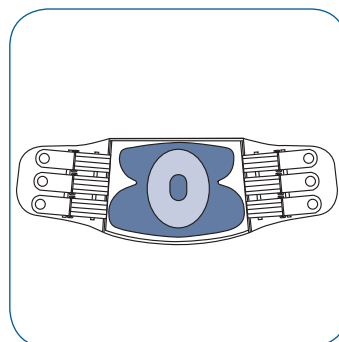

Art.574-tre bande-altezza cm 32  
Art.584-due bande-altezza cm 27

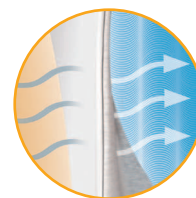

**100% COTONE SULLA PELLE**

## CORSETTO LOMBO-SACRALE ALTO CON PANNELLO PLASTICO TERMOFORMABILE Art. 574 - 584

### Come si indossa

La prima volta il dispositivo deve essere indossato con l'aiuto di una persona competente, in caso contrario si annulla la garanzia del prodotto e gli effetti benefici diminuiscono notevolmente. È necessario indossare biancheria intima di cotone sotto tale supporto.

Al fine di indossarlo correttamente seguire le seguenti istruzioni:

a) il pannello termoplastico deve essere estratto dalla sua fodera e modellato utilizzando aria calda con un phon, un forno o un getto di acqua calda.

**ATTENZIONE: PER EVITARE GRAVI SCOTTATURE ASSICURARSI DI NON SCALDARE TROPPO IL PANNELLO E USARLO SEMPRE SOPRA UNA MAGLIA, MAI DIRETTAMENTE A CONTATTO CON LA PELLE.**

Riposizionare il pannello nell'apposita fodera ed inserirlo nella parte posteriore nella tasca predisposta (fig. 1);

b) afferrare entrambe le bande e tirarle esternamente

c) indossare il corsetto tenendo la banda di velcro morbido sull'addome e tirando la parte di velcro pungente con l'altra mano, verso l'esterno prima di riportarlo sull'addome (fig. 2);

**NB.** per un risultato efficace, assicurarsi di aver scelto la taglia esatta: la parte di velcro pungente deve coprire la parte morbida posta sull'addome almeno per la metà.

d) partendo sempre dalle cinghie inferiori afferrare sia quella di destra che di sinistra e tirarle contemporaneamente fino a raggiungere la pressione desiderata quindi fissarle sull'addome. Ripetere questo procedimento per le altre cinghie, salendo verso l'alto (fig. 3-4).

