

CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

La gamma dei prodotti è suddivisa in due linee:

■ ORTHOSELF®

identifica i prodotti ortopedici destinati alle patologie lievi e ai piccoli eventi traumatici, con o senza necessità di prescrizione. Una famiglia di prodotti fruibile da chiunque, in caso di necessità.

■ MEDICALORTHO®

identifica presidi, ortesi e tutori ortopedici, destinati alle patologie più complesse, che necessitano della prescrizione medica e del supporto di un tecnico ortopedico.

GRAZIE PER AVER SCELTO LA QUALITÀ RO+TEN.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management.



RO+TEN

RO+TEN s.r.l. via Monte Cervino, 50
20043 Arcore (MB)
tel. +39 039 601 40 94 fax +39 039 601 42 34
www.roplusten.com info@roplusten.com

9DCFG00880ITAO1

litecross

MEDICALORTHO®

ART. PR1-1092
Corsetto dorso-lombare
con spallacci

LEGGERE ATTENTAMENTE E PER INTERO
LE SEGUENTI ISTRUZIONI



È un dispositivo medico di grande efficacia terapeutica che garantisce supporto e sollievo. La struttura realizzata in "sensitive®" (un esclusivo tessuto elasticizzato, traspirante, indemagliabile e antistatico, con un solo millimetro di spessore), rinforzata da stecche modellabili integrate nella fascia e da speciali tiranti elastici, assicura un sostegno sicuro e controllato, che lo rende efficacissimo nelle patologie lievi del tratto dorsolombare. Facile da indossare, garantisce la corretta posizione del rachide e resta impercettibile sotto gli abiti.

RO+TEN

stare meglio fa bene

CARATTERISTICHE

Spallacci imbottiti

Struttura in tessuto esclusivo Sensitive®, elasticizzato, traspirante, indemagliabile e antistatico

Tiranti elastici per un sostegno variabile e personalizzato

Chiusura anteriore a velcro

Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua

Parte dorsolombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- 1 *Aprire il busto e fissare provvisoriamente i cinturini in velcro sulle bande laterali. Posizionare il busto in modo che l'asola sia rivolta verso l'alto.*
- 2 *Indossare il busto inserendo il pollice nell'asola per accompagnarne la chiusura e fissare bene con la chiusura a velcro centrale (fig.A).*
- 3 *Verificare che sia ben centrato e, se necessario, riposizionarlo (fig.B).*
- 4 *Iniziare a stringere il busto agganciando i cinturini bassi sulla banda velcrabile anteriore (fig.C).*
- 5 *Agganciare successivamente i cinturini alti sulla banda velcrabile anteriore (fig.D).*
- 6 *Far girare gli spallacci sopra le spalle, quindi sotto le ascelle e incrociarli posteriormente (fig.E). Fissarli infine, a velcro, sulla banda anteriore (fig.F).*

INDICAZIONI

Trattamento delle lombo-dorsalgie in osteoartrosi diffusa della colonna

Patologie reumatologiche

Tutela post-chirurgica delle fratture vertebrali trattate chirurgicamente con strumentazione e delle ernie dorsali


PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

È consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto diretto con la pelle.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici.

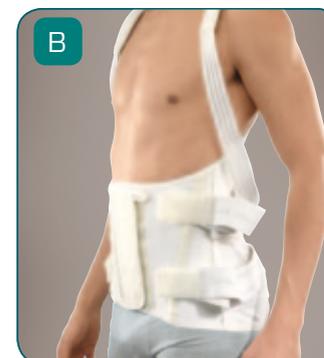

AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

MANUTENZIONE

Istruzioni per il lavaggio:

- Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
- Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.