


Codice CND: Y123621

Destinazione d'uso:

Dispositivo per spostamenti di pazienti disabili.

Classificazione Allegato IX Direttiva 93/42/CEE e smi: I

Caratteristiche Tecniche:

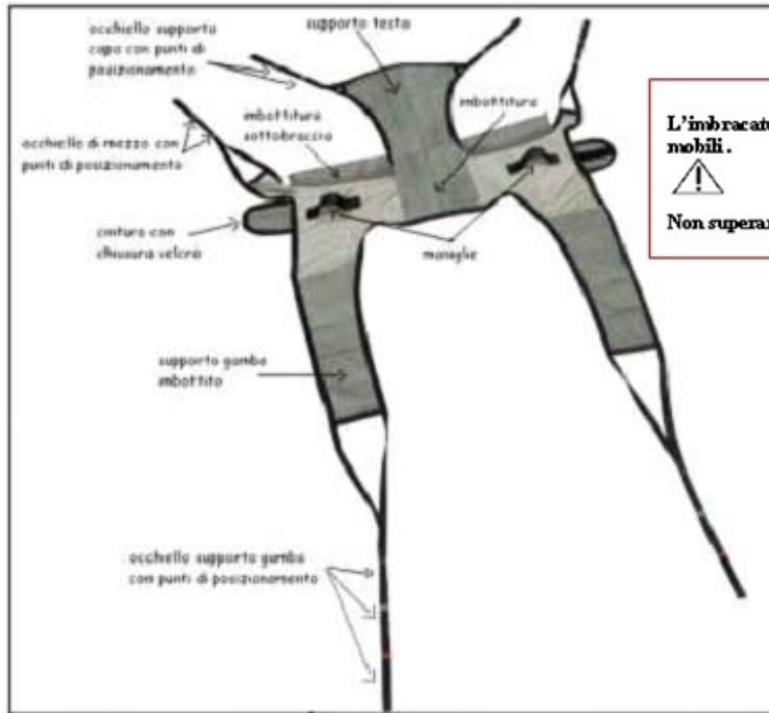

COMBINAZIONI
L'imbracatura può essere utilizzata con sollevatori sia fissi che mobili.

Non superare il peso massimo dichiarato sull'imbracatura

L'imbracatura N9624 con supporto del capo viene utilizzata per il sollevamento, trasferimento e operazioni igieniche per la toilette.

E' realizzata con tessuto a rete denominato Strongtex , 100% poliestere, affidabile in ogni situazione anche a contatto con l'acqua, antistrappo e altamente traspirante.

Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l'imbracatura e forma, ad ogni estremità, un occhio con diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria durante il sollevamento.

La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell'imbracatura al fine di garantire maggiore tenacità. Le cuciture vengono eseguite utilizzando il filo in poliestere ad alta resistenza. L'imbracatura è fornita di una cintura di sicurezza con chiusura velcro.

Una morbida imbottitura fornisce un gradevole supporto sotto le braccia. Portata max. Kg. 250

L'imbracatura è conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 10535 come da certificato del laboratorio accreditato.

Modalità d'impiego:

Adatta ad essere utilizzata con sollevatori sia fissi che mobili.

Manutenzione e pulizia:

Lavabile in acqua a una temperatura massima di 60° con saponi o detersivi neutri. Non stirare.



KSP Italia Srl

Via Dell'Artigianato, 1 Zona Ind. 06031 Bevagna (PG)

Tel. +39.0742.361947 Fax. +39.0742.361946 Email. ksp@kspitalia.com

Reg. Imp. di PG: 01793970540 Numero REA 160010 Cap. Soc. € 10.400,00 i.v. P. IVA 01793970540


Avvertenze e precauzioni:

- Prima dell'utilizzo assicurarsi che il dispositivo non sia danneggiato: il tessuto, la cinghia, le cuciture e gli occhielli di sospensione devono essere integri
- Ispezionare periodicamente per verificare eventuali segni di danno, usura o potenziale cedimento almeno ogni 6 mesi soprattutto se la pulizia avviene con maggiore frequenza rispetto al normale
- Accertarsi che gli occhielli dell'imbracatura siano agganciati adeguatamente al bilanciere
- Conservare e utilizzare lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Non superare la portata massima dichiarata

Modalità di smaltimento:

Alla fine della sua vita utile il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse.

CODICE	MISURE DISPONIBILI				
	Taglia	A	B	C	D
N9624-S	S	123 cm.	88 cm.	22 cm.	42 cm.
N9624-M	M	130 cm.	96 cm.	25 cm.	50 cm.
N9624-L	L	135 cm.	104 cm.	29 cm.	58 cm.
N9624-XL	XL	140 cm.	110 cm.	32 cm.	66 cm.
N9624-XXL	XXL	148 cm.	127 cm.	85 cm.	66 cm.

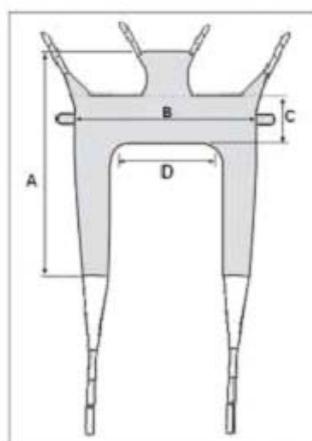

KSP Italia Srl

Via Dell'Artigianato, 1 Zona Ind. 06031 Bevagna (PG)

Tel. +39.0742.361947 Fax. +39.0742.361946 Email. ksp@kspitalia.com

Reg. Imp. di PG: 01793970540 Numero REA 160010 Cap. Soc. € 10.400,00 i.v. P. IVA 01793970540