


SUPPORTI PER ARTICOLAZIONI

IMMOBILIZZATORE DI BRACCIO E SPALLA Art. 406

Costituito da un confortevole supporto per il braccio e da una fascia toracica, dotata di chiusura a velcro, che lo sovrappone e lo blocca.

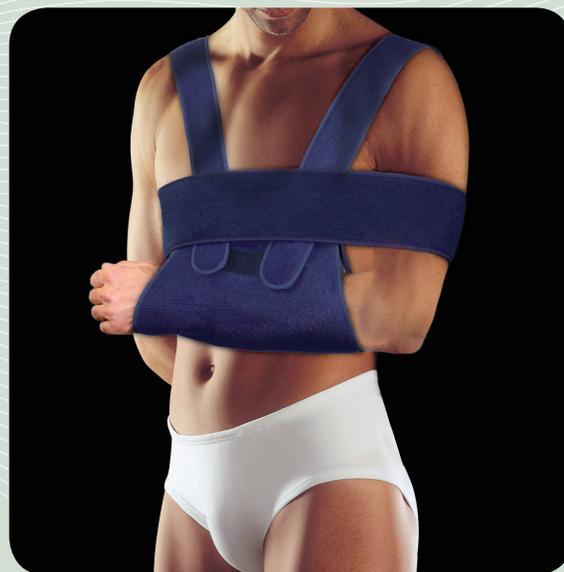

Indicazioni

Immobilizzazione del gomito a seguito di eventi traumatici quali: fratture omerali o della clavicola, lussazioni, contusioni e distorsioni; Immobilizzazione della spalla a seguito di intervento chirurgico (blocco della rotazione esterna); sostegno della spalla in seguito a emiplegia o lesioni del plesso brachiale.

Caratteristiche


Dal supporto per il braccio, due bande vanno sulla parte dorsale e si incrociano tra loro per rendere più confortevole il supporto. Scendono poi su entrambi i lati delle spalle e si agganciano, con delle chiusure a velcro, al supporto del braccio stesso.

Benefici


Estremamente funzionale, completamente apribile è comodo da indossare e, grazie alle chiusure a velcro, le lunghezze dei tiranti sono personalizzabili e regolabili ad hoc secondo le esigenze. Ambidestro. Non contiene neoprene.

Componenti specifici

Tessuto 100% traspirante.

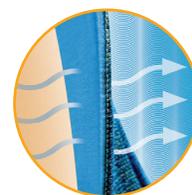

IL TESSUTO 100% TRASPIRANTE

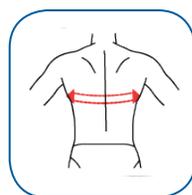

New EDGE[®]
LINE

Size	M	L	XL
Diametro del torace CM	< 90	90-105	> 105

www.pavis.it

PAVIS[®]

**IMMOBILIZZATORE DI BRACCIO
E SPALLA Art. 406**

Come si indossa

- Indossare sopra una maglietta intima;
- Scegliere la misura facendo riferimento alla tabella riportata sulla confezione;
- Infilare l'avambraccio nel supporto per il braccio;
- Fare passare i tiranti sulla parte posteriore, incrociarli sul dorso e scendere sull'addome fino ad agganciarsi sulla tasca stessa in modo da posizionare l'avambraccio in posizione orizzontale;
- Utilizzare la banda supplementare sovrapponendo l'avambraccio e bloccarlo in posizione.