

- Utilizzare su cute integra
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche
- Non utilizzare in caso di usura rottura o non integrità del materiale

AVVERTENZE D'USO

Si consiglia di rimuovere la stecca modellabile e chiudere le chiusure a strappo prima di lavare il dispositivo.

MANUTENZIONE

La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni. Al momento nessuna nota.

CONTROINDICAZIONI

- rizoartrosi lieve o moderata
- Traumi distorsivi del primo dito
- esiti intervento di artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi
- esiti lesione di STENER (conservativo o post operatorio)
- esiti fratture primo metacarpo, dolorosi fratture di scafoide

INDICAZIONI



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 3 - 10/20

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
[facebook.com/fgpsrl](https://www.facebook.com/fgpsrl)



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

D.T3 01


Immobilizzatore steccato primo dito

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il tutore come da figura 1 al polso, con la sagomatura in corrispondenza del pollice.
2. Unire i nastri a strappo come da figura 2 isolando il pollice e accertarsi che la stecca sia in corrispondenza del dorso del pollice.
3. Portare in tensione, avvolgere il polso e allacciare con la chiusura a strappo come da figura 3.

PER IL TECNICO ORTOPEDICO

Se necessario estrarre la stecca modellabile, adattarla al paziente e quindi reinserirla. Se necessario, accorciare opportunamente la lunghezza dei nastri.

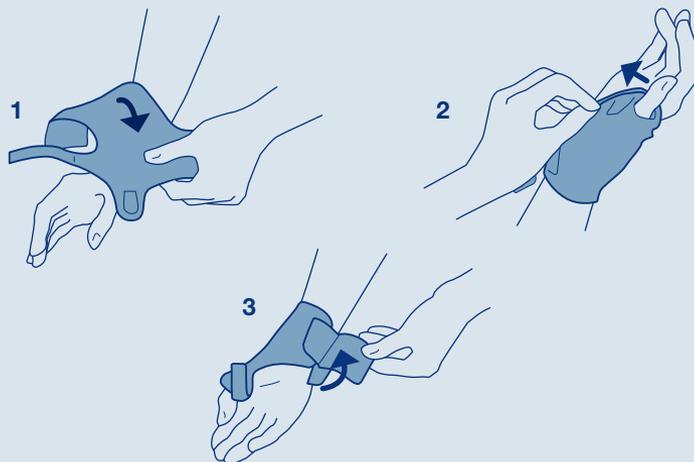

STECCATURA

- laterale in alluminio modellabile

STRUTTURA

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- a strappo sul polso e sul pollice regolabile a misura tagliando il materiale in eccesso

NOTE

- Il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	fino a 15 cm
M	15–20 cm
L	20–25 cm
XL	oltre 25 cm



Lunghezza
14,5 cm

Codice d'ordine:
DT3-01

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



Conservare in
ambiente secco



Conservare lontano
da fonti di calore

NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni e quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta FGP Srl indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare una e-mail a fgp@fgpsrl.it. - L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.