

- Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato
- Utilizzare su pelle sana

**AVVERTENZE D'USO**

Al momento nessuna nota.  
La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

**CONTROINDICAZIONI**

- artralgie
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- esiti fratture del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- traumi distortivi moderati e severi del polso

**INDICAZIONI**



AZIENDA CERTIFICATA  
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 4 - 04/20




Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it) - [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)  
[facebook.com/fgpsrl](https://www.facebook.com/fgpsrl)



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

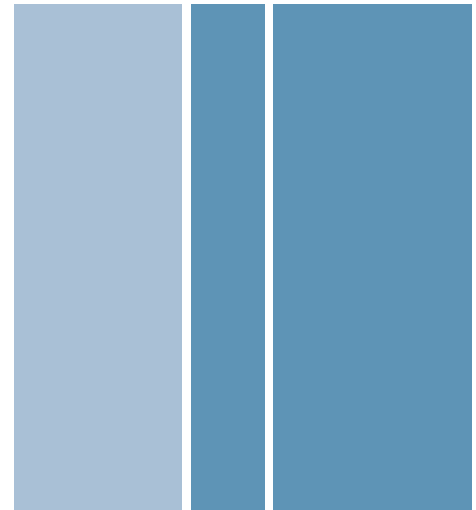


**D.T3 03**

Polsiera steccata light

# ISTRUZIONI PER L'USO

1. Slacciare tutti i nastri a strappo e indossare la polsiera (fig. 1).
2. Chiudere rispettivamente e in sequenza i nastri (fig. 2).

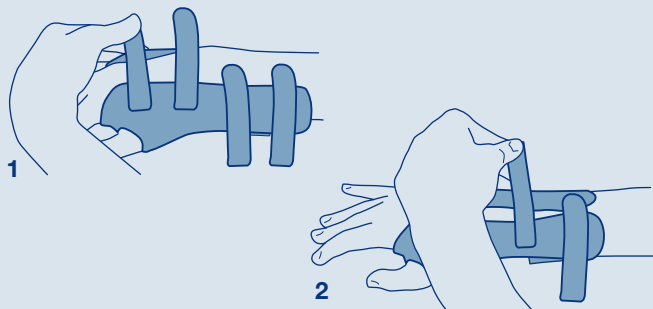

## PER IL TECNICO ORTOPEDICO

Estrarre la stecca modellabile, adattarla al paziente e quindi reinserirla. Se necessario accorciare la lunghezza dei nastri.

## MANUTENZIONE

Si consiglia di rimuovere la stecca palmare e chiudere i nastri prima di lavare la polsiera.

## STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile

## STRUTTURA

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore
- apribile completamente

## CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso

## NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

## MISURE (DX/SX)

Taglie    Ø Polso

XS	fino a 13 cm
S	13-16 cm
M	16-20 cm
L	20-25 cm
XL	oltre 25 cm



Lunghezza  
19 cm

Codice d'ordine:  
DT3-03

## MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

## CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



Conservare in ambiente secco



Conservare lontano da fonti di calore

## NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.