

- Non utilizzare in caso di usura rottura o non integrità del materiale
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche
- Utilizzare su cute integra

#### **AVVERTENZE D'USO**

Al momento nessuna nota.  
La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

#### **CONTROINDICAZIONI**

- distorsioni di polso e primo dito
- iniziale morbo di De Quervain
- iniziale primo dito a scatto doloroso
- esiti lesioni di Stener (pollice dello sciatore)

#### **FILAMED® 111**

- lievi instabilità radio-carpiche
- polso SLAC iniziale
- polso SNAC iniziale
- lievi artralgie del polso
- distorsioni lievi del polso

#### **FILAMED® 101**

#### **INDICAZIONI**



AZIENDA CERTIFICATA  
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 8 - 10/20

FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it) - [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)  
[facebook.com/fgpsrl](https://facebook.com/fgpsrl)



**FGP** Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment




**FGP** Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

**FILAMED® 101/111**

Polsino semplice

# ISTRUZIONI PER L'USO

1. Far passare il pollice attraverso il foro come da fig. 1; successivamente avvolgere attorno al polso prima il lembo corto e poi quello lungo.
2. Portare in tensione il polsino fissandolo con la chiusura a strappo.

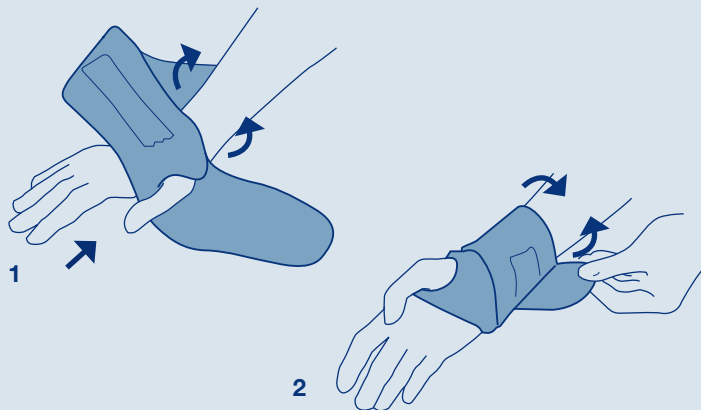

## STECCATURA

- nessuna

## STRUTTURA

- in neoprene leggero

## PRESA POLLICE

- FILAMED® 101: no
- FILAMED® 111: si

## CHIUSURA

- a strappo sul polso

## MISURE

Taglia unica ambidestra.

**Codice d'ordine: FILAMED 101; FILAMED 111 con dito**

## MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

## CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



## NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni e quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta FGP Srl indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare una e-mail a fgp@fgpsrl.it. - L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.