

⚠ **Si consiglia di non utilizzare il dispositivo a diretto contatto con la pelle.**

Al momento, nessuna nota. La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

#### **CONTROINDICAZIONI**

- tratto colonna interessato: L1-S1
- traumi lievi del rachide lombare
- contratture muscolari lombari
- postoperatorio di ernia discale
- discopatie
- discartrosi
- lombosciatalgia
- lombalgia

#### **INDICAZIONI**



AZIENDA CERTIFICATA  
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 10 - 02/20


FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it) - [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)  
[facebook.com/fgpsrl](https://www.facebook.com/fgpsrl)



**FGP** Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



**FGP** Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

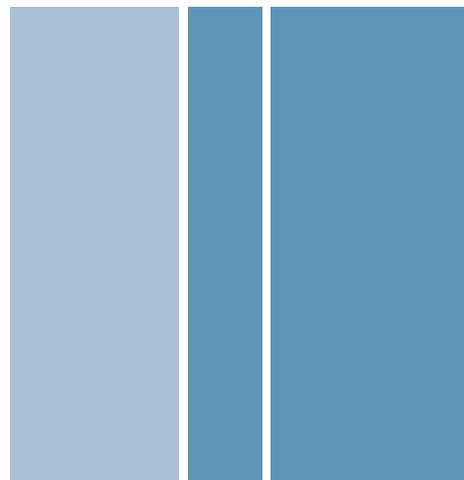


**2 SKIN®**


**Corsetto elastico double skin  
con tiranti removibili**

# ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire e indossare il corsetto con l'aiuto della maniglia interna (fig.1), fissare la chiusura frontale come illustrato in figura 3 e 4.

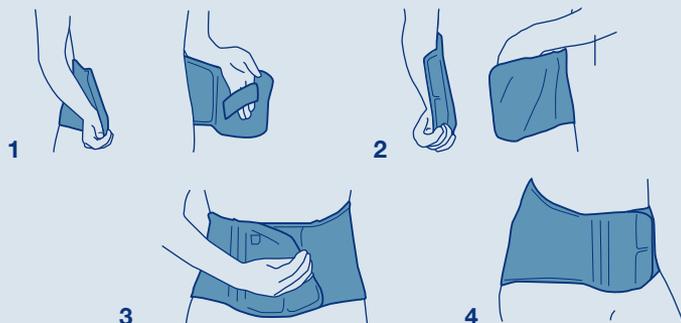

2. Regolare la posizione della placca di spinta lombare.
3. Fissare i tiranti elastici (figg.1 e 2) alla chiusura frontale.

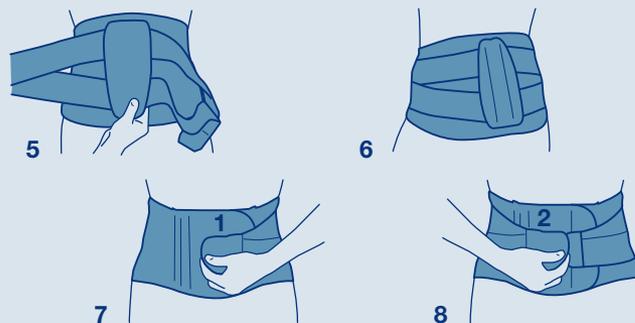

## STRUTTURA

- tessuto in lycra elastica traspirante e antibatterico accoppiato con membrana idrofilica, realizzato senza cuciture

## TIRANTI

- due fasce elastiche saldate alla pelota posteriore totalmente removibile si agganciano anteriormente in un unico tirante

## STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

## CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo

## NOTE

- la patella anteriore è dotata di maniglia interna per facilitare la chiusura, il tirante removibile permette di modulare il tutore in base al percorso terapeutico del paziente



## MISURE

Taglie	Ø Bacino	Altezza:	Cod. d'ordine:
S	65-79 cm	2S-200 SKIN: 27 cm	<b>2S-200 SKIN;</b>
M	80-94 cm	2S-250 SKIN: 24 cm	<b>2S-250 SKIN;</b>
L	95-109 cm	2S-201 GREY: 27 cm	<b>2S-201 GRIGIO;</b>
XL	110-124 cm	2S-251 GREY: 24 cm	<b>2S-251 GRIGIO</b>
XXL	125-140 cm		

## MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

## CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



## NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.