



CLL 300



CLL 400

INDICAZIONI

- cervicaglia
- discopatie in quadro artrosico e/o post acute con o senza ernie discali
- esiti dolorosi di fratture cervicali
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di moderata entità

CLL 400

- cervicaglia
- discopatie in quadro artrosico e/o post acute con o senza ernie discali
- esiti dolorosi di fratture cervicali
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- piccoli distacchi ossei dei processi spinosi cervicali
- dolore cervicale in artrose reumatoide iniziale
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di moderata entità

CONTROINDICAZIONI

Al momento nessuna nota.
La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

AVVERTENZE D'USO


- Utilizzare su pelle sana
- Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 11 - 04/20

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
[facebook.com/fgpsrl](https://www.facebook.com/fgpsrl)

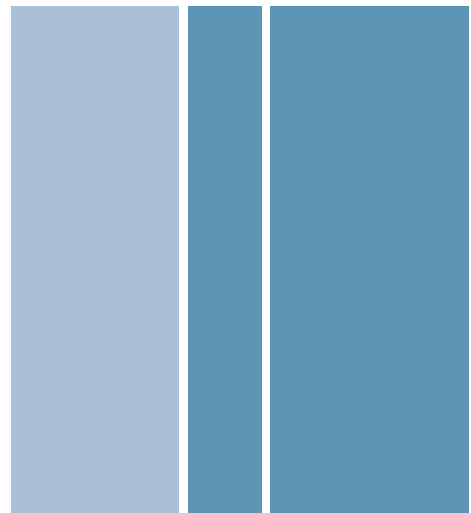


CLL 300/400

Collare cervicale rigido




ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il collare avendo cura di non stringere troppo (fig. 1).
2. Chiudere posteriormente con il sistema a strappo (fig. 2).

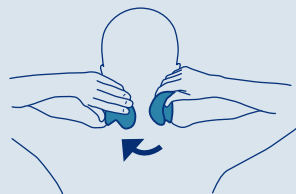

1

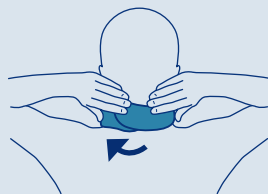

2

STRUTTURA

• polietilene forato, imbottitura in gommapiuma rivestita in similpelle

MENTONIERA

- CLL 300: assente
- CLL 400: presente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

MISURE

CLL 300

Taglia	Ø Collo
XS	29-35 cm
S	34-39 cm
M	38-44 cm
L	42-48 cm
XL	47-55 cm

CLL 400

Taglia	Ø Collo
S	34-39 cm
M	38-44 cm
L	42-48 cm
XL	47-55 cm




Altezza
regolabile con
sistema a strappo

Codice d'ordine:
CLL-300
CLL-400


Per il tecnico ortopedico:

Istruzioni per la regolazione dell'altezza del collare

3. Tenere il collare come da disegno, quindi regolare l'altezza dei due pezzi attraverso il sistema a strappo (fig. 3).
4. Posizionare i sistemi grippanti della parte superiore in corrispondenza di quelli della parte inferiore (fig. 4).

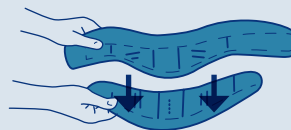

3

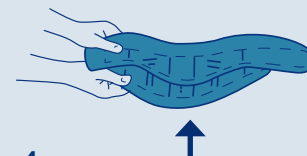

4

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
Icona di una mano sotto acqua.	Lavaggio a mano. NOTA: lavare delicatamente con una spugna morbida. Risciacquare accuratamente
Icona di una stella con una X sopra.	Non candeggiare
Icona di una macchina per lavare con una X sopra.	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
Icona di un ferro da stiro con una X sopra.	Non stirare
Icona di un cerchio con una X sopra.	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgpsrl.it - L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.