

△ Si consiglia di non utilizzare il dispositivo a diretto contatto con la pelle.

Al momento, nessuna nota.  
La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

#### CONTROINDICAZIONI

- tratto colonna interessato: L1-S1
- traumi lievi del rachide lombare
- contratture muscolari lombari
- postoperatorio di ernia discale
- discopatie
- discartrosi
- lombosciatalgia
- lombalgia

#### INDICAZIONI



AZIENDA CERTIFICATA  
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 7 - 02/20


FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it) - [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)  
[facebook.com/fgpsrl](https://www.facebook.com/fgpsrl)



**FGP** Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



**FGP** Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

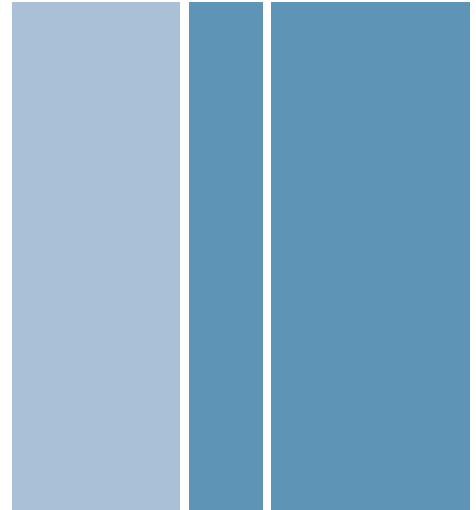


**FLEXÒ**

Corsetto semirigido millerighe

# ISTRUZIONI PER L'USO


1. Indossare il corsetto utilizzando la presa interna (fig. 1) e fissare la chiusura frontale (fig. 3).

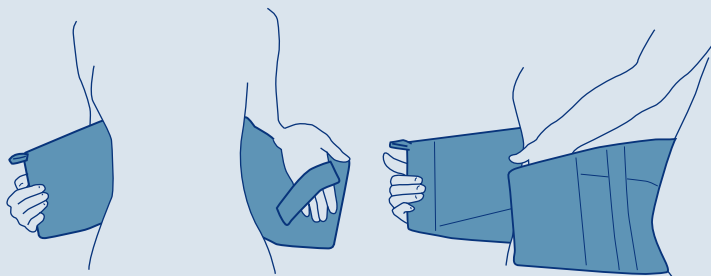

1

2

2. Per togliere il corsetto utilizzare l'apposito passante.

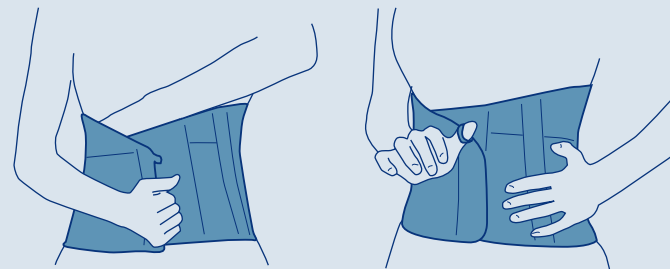

3

4

## STRUTTURA

- tessuto elastico millerighe semirigido con sistema di trazione lombare a diamante

## TIRANTI

- nessuno

## STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

## CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo

## MISURE

Taglie    Ø Bacino

S	60-74 cm
M	75-89 cm
L	90-104 cm
XL	105-119 cm
XXL	120-135 cm



Altezza posteriore

27 cm

Codice d'ordine: CRM-900

## MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

## CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



Conservare in ambiente secco



Conservare lontano da fonti di calore

## NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.