

⚠ Il dispositivo non va indossato a diretto contatto con la pelle. Si consiglia di indossare una maglia o una canottiera.

Al momento, nessuna nota. La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

CONTROINDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- postoperatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombari
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

INDICAZIONI



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 5 - 02/20



FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
[facebook.com/fgpsrl](https://www.facebook.com/fgpsrl)




Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

CRM 950



Corsetto elastico Millerighe con tiranti

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il corsetto.

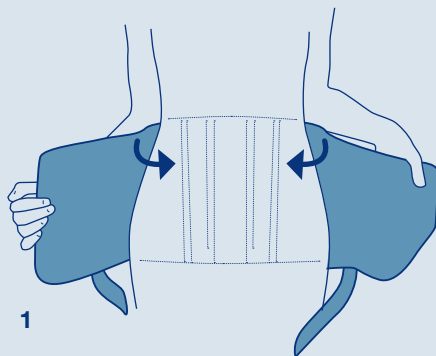

2. Chiudere la chiusura frontale, i tiranti in modo che si avverta una sensazione di compressione, ma non di costrizione e disagio.

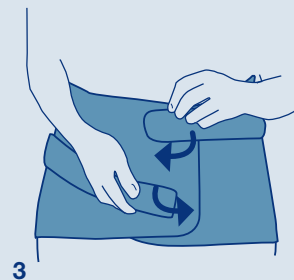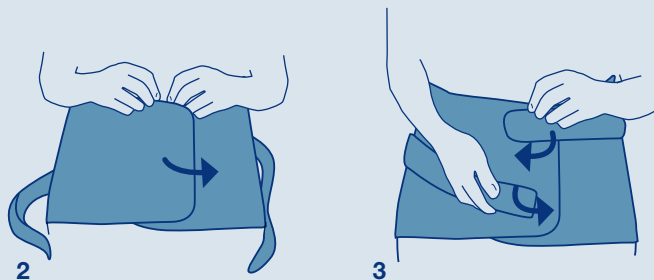

STRUTTURA

- tessuto elastico millerighe semirigido traspirante

TIRANTI

- due fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si incrociano e si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo

MISURE

Taglie Ø Bacino

S	60–74 cm
M	75–89 cm
L	90–104 cm
XL	105–119 cm
XXL	120–135 cm



Altezza posteriore

27 cm

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



Conservare in ambiente secco



Conservare lontano da fonti di calore

NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.

Codice d'ordine: CRM-950