

△ Si consiglia di non utilizzare il dispositivo a diretto contatto con la pelle.

Al momento nessuna nota.
La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

CONTROINDICAZIONI

- trattò colonna interessato: D4-S1
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- post operatorio interventi discectomia
- dorso curvo
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorsalgie e lomalgie (acute e croniche)

INDICAZIONI



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 4 - 02/02

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
[facebook.com/fgpsrl](https://www.facebook.com/fgpsrl)



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment




Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

DORSOFIXÒ® 4.0

Corsetto semirigido con spallacci

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il corsetto (fig.1) e fissare la chiusura frontale (fig.2).
2. Far aderire i tiranti elastici superiori e inferiori alla chiusura frontale (fig.3 e 4).
3. Saldare i tiranti alti delle spalline facendoli passare sopra le spalle, sotto le ascelle, incrociarsi nel passante verticale posteriore e poi fermarli alla chiusura frontale del corsetto (fig.5 e 6).
4. Per togliere il corsetto aprire i tiranti e utilizzare l'apposito passante (fig.7).

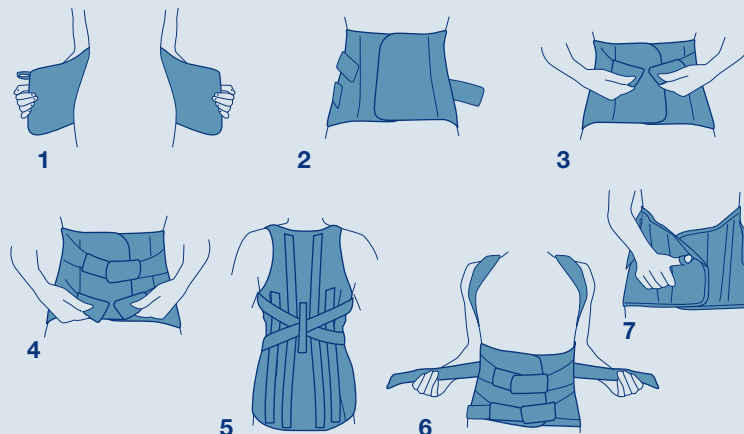

STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- spallacci sagomati e imbottiti dotati di sistema modulare di regolazione della spinta che si agganciano anteriormente in un tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

NOTE

- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo
- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento

MISURE BACINO

Tg.	Ø donna	Ø uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm



Altezza
Donna 55 cm
Uomo 55 cm

Codice d'ordine
DFU-700 uomo
DFD-710 donna

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it - L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.