



INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

CONTRONDAZIONI

Allo stato attuale, nessuna nota. Se posizionato con la supervisione del medico, o del tecnico ortopedico, ed in modo corretto non ci sono controindicazioni!

AVVERTENZE D'USO

- Si consiglia di non usare il dispositivo a diretto contatto con la pelle; indossare una maglia o una canottiera
- Utilizzare su pelle sana
- Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato



Orthopedic & Rehabilitation Equipment

AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016



Rev. 4 - 08/20

FGP srl

Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867

F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

 facebook.com/fgpsrl



Orthopedic & Rehabilitation Equipment

F 35 POWER

**Iperestensore vertebrale a 3 punti
basculante con banda pelvica regolabile**


MISURE

Tagline

Taglie Ø Bacinio

76-90 cm M

XL 106-115 cr

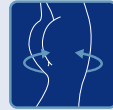

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia

NOTE

- aganciata mediante cintura a strappo
- realizzata in tessuto Sensitive® Fabric con imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali
- posizionabile sia orizzontalmente che verticalmente

PELOTA DORSALE

- in alluminio con regolazione telescopica dell'altezza
- imbottiture rivestite in tessuto Sensitive®*Fabric a contatto con la pelle, con imbottiture laterali fissate mediante viti in tecnopolimero

STRUTTURA

- basculante con possibilità di blocco nel punto di massima estensione (30°)
- fissa dotata di pelota snodabile imbottita e rivestita in tessuto Sensitive® Fabric

BANDA PELVICA

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: lavare delicatamente con una spugna morbida. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.

CONSERVARE IN
ambiente secco
da fonti di calore



Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile parlare l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclamo o malintenzionato invitare a rivolgersi alla ditta G.C.P. indicandone i motivi al numero 045 86000867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a gcp@tiscali.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.

ISTRUZIONI PER L'USO

PER LA PRIMA APPLICAZIONE: INDICAZIONI PER IL MEDICO O TECNICO ORTOPEDICO

⚠ AVVERTENZA

La prima applicazione del tutore al paziente e le successive regolazioni devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante.

Verificare le dimensioni del tutore in rapporto alla conformazione anatomica del paziente.

1. Se necessario, agendo sulla parte sternale e laterale, è possibile regolare l'altezza e la larghezza del tutore (fig. 1).
2. Posizionare il tutore al paziente come in fig. 1 e allentare le viti (figg. 2, 3 e 4).
3. Regolare l'iperestensore in altezza, la banda pelvica dovrà posizionarsi sul pube e la pelota frontale sullo sterno fig 5.
4. Stringere a fondo le viti.
Chiedere al paziente di sedersi per accertarsi che il tutore sia stato applicato in modo corretto e non crei fastidio.
Se necessario procedere ad una nuova regolazione.
5. Adattare la larghezza al torace del paziente (fig. 6), stringere a fondo le viti e controllare la simmetria del tutore.

REGOLAZIONE DELLA PELOTA POSTERIORE

Posizionare la pelota lombare orizzontalmente o verticalmente (figg. 7-8) come prescritto dal medico curante, in caso di posizionamento verticale, sfilare la cintura dai passanti orizzontali e reinserirla in quelli verticali.



⚠ Assicurarsi che la placca lombare sia ben centrata sulla colonna vertebrale.

Se necessario è possibile spostare la chiusura B.Fast (fig. 9).

APPLICAZIONI SUCCESSIVE: PER IL PAZIENTE


Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

1. Indossare il tutore avendo cura che il cuscinetto sternale in alto appoggi esattamente sullo sterno.
Far passare la cintura d'appoggio lombare dietro la schiena. Agganciare e chiudere il gancio slitta, in modo che non risulti troppo stretto, fig. 2 (nel caso ciò si verificasse, sganciare e regolare la cintura a strappo).
2. Bloccando l'apposita chiusura **B. FAST** si otterrà il fissaggio definitivo (fig. 3 e fig. 3-A).
3. ⚠ **Attenzione:** per togliere il tutore aprire la chiusura **B. FAST** (fig. 4) e poi il gancio slitta (fig. 2).

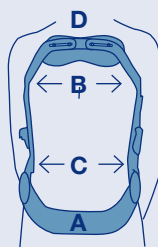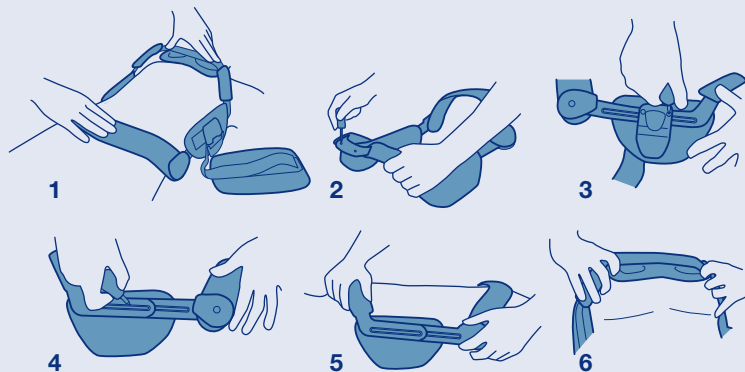



MODELLAZIONE

Se necessario è possibile adattare il tutore alla conformazione anatomica del paziente modellando: banda pelvica (A), gli ascellari (B), le aste laterali (C) all'altezza del bacino (per una modellazione più precisa utilizzare dei mordiglioni) e la pelota sternale (D).

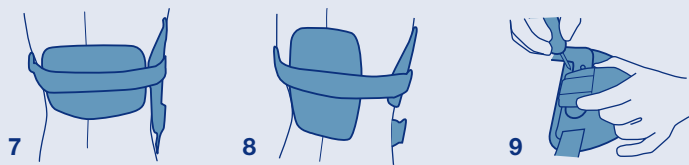

REGOLAZIONE DELLA PELOTA STERNALE


Per una maggiore comodità dei soggetti femminili è possibile montare la pelota girata di 180°. Allentare la vite centrale, togliere il cappuccio a forma quadrangolare (fig. 10), ruotare di 180° la pelota, reinserire il cappuccio la vite e stringere a fondo.

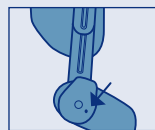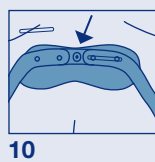

11

BLOCCO DELLA BANDA PELVICA (fig. 11)

Grazie alla conformazione dello snodo è possibile, utilizzando la vite in dotazione, bloccare il movimento basculante nel punto di massima estensione (30°).

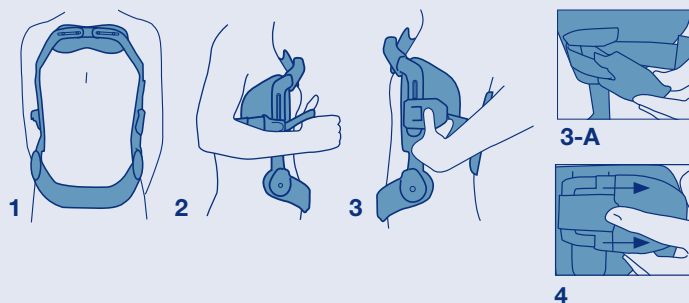

Per bloccare la chiusura **B. FAST** premere la maniglia (fig. 3-A).
Per aprire la chiusura **B. FAST** muovere la maniglia grigia nella direzione indicata (fig. 4).