

- Si consiglia di non usare il dispositivo a diretto contatto con la pelle.
- Utilizzare su pelle sana
- Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato

AVVERTENZE D'USO

Al momento, nessuna nota.
La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

CONTROINDICAZIONI

- Fal (femoral acetabular impingement) pre-post operatorio
- esiti lussazioni d'anca
- coxartrosi non operabile
- esiti riprotesiizzazioni anca

INDICAZIONI



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 3 - 04/20



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
[facebook.com/fgpsrl](https://www.facebook.com/fgpsrl)




Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

IMA-109

Tutore funzionale per anca soft

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il supporto funzionale con le cerniere laterali chiuse.
2. Aprire la chiusura frontale velcrata e quella della coscia.
3. Chiudere rispettivamente la chiusura frontale velcrata (fig. 1) e la fascia della presa coscia (fig. 2).
4. Per eventuali medicazioni non è necessario togliere il tutore basta semplicemente aprire le cerniere laterali, eseguire l'applicazione e poi chiudere (fig. 3).

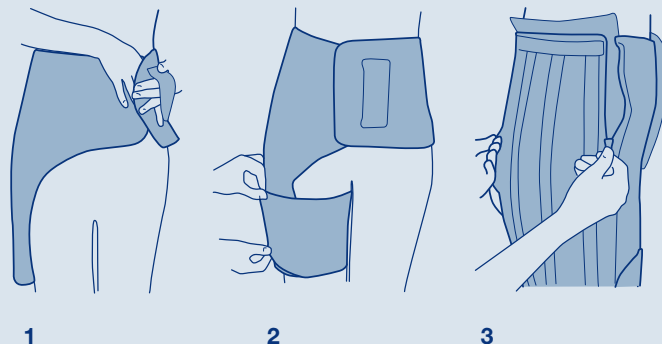

STRUTTURA

- soft in lycra e materiale traspirante ed anallergico
- dotato di rinforzo laterale con stecche a spirale ispezionabile mediante cerniere di apertura

SNODO

- set di stecche a spirale

CHIUSURA

- del bacino e della coscia a strappo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita
S	60–72 cm
M	73–85 cm
L	86–98 cm
XL	99–110 cm



ALTEZZA STECCHE

44 cm

Codice d'ordine:

IMA-109

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in tamburo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



Conservare in ambiente secco



Conservare lontano da fonti di calore

NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.