

- Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato
- Utilizzare su pelle sana
- con la pelle. Indossare una maglia o una canottiera
- Si consiglia di non usare il dispositivo a diretto contatto

AVVERTENZE D'USO



Al momento, nessuna nota. La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

CONTROINDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- postoperatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

INDICAZIONI



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 7 - 07/20

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
 facebook.com/fgpsrl



FGP Orthopedic & Rehabilitation Equipment



FGP Orthopedic & Rehabilitation Equipment




IN-CROSS

Corsetto elastico

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il corsetto.
2. Chiudere la chiusura frontale, i tiranti in modo che si avverta una sensazione di compressione, ma non di costrizione e disagio.

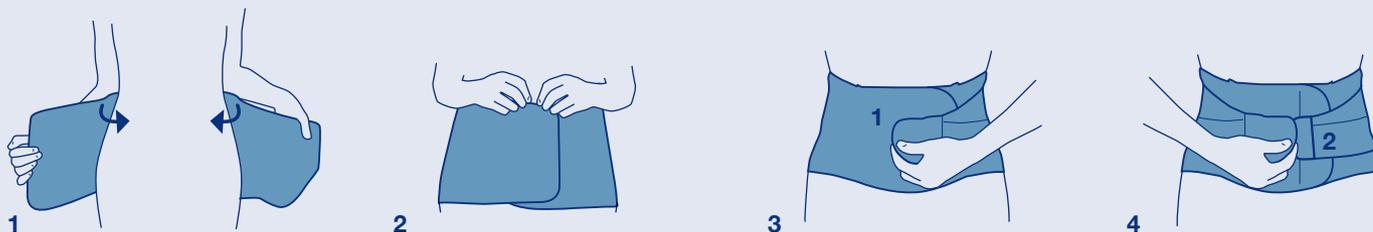

STRUTTURA

- tessuto Sensitive® Fabric che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

TIRANTI

- tre fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, morbida

NOTE

- dotato di fermatiranti a strappo per facilitarne il posizionamento

MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	70–80 cm
S	80–90 cm
M	90–100 cm
L	100–110 cm
XL	110–120 cm
XXL	120–130 cm



Altezza posteriore

28 cm

Codice d'ordine

INC-100 nero
INC-101 écru

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.