

Si consiglia di non utilizzare il dispositivo a diretto contatto con la pelle.

Al momento, nessuna nota. La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

CONTROINDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di citoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocurralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

INDICAZIONI



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 4 - 01/20

FGP srl

Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
[facebook.com/fgpsrl](https://www.facebook.com/fgpsrl)



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment


IN-CROSS 33

Corsetto elastico

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire i tiranti elastici e la chiusura frontale. Indossare il corsetto (fig. 1).
2. Chiudere la chiusura frontale (fig. 2).
3. Chiudere i tiranti elastici inferiori (fig. 3).

4. Chiudere i tiranti superiori (figg. 4 e 5), si avverterà una sensazione di compressione, ma non di costrizione e disagio.
5. Assicurarsi che il corsetto sia posizionato in modo centrato.
6. Per togliere il corsetto aprire i tiranti e se necessario utilizzare l'apposito passante ad asola (fig. 6).

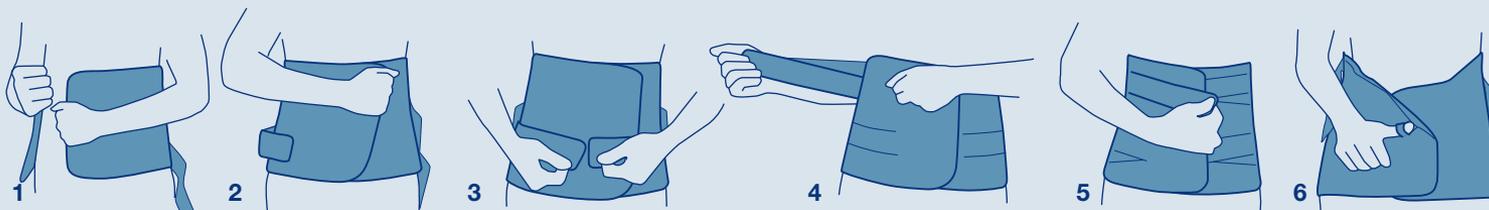

STRUTTURA

- tessuto Sensitive® Fabric che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

TIRANTI

- quattro fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, morbida

NOTE

- dotato di fermatiranti a strappo per facilitare il posizionamento

MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	70–80 cm
S	80–90 cm
M	90–100 cm
L	100–110 cm
XL	110–120 cm
XXL	120–130 cm



Altezza
33 cm

Codice d'ordine

INC-200 nero
INC-201 écru

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it - L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.