

⚠ **Si consiglia di non utilizzare il dispositivo a diretto contatto con la pelle.**

Al momento nessuna nota.
La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

CONTROINDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di MEYERDING)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocurralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

INDICAZIONI



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 4 - 02/20

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
 facebook.com/fgpsrl



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment




Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

LOMBOFIXÒ® 4.0
LOMBOFIXÒ® 33 - 4.0

Corsetto semirigido stoffa e stecche

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il corsetto (fig. 1) e fissare la chiusura frontale (fig. 2).
2. Far aderire i tiranti elastici superiori e inferiori alla chiusura frontale (figg. 3 e 4).
3. Per togliere il corsetto aprire i tiranti e utilizzare l'apposito passante (fig. 5).

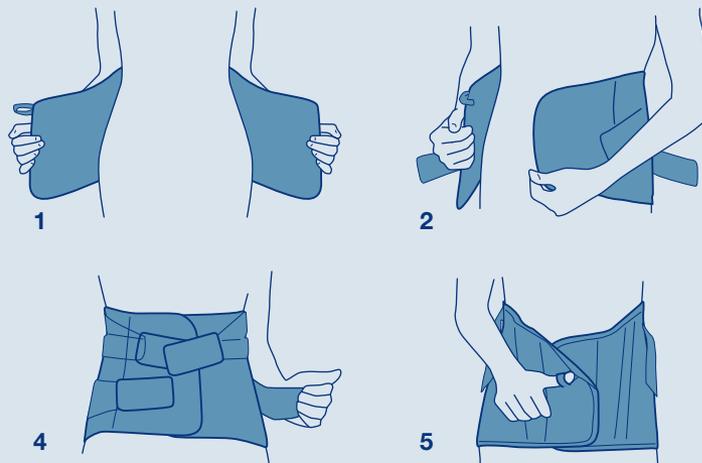

STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarriciamento

NOTE

- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo
- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento

MISURE

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo	Altezza posteriore
XS	76-86 cm	71-81 cm	LFU-600 36 cm; LFD-610 38 cm
S	86-96 cm	81-91 cm	LFU-500 33 cm; LFD-510 33 cm
M	96-106 cm	91-101 cm	
L	106-116 cm	101-111 cm	Codice d'ordine
XL	116-126 cm	111-121 cm	LFU-600 uomo; LFD-610 donna;
XXL	126-136 cm	121-131 cm	LFU-500 uomo; LFD-510 donna



MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.