

---

# MEZZA SOLETTA METAPLANTARE IN SILICONE CON SCARICO CALCANEARE

---

PRT-S04

## INDICAZIONI

- ▷ lieve tallonite
- ▷ fascite plantare lieve
- ▷ lieve dolore plantare

## MISURE

**Taglie**    **Calzata scarpa**

S            35-37

M            38-40

L            41-44



# MEZZA SOLETTA METAPLANTARE IN SILICONE CON SCARICO CALCANEAIRE

## TIPOLOGIA

▷ mezza soletta

## STRUTTURA

- ▷ Silicone con bordi stabilizzanti
- ▷ Scarico ad oliva per zona calcaneare


## ISTRUZIONI PER L'USO

1. Collocare le solette nelle scarpe.  
Se necessario, rimuovere le solette eventualmente già presenti per ottenere la giusta aderenza.
2. Accertarsi di inserire una sola soletta in ciascuna scarpa, eccezion fatta per correzioni di arti inferiori di diversa lunghezza.

Le solette in silicone possono essere utilizzate con scarpe normali, sportive, per il tempo libero o anche scarpe da lavoro.



Il dispositivo non va indossato a diretto contatto con la pelle. Si consiglia di indossare una calza.

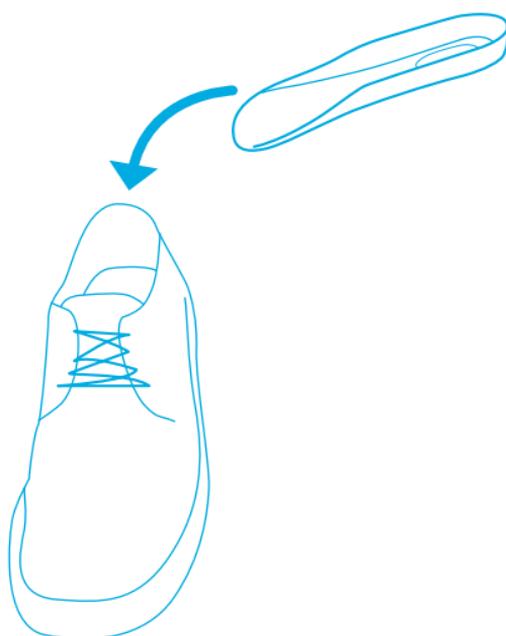

## MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con detergente neutro.

Lasciare asciugare.

Non lasciare ad asciugare sui caloriferi.

## CONSERVAZIONE



Dispositivo ad uso esclusivamente personale.  
Utilizzare su pelle sana  
Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato

In caso di reclami o mal funzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045/8600867; oppure inviare un fax al numero 045/8600835; o inviare una e-mail: [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)

## FGP srl

Via Alessandro Volta 3 I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867 - F +39 0458600835  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it) - [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)



AZIENDA CERTIFICATA  
UNI CEI EN ISO 13485:2016