



INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- postoperatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

CONTROINDICAZIONI

Al momento nessuna nota.
La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su pelle sana
- Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato
- Si consiglia di non usare il dispositivo a diretto contatto con la pelle.
- Indossare una maglia o una canottiera



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 8 - 07/20



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
[facebook.com/fgpsrl](https://www.facebook.com/fgpsrl)



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

PRO ACTION


Corsetto semirigido

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire i 2 tiranti e la chiusura frontale (fig. 1).
2. Indossare il corsetto e bloccarlo mediante la chiusura frontale (figg. 2 e 3).
3. Far aderire alla chiusura frontale i due tiranti fino ad avvertire una sensazione di compressione, ma non di costrizione e disagio (figg. 4-5-6).

NOTA:

la conformità del corsetto garantisce un'effettiva restrizione dei movimenti lombari. La pressione esercitata dal corsetto assicura un'ottima stabilizzazione della zona lombare.

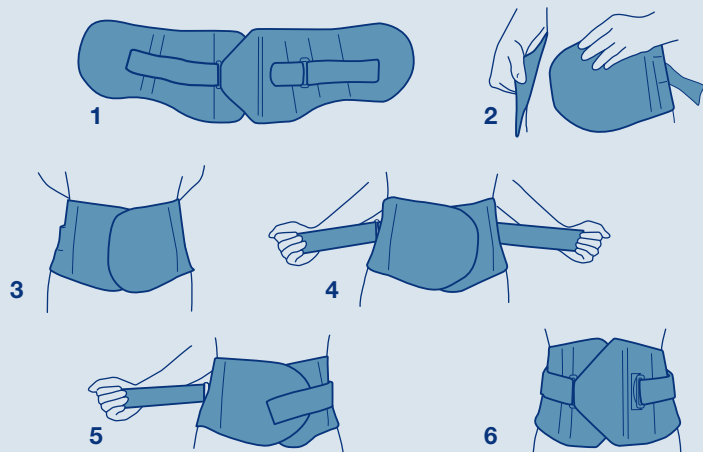

STRUTTURA

- tessuto semirigido con particolare trama areata altamente traspirante

TIRANTI

- due fasce anelastiche che dalla steccatura posteriore si incrociano creando un effetto a carrucola e si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in polietilene flessibile non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con pelota addominale in polietilene rigida removibile

NOTE

- particolarmente adatto nella prevenzione e nelle attività quotidiane

MISURE

Taglie Ø Bacino

S	68–85 cm
M	80–100 cm
L	95–120 cm
XL	115–135 cm



Altezza posteriore
20 cm

Codice d'ordine
PRT-T1

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



Conservare in
ambiente secco



Conservare lontano
da fonti di calore

NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.