



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 7 - 01/21

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
facebook.com/fgpsrl

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni e quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malintenzionamento rivolgersi alla ditta FGP Srl indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare una e-mail a fgp@fgpsrl.it. - L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.

NOTA

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.

CONSERVAZIONE



Conservare in ambiente secco da fonti di calore

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Fisciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

MANUTENZIONE

Nessuna nota. La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

CONSIGLI D'USO


Non stringere in modo eccessivo per non generare pressione locale o la compressione di nervi e vasi sanguigni.

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare sotto la supervisione dei genitori o adulti
- Utilizzare su cute integra
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche
- Non utilizzare in caso di usura rottura o non integrità del materiale

CONTROINDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- esiti fratture legno verde
- esiti distacchi epifisari
- post operatorio di fratture di radio e ulna distali (nel caso di DTX-04k)

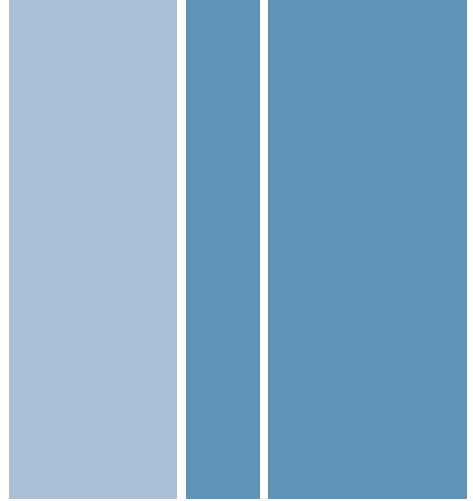

DTX-03K - DTX-04K

Polsiera steccata pediatrica lunga e non

NOTE

DTX-03 (nel caso di DTX-03k) o DTX-06 (nel caso di DTX-04k) per circonferenza polso superiore a taglia 4° vedere prodotto codice


- palmare in alluminio modellabile
- rinforzi laterali in polietilene
- STRUTTURA
- morbido tessuto in vellutino con monospugna all'interno
- completamente apribile
- CHIUSURA
- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando
- il materiale in eccesso
- inferiore fascia sul polso per una maggiore stabilità
- dell'articolazione

STECATURA



ISTRUZIONI PER L'USO

1. Sganciare tutti i nastri a strappo e inserire la mano nel tutore facendo passare il pollice attraverso l'apertura.
2. Le chiusure dei nastri a strappo si troveranno nella parte superiore del polso.
3. Il palmo deve aderire perfettamente alla stecca in alluminio precedentemente modellata.
4. Chiudere i nastri a strappo rispettando la sequenza indicata.
5. Chiudere infine il nastro 5 per ottenere così una migliore aderenza del tutore.
6. Per rimuovere il supporto aprire tutti i nastri a strappo.

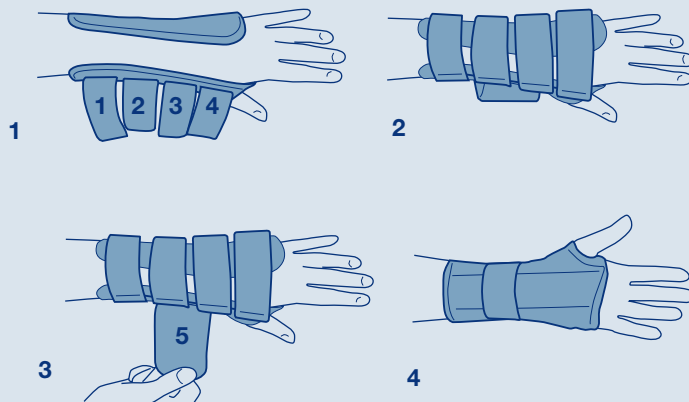

PER IL TECNICO ORTOPEDICO

Estrarre la stecca modellabile, adattarla al paziente e quindi reinserirla.

Se necessario, accorciare opportunamente la lunghezza dei nastri.

MANUTENZIONE

Togliere la stecca palmare e chiudere i nastri a strappo prima del lavaggio.

DTX-03K

POLSIERA STECCATA PEDIATRICA

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso	h
1°	10-11 cm	13 cm
2°	11-13 cm	14 cm
3°	13,5-14,5 cm	15 cm
4°	oltre 15 cm	16 cm



Codice d'ordine: DTX-03 K

DTX-04K

POLSIERA STECCATA PEDIATRICA LUNGA

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso	h
1°	10-11 cm	16 cm
2°	11-13 cm	18 cm
3°	13,5-14,5 cm	20 cm
4°	oltre 15 cm	22 cm



Codice d'ordine: DTX-04 K