



PROGRAMMA RIZOARTROSI **NIGHT&DAY**

SCAPHOMED® + FINGER CAP



Il trattamento che vale doppio.




FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

GARANTIAMO
LA LIBERTÀ
DI MOVIMENTO.

DA PIÙ DI 10 ANNI.



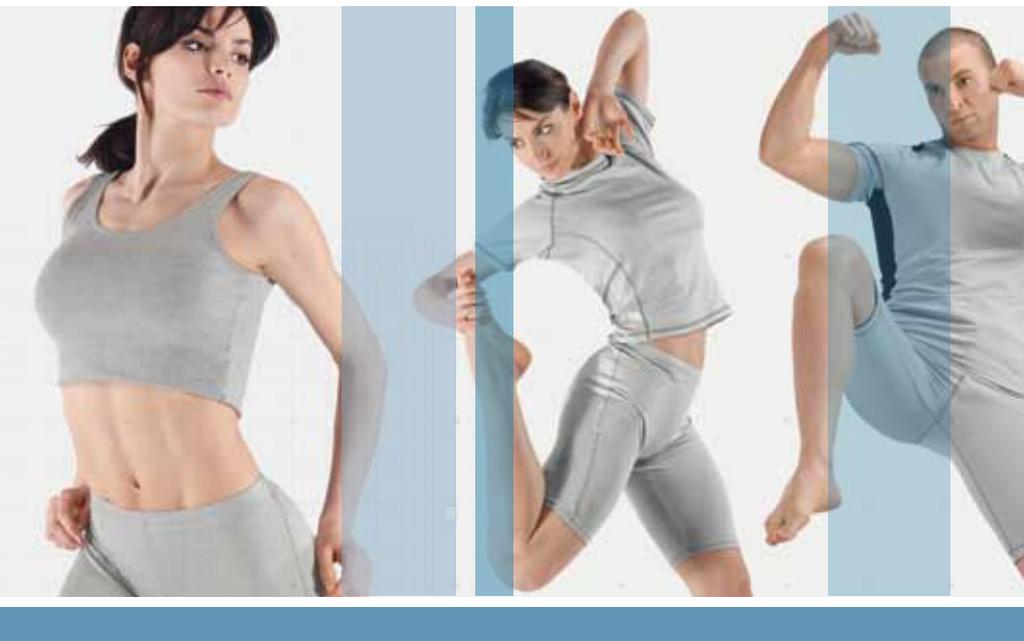

FGP è un'azienda italiana leader nella produzione di supporti per l'ortopedia e la riabilitazione. Nata nel 1989, conta ad oggi settanta dipendenti e un posto primario nel panorama di settore. Ginocchiere, cavigliere, e tutti gli altri ausili realizzati da FGP sono la sintesi di un'expertise pluriennale fondata sul

continuo confronto specialistico con la classe medica così come sul costante ascolto dei bisogni del pubblico.

FGP ha un obiettivo preciso: garantire a tutti e costantemente la massima libertà di movimento. Ciò è possibile grazie a una visione imprenditoriale che da sempre dedica grande at-

tenzione e cospicue risorse alle aree che fanno la differenza: ricerca, qualità, risorse umane.

Per tutte queste ragioni, oggi FGP può offrire una delle migliori esperienze ortopediche sul mercato.

PROGRAMMA RIZOARTROSI **NIGHT&DAY.**

IL TRATTAMENTO
CHE VALE DOPPIO.

Da FGP nasce **Night&Day**, il primo programma completo per le rizoartrosi e le lesioni di natura traumatica del pollice che agisce durante tutto l'arco della giornata, anche di notte.

Il trattamento, articolato in due fasi, garantisce un'efficace terapia specifica per ridurre il dolore, offrendo sempre il massimo comfort.



Scaphomed®



Finger Cap

INDICAZIONI

Rizoartrosi

Tendiniti del pollice

Distorsioni metacarpo-falangee

Postumi di fratture

Tendinopatia di De Quervain

Lesione di Stener

Postumi di frattura di Bennet

Post operatorio chirurgia del pollice



FASE DAY SCAPHOMED®

Prevede l'uso di **Scaphomed®** nelle ore diurne, per garantire il normale svolgimento delle attività quotidiane **proteggendo e mantenendo in posizione disciplinata lo scafoide grazie all'apposito tutore rigido.**








FASE NIGHT

FINGER CAP

Prevede l'uso di **Finger Cap** durante la notte per favorire il processo anti-infiammatorio a riposo. Il tutore ha una **funzione contenitiva e di controllo**, grazie al tessuto elastico perfettamente adattabile alla conformazione della mano.



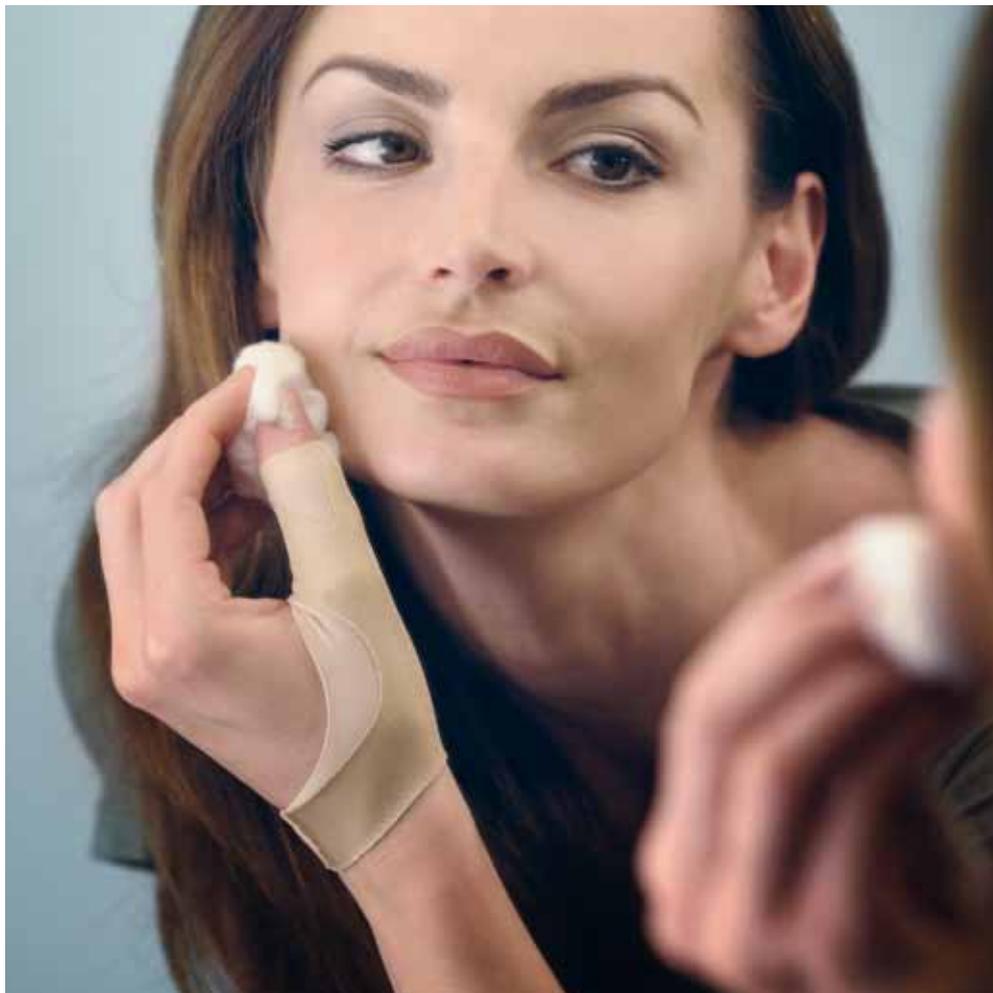



SCAPHOMED®



Scaphomed è il rivoluzionario tutore per l'immobilizzazione dell'articolazione trapezio-metacarpale. Particolarmente indicato per soggetti affetti da rizoartrosi, blocca la zona interessata senza inibire i gesti di tutti i giorni consentendo, pertanto, la mobilità essenziale. Il nuovo tutore ha una vestibilità ottimale, con delle scanalature in corrispondenza del pollice che possono essere ritagliate in caso di gonfiore. Il materiale è più rigido in corrispondenza dello scafoide per mantenere l'articolazione in posizione neutra e agevolare così il processo anti-infiammatorio. I bordi arrotondati impediscono irritazioni della cute, ulteriormente protetta grazie a una cuffia interna in tessuto elastico senza cucitura.



MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm



FINGER CAP



La speciale conformazione di Finger Cap garantisce una perfetta vestibilità, grazie al tessuto elastico che rende il tutore facilmente adattabile alla conformazione anatomica. Il tutore si indossa facilmente calzandolo sul pollice e regolando la chiusura all'altezza del polso mediante lo strap a velcro.

Può essere posizionato in due differenti direzioni che assicurano, in entrambi i casi, la limitazione del movimento e la corretta posizione abdotta del pollice.

Il tutore è in materiale ultrasottile e resistente, con rivestimento interno antiscivolo.



MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	13–17 cm
M	17–19 cm
L	19–23 cm
XL	23–28 cm



SCAPHOMED® ISTRUZIONI PER

1. Indossare la maglina elastica facendo passare il pollice attraverso l'apposito foro (figg. 1 e 2).
2. Aprire la fascia a velcro del tutore e infilarlo sovrapponendolo alla maglina già indossata (fig. 3).
3. Chiudere la fascia a velcro seguendo la circonferenza del polso (fig. 4).
4. Girare la maglina sul guscio (fig. 5).

MANUTENZIONE


SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



L'USO

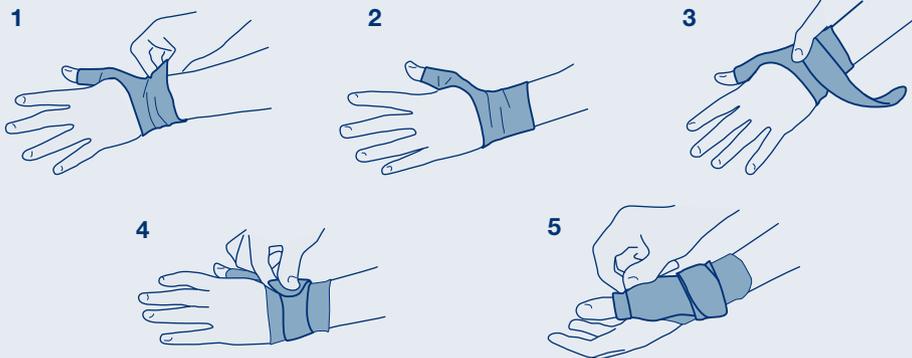

NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico.

In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.



FINGER CAP ISTRUZIONI PER L'

1. Indossare il tutore come se fosse un guanto inserendo il pollice nell'apposita sede (fig. 1).
2. Chiudere il tutore all'altezza del polso mediante l'apposito strap a velcro (fig. 2).
3. Ruotare il cinturino sul polso verso destra o verso sinistra, per il raggiungimento della posizione ottimale, fino ad avvertire sollievo dal dolore (fig. 3).

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



USO


1



2



3

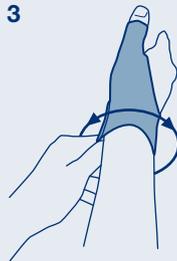

NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico.

In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.



Secondo MDD93/42

Azienda certificata

UNI EN ISO 9001:2008

UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev. 4 - 10/15



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl

Via Alessandro Volta 3

I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867

F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

 facebook.com/fgpsrl