

- Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato  
- Utilizzare su pelle sana



Si consiglia di rimuovere la stecca palmare e chiudere le chiusure a strappo prima di lavare la polsiera.

#### MANUTENZIONE

Al momento nessuna nota.  
La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

#### CONTROINDICAZIONI

- artralgie
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- esiti fratture del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- traumi distorsivi moderati e severi del polso

#### INDICAZIONI



AZIENDA CERTIFICATA  
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 4 - 04/20



FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it) - [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)  
[facebook.com/fgpsrl](https://www.facebook.com/fgpsrl)




Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

**D.T3 02**

**Polsiera steccata**

# ISTRUZIONI PER L'USO

1. Sganciare tutti i cinturini e inserire la mano nel tutore facendo passare il pollice attraverso l'apertura. Le chiusure dei cinturini si troveranno nella parte superiore del polso.
2. Il palmo deve aderire perfettamente alla stecca in alluminio precedentemente modellata.
3. Allacciare la chiusura a strappo dei cinturini rispettando la sequenza indicata.
4. Chiudere infine il nastro 5 per ottenere così una migliore aderenza del tutore.
5. Per rimuovere il supporto aprire tutti i cinturini.

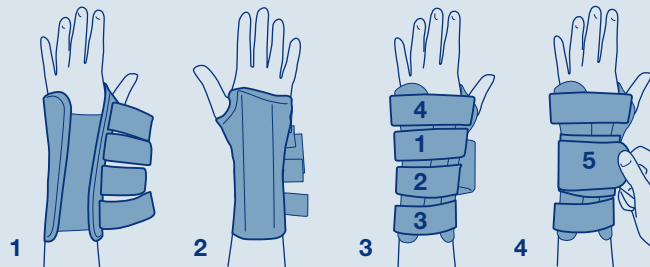

## PER IL TECNICO ORTOPEDICO

Estrarre la stecca modellabile, adattarla al paziente e quindi reinserirla. Se necessario, accorciare opportunamente la lunghezza dei nastri.

## STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile

## STRUTTURA

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore

## CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

## NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

## MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 13 cm
S	13-16 cm
M	16-20 cm
L	20-25 cm
XL	oltre 25 cm



**Lunghezza**  
19 cm

**Codice d'ordine:**  
DT3-02

## MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

## CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



## NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.