

**AVVERTENZE D'USO**

- Utilizzare su pelle sana
- Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato

Al momento, nessuna nota. La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

**CONTROINDICAZIONI**

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

**INDICAZIONI**



AZIENDA CERTIFICATA  
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 5 - 04/20




Orthopedic & Rehabilitation Equipment

**FGP srl**  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it  
facebook.com/fgpsrl



Orthopedic & Rehabilitation Equipment

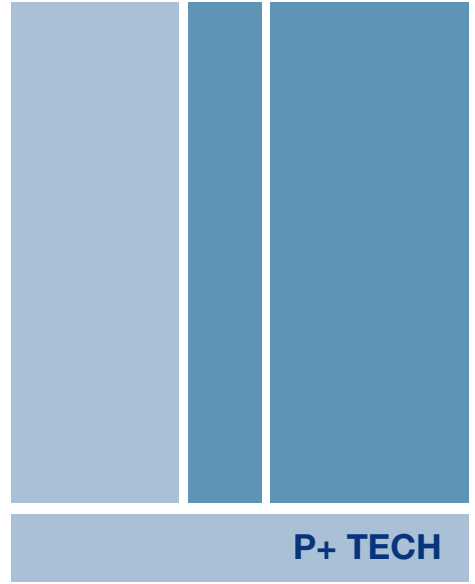

**P+ TECH**

Maglia posturale real seamless

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malintenzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. Indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.

**CONSERVAZIONE**

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: lavare delicatamente con una spugna morbida. Fricacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

**MANUTENZIONE**

Il nostro ingegno parla italiano, e comunica a tutti la lingua universale del benessere. E a tutti dedichiamo la nostra tecnologia, la nostra ricerca, e le soluzioni più innovative nel campo della riabilitazione nate dal dialogo costante con i più autorevoli professionisti del settore ortopedico e riabilitativo. Perché per noi di FGP, star bene è un diritto di tutti, e migliorare la vita di tutti è un impegno. Da questo impegno nasce POSTURE PLUS SYSTEM: una soluzione di maglie e pantaloni posturali che, grazie alla sinergia tra fasce di trazione anelastica e tessuti elastici confortevoli e performanti, stimola impulsi proprioceettivi per ridurre alla corretta postura. POSTURE PLUS SYSTEM è una proposta di abbinamento frutto dell'innovazione, esperienza e tecnologia FGP, completamente Made in Italy perché confezionate qui, nella nostra struttura e nei nostri impianti, per un benessere dedicato a tutti.

**POSTURE PLUS SYSTEM**

# POSTURE PLUS SYSTEM

## STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia del "capo integrale" ovvero una assenza totale di cuciture per un comfort e vestibilità ottimali; il filato usato "Nilit Breeze" garantisce la sensazione di freschezza sulla pelle
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- zona pettorale e sottoascellare a rete

## CHIUSURA

- senza zip

## MISURE UNISEX

Tg. Ø Seno/Torace

XS	80-88 cm
S	88-96 cm
M	96-104 cm
L	104-112 cm
XL	112-122 cm



## Codici d'ordine:

PPS-TECH B bianca

PPS-TECH N nera

## RIALLINEAMENTO PORZIONE TRONCO-LOMBARE



## ISTRUZIONI PER L'USO

1. Durante l'indosso e nel togliere la T-shirt accompagnare sempre il capo come rappresentato nella seguente sequenza di immagini.
2. Inserire le mani nelle maniche (fig.1), accompagnarle fino alla zona delle spalle (fig. 2, 3, 4, 5, 6) e successivamente infilare la testa, infine sistemare lungo il busto.
3. Per sfilare la maglia procedere come nelle figure 8, 9, 10, 11, accompagnando sempre il capo.

 **Prima di indossare il capo togliere anelli, bracciali e qualsiasi cosa possa danneggiare il tessuto.**

