



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 10 - 05/21



FGP srl

Via Alessandro Volta 3

I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867

F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

PHYLO® 60
PHYLO® 61

Ginocchiera traspirante aperta e non
con stecche a spirale



PHYLO® 61



PHYLO® 60

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
 - Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
 - Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
 - La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
 - La modifica/alterazione del dispositivo medico toglie ogni responsabilità al fabbricante.
 - Fer evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
 - Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
 - Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. creme in caso di applicazioni aspettate il tempo di completo assorbimento).
- non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

CONTRINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione ginocchio; esiti stabilizzati di traumi del ginocchio; gonartrosi lieve.

INDICAZIONI PHYLO® 61: lieve instabilità post traumatica; esito distorsione e/o distorsioni del ginocchio; lieve instabilità post traumatica.


INDICAZIONI PHYLO® 60: moderata o grave condropatia femoro-rotulee; lievi tendinopatie del rotuleo; lieve artrosi femoro-rotulee; esiti lussazioni rotulee; nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante

ISTRUZIONI PER L'USO


PHYLO® 60

1. Aprire i nastri a strappo e fate scorrere l'ortesi lungo la gamba (fig. 1).
2. Posizionate il tutore in modo tale che il foro rotuleo sia posizionato esattamente sulla rotula.
3. Fissate infine la chiusura a strappo inferiore A e poi quella superiore B (figg. 2 e 3).
4. Sfilare la ginocchiera come da fig. 4.

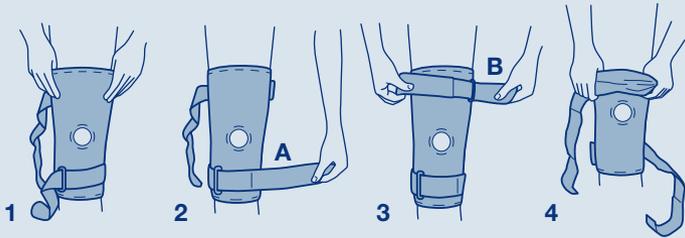

PHYLO® 61

1. Aprire i nastri a strappo e la chiusura frontale.
2. Chiudere la parte superiore e inferiore della chiusura frontale (figg. 1 e 2).
3. Fissate infine la chiusura a strappo inferiore A e poi quella superiore B (figg. 3 e 4).

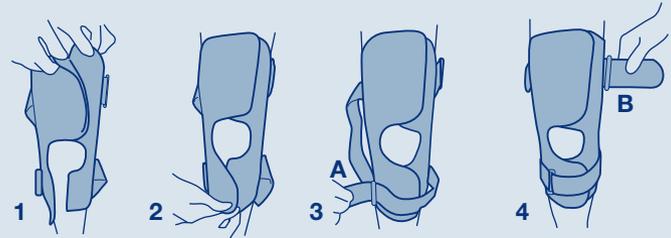

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo (**Phylo® 61** completamente apribile)

SNODO/ASTE

- doppie stecche a spirale laterale e mediale

STABILIZZATORE ROTULEO

- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna orientabile a 360° con sistema a strappo (nessuno per **Phylo® 61**).

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	31–37 cm
S	37–45 cm
M	45–51 cm
L	51–57 cm
XL	57–65 cm
XXL	65–74 cm



ALTEZZA

Phylo 60: 34 cm
Phylo 61: 34 cm

Codice d'ordine:

PHY-60
PHY-61

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. **Smaltimento: non disperdere nell'ambiente. Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**



Conservare in ambiente secco

Conservare lontano da fonti di calore

NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni e quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta FGP Srl indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare una e-mail a fgp@fgpsrl.it. - L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.