



AVVERTENZE D'USO
 - Utilizzare su pelle sana
 - Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato

CONTRINDICAZIONI

Al momento, nessuna nota. La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.



CE

AZIENDA CERTIFICATA
 UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 8 - 08/20

FGP srl
 Via Alessandro Volta 3
 I-37062 Dossobuono VR
 T +39 0458600867
 F +39 0458600835
 www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
 facebook.com/fgpsrl



**P+ FORCE - P+ EFFECT - P+ PERFECT ZIP
 P+ YOUNG UP - P+ YOUNG EASY UP**

Maglia posturale

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: lavare delicatamente con una spugna morbida. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE
 Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.

NOTA
 Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malintenzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. Indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.

POSTURE PLUS SYSTEM

Il nostro ingegno parla italiano, e comunica a tutti la lingua universale del benessere. E a tutti dedichiamo la nostra tecnologia, la nostra ricerca, e le soluzioni più innovative nel campo della riabilitazione nate dal dialogo costante con i più autorevoli professionisti del settore ortopedico e riabilitativo. Perché per noi di FGP, star bene è un diritto di tutti, e migliorare la vita di tutti è un impegno.

Da questo impegno nasce POSTURE PLUS SYSTEM: una soluzione di maglie e pantaloni posturali che, grazie alla sinergia tra fasce di trazione anelastiche e tessuti elastici confortevoli e performanti, stimola impulsi proprioceettivi per ridurre alla corretta postura.

POSTURE PLUS SYSTEM è una proposta di abbigliamento frutto dell'innovazione, esperienza e tecnologia FGP, completamente Made in Italy perché concezionate qui, nella nostra struttura e nei nostri impianti, per un benessere dedicato a tutti.

POSTURE PLUS SYSTEM

P+ FORCE

STRUTTURA

- combinazione di tessuto elastico di base in Sensitive® Fabric associato a fasce di tensionamento toraco-dorsali in materiale anelastico
- rete traspirante nella zona sottoascellare
- rifinita con silicone sul bordo inferiore e strisce a livello scapolare

CHIUSURA

con zip

INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- iperlordosi non strutturata
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann e nella correzione di vizi posturali
- coadiuvante nel dolore da dorso curvo strutturato (P+ FORCE)
- esiti fratture clavicolari (P+ FORCE)

CODICE D'ORDINE:

colore nero - PXT-SHIRT W donna; PXT-SHIRT M uomo
colore bianco - PXT-SHIRT B W donna; PXT-SHIRT B M uomo

MISURE

Tg. Donna	Ø Seno	Ø Vita
XS	82-87 cm	64-69 cm
S	88-93 cm	70-75 cm
M	94-99 cm	76-81 cm
L	100-105 cm	82-87 cm
XL	106-111 cm	88-93 cm



Tg. Uomo	Ø Torace	Ø Vita
S	92-97 cm	82-87 cm
M	98-103 cm	88-93 cm
L	104-109 cm	94-99 cm
XL	110-115 cm	100-105 cm
XXL	116-121 cm	106-111 cm



P+ EFFECT / P+ PERFECT ZIP

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento antibatterico e termoregolatore
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA

- senza zip (P+ EFFECT)
- con zip (P+ PERFECT ZIP)

INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

CODICE D'ORDINE:

PPS-EFFECT B bianca; PPS-EFFECT N nera
PPS-PZIP B bianca; PPS-PZIP N nera

MISURE (UNISEX)

Tg.	Ø Seno/Torace
1°	80-95 cm
2°	95-110 cm
3°	110-125 cm



P+ YOUNG UP

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento antibatterico e termoregolatore
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA

- con zip

INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

CODICE D'ORDINE:

PPS-YOUNG UP B bianca; PPS-YOUNG UP N nera;

P+ YOUNG EASY UP

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento antibatterico e termoregolatore
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA

- senza zip

INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

CODICE D'ORDINE:

PPS-YOUNG EASY UP B bianca; PPS-YOUNG EASY UP N nera;

MISURE (UNISEX)

YOUNG UP E YOUNG EASY UP

Tg.	Ø Torace
1°	60-67 cm
2°	67-74 cm
3°	74-80 cm



ISTRUZIONI PER L'USO



Per P+ FORCE prima di indossare il dispositivo rimuovere le pellicole protettive interne, collocate sulle fasce di tecnopolimero anti-scivolo in prossimità delle spalle.

1. Indossare come una semplice maglia.