

GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

PRESSOTERAPIA

 Manuale di utilizzo

PRESSCARE G300M

PRESSCARE G200M



GLOBUS

GLOBUS

CE
0598

EGREGIO CLIENTE

**LA RINGRAZIAMO PER LA SCELTA EFFETTUATA E LE CONFERMIAMO LA
NOSTRA PIU' COMPLETA DISPONIBILITA' PER QUALSIASI AIUTO O
SUGGERIMENTO DI CUI AVESSE BISOGNO**

Le pressoterapia PressCare G 300M e PressCare G 200M sono prodotte dalla:

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.

4th Floor, Building 15, 1008 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen,
518108, China

Tel: (+86) 755.29060097

Fax: (+86) 755.29060036

Web site: <http://www.lifotronic.com>

e distribuite dalla:

DOMINO s.r.l.

via Vittorio Veneto 52
31013 - Codognè - TV - Italy

Tel. (+39) 0438.7933

Fax. (+39) 0438.793363

E-Mail: info@globuscorporation.com

www.globuscorporation.com

SOMMARIO

CARATTERISTICHE TECNICHE.....	4
Dispositivo	4
DOTAZIONE.....	5
DESTINAZIONE D'USO	7
CONNESSIONI.....	7
ETICHETTATURA E SIMBOLI	8
INTERFACCIA E COMANDI.....	10
ALLARMI	11
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI.....	12
Comportamento obbligatorio.....	12
Avvertenze prima dell'uso.....	12
Avvertenze durante l'uso	12
Effetti indesiderati	12
Controindicazioni.....	13
MANUTENZIONE E PULIZIA	13
Dispositivo	13
Smaltimento dell'apparato.....	14
MODO D'USO.....	14
PRINCIPI DI AZIONE.....	16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivo

Classe IIa

Dispositivo con parti applicate di tipo BF

Dimensione: 235x185x190 mm

Peso: 3 Kg

IP: 21

Temperatura di stoccaggio e di trasporto: da -10°C a +40°C

Umidità relativa massima: ≤ 85%

Pressione atmosferica: 750 hPa-1060 hPa

I valori rappresentano i limiti consentiti qualora il prodotto o gli accessori non siano nella loro confezione originaria.

Condizioni di utilizzo

Temperatura: da 5°C a 40°C

Umidità relativa massima: ≤ 75%

Pressione atmosferica: da 750 hPa a 1060 hPa

Caratteristiche delle pressioni

Tempo del trattamento: da 1 a 99 minuti

Range pressione: da 0 a 180mmHg

Alimentazione

Tensione di ingresso: a.c-230V, 50Hz

Consumo di energia: 55VA

Fusibili

F0.5AL250V Ø 5x20

DOTAZIONE

L'apparecchio per la pressoterapia viene fornito completo di connettori e gambali per l'uso; pertanto, una volta aperto l'imballaggio, verificare che la dotazione di base sia completa. Qualora dovesse mancare qualche elemento contattare immediatamente il rivenditore autorizzato a cui ci si è rivolti per l'acquisto.

Modello	Gambali	Bracciali	Fascia addominale	Cavo di alimentazione	Cavi di connessione
PressCare G200M-1	1			1	1
PressCare G200M-2	2			1	2
PressCare G200M-3	2		1	1	3
PressCare G200M-1B		1		1	1
PressCare G300M-1	1			1	1
PressCare G300M-2	2			1	2
PressCare G300M-3	2		1	1	3
PressCare G300M-1B		1		1	1


Tutti i modelli sono dotati di un manuale di utilizzo.

Le informazioni fornite possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini riportate nel manuale o negli imballi sono puramente indicative.


Il dispositivo può essere utilizzato con alcuni accessori opzionali (è possibile vedere le caratteristiche sul sito www.globuscorporation.com). Per l'acquisto di questi accessori rivolgersi al proprio rivenditore.

Accessori


I seguenti accessori possono essere inclusi nella dotazione oppure acquistabili separatamente.

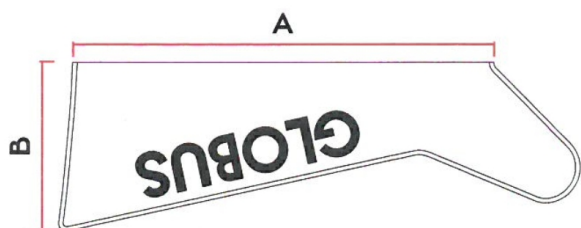

- Gambali taglia S: (A x B) 745 x 310 mm. Consigliati per soggetti fino a 175 cm altezza.
- Gambali taglia M: (A x B) 880 x 352 mm. Consigliati per soggetti fino a 190 cm altezza.
- Gambali taglia L: (A x B) 980 x 380 mm Consigliati per soggetti oltre i 190 cm.

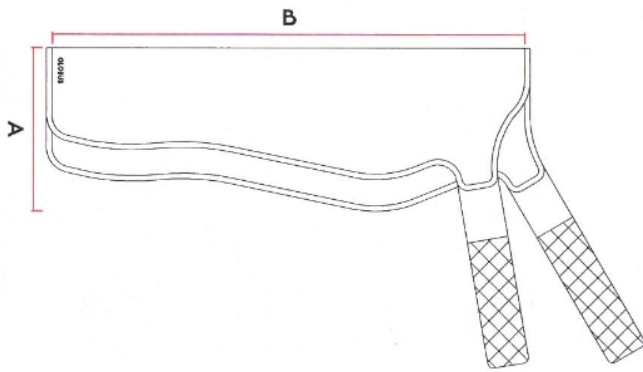

- Bracciale: (A x B) 440 x 1287 mm

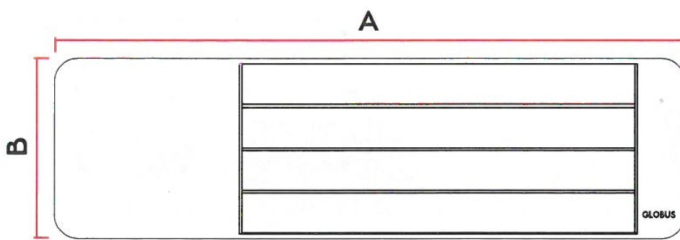

- Fascia addominale: (A x B) 1330 x 380 mm

I gambali e i bracciali sono universali e non prevedono distinzione tra arto destro e sinistro.

Accessori acquistabili solo separatamente


- Estensore gambale: 100 mm
- Estensore bracciale: 100 mm

Cavi di connessione

I cavi di connessione servono a collegare il dispositivo ai manicotti. Esistono due tipi di cavi, quello singolo che collega il manicotto direttamente alla macchina e quello doppio che collega due manicotti alla stessa uscita nella macchina (per trattamenti con la fascia addominale).



Cavo singolo

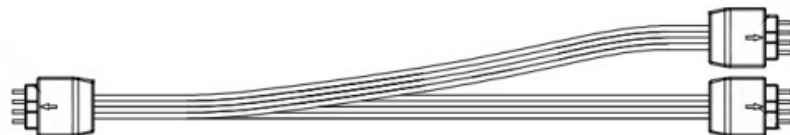

Cavo doppio

DESTINAZIONE D'USO

La vita utile stimata del prodotto è di anni 5. Si consiglia il rientro del prodotto presso il fabbricante e/o centro autorizzato ogni 2 anni per la manutenzione e verifica di sicurezza. Il dispositivo può essere utilizzato in modo continuo quando è collegato alla rete elettrica.

I dispositivi PressCare G200M e G300M sono studiati per essere utilizzati in ambiti operativi quali:

- ambiente domestico;
- ambulatori;
- centri di fisioterapia;
- riabilitazione in genere;
- per uso estetico e sportivo.



CONNESSIONI

Presa di connessione del cavo di alimentazione.

Attenzione: se il cavo di alimentazione presenta segni di usura o danneggiamento provvedere alla sostituzione immediata dello stesso.

Per far funzionare il dispositivo è necessario collegarlo al cavo di alimentazione e quindi alla presa elettrica. Il connettore è posto sul lato posteriore del dispositivo, vicino all'interruttore. Per isolare il dispositivo dalla rete di alimentazione occorre scollegarlo dalla presa di rete.

Come collegare gli accessori

Per utilizzare i manicotti è necessario prima di tutto collegarli al dispositivo tramite gli appositi cavi di collegamento.







Il cavo di collegamento è composto da due estremità con connettore maschio che vanno rispettivamente collegate al dispositivo e al manicotto. I connettori vanno inseriti nella macchina mantenendo il simbolo della freccia verso l'alto. Allo stesso modo quando si collega il cavo ai manicotti bisogna accertarsi che entrambi i connettori abbiano il simbolo del rettangolo dallo stesso lato. Se si collegano i manicotti in modo errato potrebbe verificarsi una sequenza di gonfiamento anomala.







Se si utilizzano tre accessori nello stesso momento, per esempio la fascia addominale insieme alle due gambe, utilizzare il cavo di collegamento doppio per le gambe e la fascia addominale con il cavo singolo.










ETICHETTATURA E SIMBOLI

	<p>Attenzione</p>
	<p>Questo simbolo sul vostro apparecchio serve ad indicare che è in conformità con i requisiti delle direttive sugli apparecchi medici (93/42/CEE 47/2007/CEE). Il numero dell'ente notificato è 0598</p>
	<p>Indica che il dispositivo ha parti applicate di tipo BF</p>
	<p>Indica che il dispositivo è di classe II</p>
	<p>Simbolo RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Simbolo di riciclaggio. Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto indica che quest'ultimo non può essere trattato come rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale, alla società addetta allo smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio dove è stato acquistato il prodotto.</p>
	<p>Indica la temperatura prevista per la conservazione ed il trasporto del prodotto</p>


	Informa l'operatore che prima dell'uso dell'apparato è obbligatorio la lettura del manuale
	Fa riferimento alla pressione dell'ambiente di trasporto e di conservazione del dispositivo e degli accessori
	Fa riferimento all'umidità dell'ambiente di utilizzo e di conservazione del dispositivo e degli accessori
	Fa riferimento al fabbricante
	Fa riferimento alla data di produzione
	Rappresentante autorizzato nell'Unione Europea
	Indica il numero di serie del prodotto
Input power	Indica la tensione di rete elettrica
	Indica che l'imballaggio può essere smaltito come rifiuto riciclabili

Dispositivo


 Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. Unit A, 4th Floor, Building 15, Yijing Estate, No.1008 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518055, P.R.China Tel: (+86) 755.29060097 Fax: (+86) 755.29060036 www.lifotronic.com	IP21			CE 0598
	Product name: Air Compression Therapy System Input Power: a.c. 230V, 50Hz, 55VA GLOBUS Model:	 2017-04		
		Shanghai International Holding Corp. GmbH Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany Importor: DOMINO S.R.L.-Via Vittorio Veneto, 52-31013 Codogne (TV) -ITALY Tel: (+39+) 0438.7933-www.Globuscorporation.com		

INTERFACCIA E COMANDI

G300M

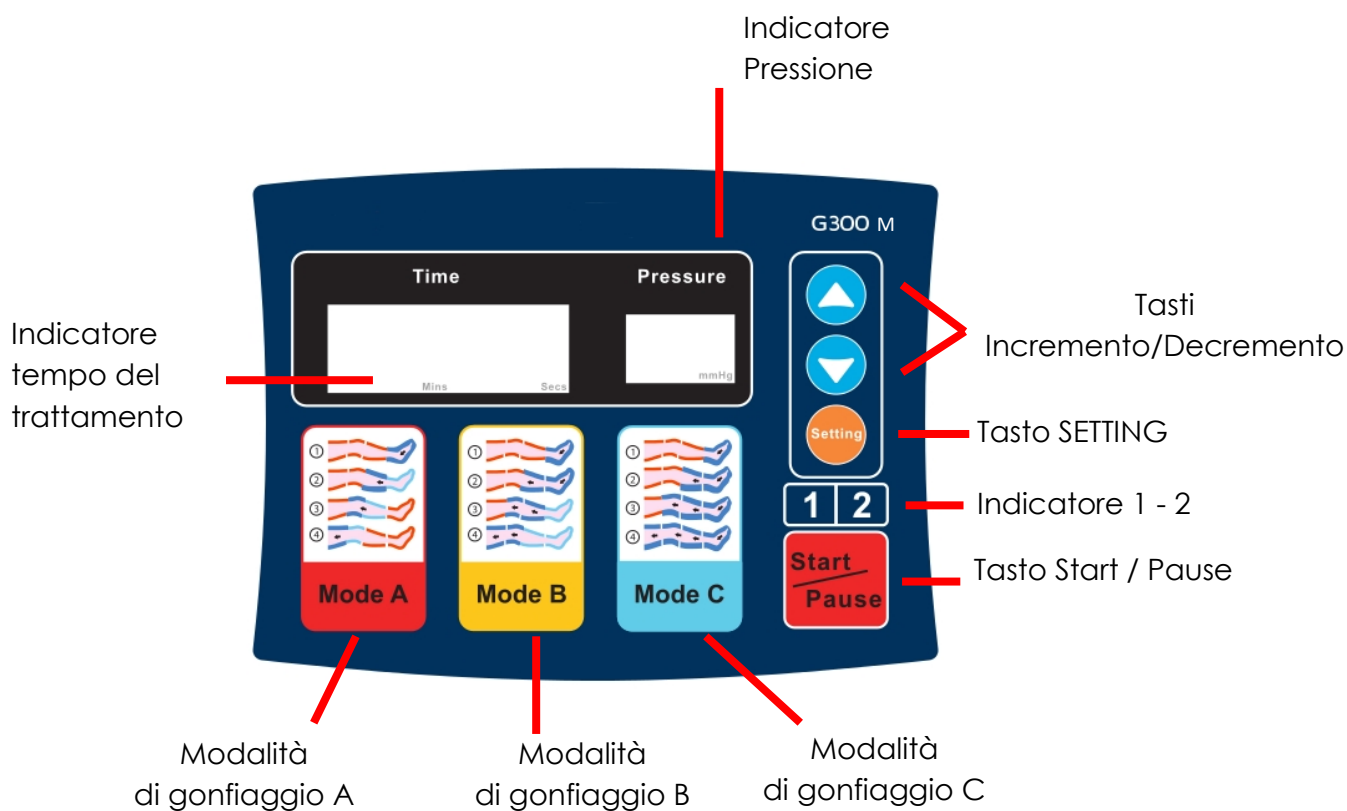

G200M

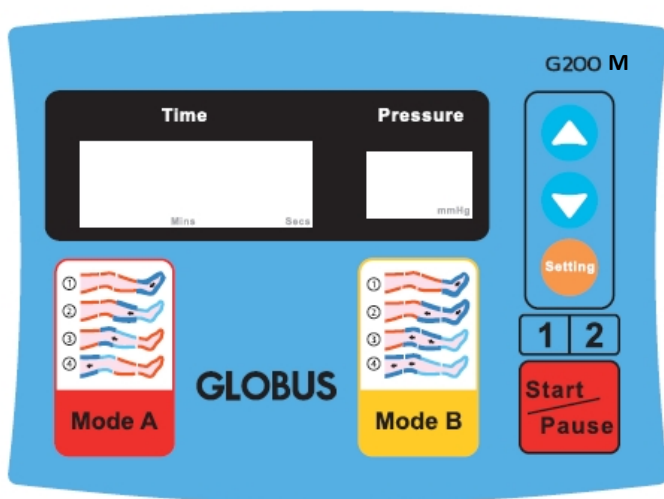

La PressCare G200M prevede due modalità di gonfiaggio: mode A e mode B.

Tasto Start/Pause	Avvia e mette in pausa un programma in corso
Tasto Setting	Permette di selezionare il parametro da modificare (tempo, pressione e numero di uscite attive)
Tasto incremento	Incrementa il valore selezionato (tempo, pressione, modalità 1-2)
Tasto decremento	Decrementa valore selezionato (tempo, pressione, modalità 1-2)
Tasti modalità A-B-C	Permettono di selezionare il programma
Indicatore 1 / 2	Permette di visualizzare quali uscite sono attive
Indicatore tempo del trattamento	Indica il tempo impostabile durante la fase di programmazione e il tempo rimanente durante il trattamento
Indicatore Pressione	Indica in tempo reale l'andamento della pressione durante il trattamento



ALLARMI

Durante l'utilizzo del dispositivo potrebbero verificarsi delle condizioni che attivano i segnali di allarme.

Significato allarme "HPR"

La sigla "HPR" significa che la pressione è troppo elevata.

La sigla comparirà lampeggiando nella sezione del display dedicata alla pressione; la macchina emetterà un segnale acustico e bloccherà le sue funzioni.

Compare quando la pressione media all'interno dei manicotti è superiore ai 200mmHg per almeno 0.5s.

Alla comparsa dell'allarme, premere il tasto "Start/Pause" per fermare il segnale acustico e resettare l'allarme.

Significato allarme "LPR"

La sigla "LPR" significa che la pressione è troppo bassa.

La sigla comparirà nella sezione del display dedicata alla pressione; la macchina emetterà un segnale acustico e bloccherà le sue funzioni.

Compare quando, dopo il gonfiaggio, la pressione all'interno dei manicotti è comunque inferiore a 5mmHg

Alla comparsa dell'allarme, premere il tasto "Start/Pause" per fermare il segnale acustico e resettare l'allarme.

AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI

Comportamento obbligatorio

Per mantenere il livello massimo di sicurezza l'utente deve utilizzare l'apparecchio nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di impiego del manuale d'uso.

Se l'involucro, il cavo o il connettore dell'alimentatore presentano segni di usura o danneggiamento provvedere alla sostituzione immediata dello stesso. L'apparato va collegato alla linea elettrica attraverso il proprio alimentatore, prima di eseguire tale operazione verificare che l'impianto sia conforme alle direttive vigenti nel proprio Paese. Non collocare l'alimentatore in modo che risulti difficile scollegarlo dalla presa di alimentazione.

Si declina ogni responsabilità in merito ad un uso difforme da quanto indicato e prescritto nel presente manuale.

Senza il permesso scritto del produttore sono vietati la riproduzione anche parziale in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico di testi e/o foto contenute in questo manuale.

Avvertenze prima dell'uso

Nel caso in cui sia necessario l'uso del dispositivo vicino o sovrapposto ad altri apparecchi verificare il corretto funzionamento.

- E' buona norma leggere attentamente tutto il manuale di istruzioni prima di utilizzare l'unità; conservare con cura il presente libretto.
- Assicurarsi che l'utilizzatore non presenti alcuna patologia indicata nella sezione "controindicazioni".
- Prima di ogni utilizzo controllate sempre l'integrità dell'apparecchio e degli accessori, condizione indispensabile per l'effettuazione della terapia.
- Non dev'essere utilizzato per fini diversi da quelli indicati in questo manuale.
- Dev'essere utilizzato con gli accessori forniti da Domino s.r.l.
- Dev'essere tenuto fuori della portata dei bambini.

Avvertenze durante l'uso

Durante l'utilizzo del dispositivo vanno seguite alcune avvertenze.

- I cavi e i connettori non devono essere avvolti attorno al collo di persone per evitare qualsiasi rischio di strangolamento o asfissia.
- Non coprire le aperture di ventilazione poste nella parte posteriore del dispositivo.
- Non comprimere i tubi dei connettori durante il trattamento.
- Non versare alcun liquido sopra il dispositivo e i suoi componenti.
- Gli apparecchi di radiocomunicazioni mobili e fissi potrebbero influenzare il funzionamento del dispositivo.
- Il dispositivo non deve essere usato in presenza di liquidi infiammabili.
- Mantenere il dispositivo in un luogo asciutto.

Effetti indesiderati

Non sono stati registrati effetti indesiderati.

In casi particolari, se non associata a delle terapie complementari, possono insorgere casi di indurimento dell'edema e di flogosi cronica.

Come precauzione, si sconsiglia questo tipo di trattamento su bambini, donne in gravidanza.

Controindicazioni

Si sconsiglia l'uso nei seguenti casi:

- Trombosi venosa profonda
- Tromboflebiti
- Embolia polmonare
- Arteriosclerosi degli arti inferiori e problemi di ischemia vascolare
- Dermatiti della zona da trattare, cancrena, traumi ecc.
- Insufficienza cardiaca, edema polmonare, edema nell'area da trattare.
- Deformità importati dell'area da trattare
- Emofilia
- Fragilità dei capillari
- Aritmia
- Ipertensione arteriosa
- Edemi da insufficienza cardiaca, epatica, renale o da farmaci.
- Pazienti che non tollerano impedimenti meccanici
- E' inoltre opportuno ricorrervi con cautela nel caso si soffra di fragilità capillare, in quanto una stimolazione eccessiva potrebbe portare alla rottura di un numero maggiore di capillari.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Dispositivo

- In caso di deterioramento dell'involucro dell'apparecchio, questo va sostituito e non più utilizzato.
- In caso di guasto reale o presunto non manomettere il dispositivo o tentare di ripararlo in proprio.
- Non intervenire sulla macchina, non aprirla. Le riparazioni possono essere effettuate solo da un centro specializzato ed autorizzato.
- Evitare urti violenti che potrebbero danneggiare l'apparecchio e determinare malfunzionamenti anche non immediatamente riscontrabili.
- L'apparecchio va utilizzato in un ambiente asciutto e libero in aria (non avvolto da altri oggetti).
- Pulire l'apparecchio solo con Amuchina o sali d'ammonio di quaternario diluiti in acqua distillata in percentuale pari al 0,2-0,3%. Al termine della pulizia/disinfezione il dispositivo va perfettamente asciugato con l'uso di un panno pulito.
- Pulire i gambali utilizzando solo un panno umido e del sapone neutro. Non utilizzare alcun prodotto chimico o solvente.
- Non immergere le camere in acqua
- Non immergere i tubi di raccordo in acqua.
- Si prevede che il processo di pulizia/disinfezione per le parti ove diversamente specificato avvengo ad ogni fine utilizzo.
- Utilizzare il dispositivo e gli accessori sempre con le mani adeguatamente pulite.
- Si raccomanda di utilizzare il dispositivo in un ambiente pulito, onde evitare la contaminazione del dispositivo stesso e degli accessori con polveri e sporco.


- Si raccomanda di utilizzare il dispositivo in un ambiente ventilato, dove avvengono ricambi periodici dell'aria

Smaltimento dell'apparato

Non gettare l'apparecchio o sue parti nel fuoco, ma smaltire il prodotto nei centri specializzati e comunque nel rispetto delle normative in vigore nel proprio Paese. Si informa l'utilizzatore che può riconsegnare il prodotto a fine vita al distributore all'atto di acquisto di una nuova apparecchiatura.

L'adeguata raccolta differenziata o il rispetto di quanto sopra evidenziato contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

MODO D'USO

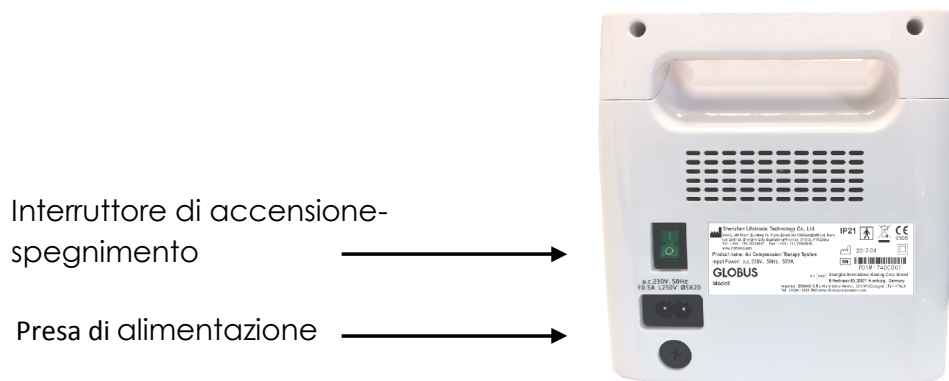

Prima di iniziare il trattamento appoggiate il dispositivo su di una superficie piana. Per il corretto funzionamento del prodotto l'utilizzatore deve procedere come segue:

- indossare l'accessorio/gli accessori che si desidera utilizzare;
- collegare i cavi dei connettori alle rispettive prese (vedi pagina 6);
- accendere il dispositivo utilizzando l'apposito interruttore.

Come indossare gli accessori

- Gambali: infilare la gamba all'interno del gambale. Qualora fosse necessario aprire la zip, indossare il gambale e richiudere la zip.
- Bracciale: indossare il bracciale facendo passare e fissando la fascia di sostegno sotto il braccio opposto.
- Fascia addominale: avvolgere la fascia attorno alla circonferenza addominale e fissarla utilizzando il velcro. Fare attenzione ad indossare la fascia in modo che le camere si gonfino iniziando da quella superiore, per poi proseguire verso quelle più in basso.
- Utilizzo con tre accessori: collegare i due gambali utilizzando il cavo sdoppiato e la fascia vita utilizzando il cavo singolo.

Nel caso sia necessario aumentare la circonferenza dei gambali collegare gli estensori, acquistabili come accessorio opzionale.

Accensione e spegnimento

Per accendere il dispositivo collegare prima il cavo di alimentazione alla macchina e alla rete elettrica, quindi premere l'interruttore posto sul lato destro del dispositivo.
Per spegnere premere nuovamente l'interruttore.


Selezione del programma

Selezionare la modalità desiderata:

Modalità A:

la macchina gonfierà una camera per volta a partire dalla porzione distale. (1 – 2 – 3 – 4).

Le camere si gonfiano singolarmente, quando la camera successiva inizia a gonfiarsi, dopo poco inizia a sgonfiarsi quella precedente e così via per tutte le camere.

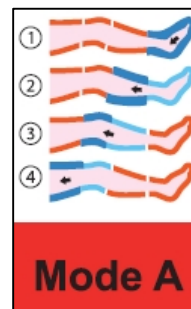

Modalità B:

verranno gonfiate due camere per volta a partire dalla porzione distale (1 – 12 – 23 – 34).


Le camere si gonfieranno due per volta, garantendo un massaggio fisiologico, graduale e progressivo.



Modalità C:

a partire dalla porzione distale verranno gonfiate tutte le camere (1 -12 -123 – 1234).

Il massaggio effettuato con questo programma opera, in maniera ottimale, lo svuotamento dell'arto dai fluidi che ristagnano. Grazie alla spinta omogenea e continua evita zone di stasi o ristagno.

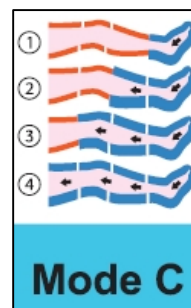

Il ciclo di funzionamento delle pressoterapie Globus PressCare rispetta il movimento fisiologico del sangue e della linfa, quindi effettua una pressione in senso distale-proximale (dal piede verso l'inguine o dalla mano verso la spalla).

Programmazione del trattamento

Durata

Premendo il tasto "Setting" l'indicatore del tempo inizierà a lampeggiare e sarà possibile modificarne il valore utilizzando i tasti di incremento e decremento. La durata del trattamento può essere impostata da 1 a 99 minuti. Consigliamo di iniziare con trattamenti di 5-10 minuti per poi eventualmente incrementare il tempo nelle successive sedute.

Regolazione della pressione

Premendo nuovamente il tasto "Setting" inizierà a lampeggiare l'indicatore della pressione e sarà possibile modificare il valore utilizzando i tasti di incremento e decremento. Suggeriamo di impostare una pressione di applicazione attorno ai 30-40 mmHg o comunque sempre rispettando la prescrizione del medico.

Selezione dei connettori

Premendo una terza volta il tasto "Setting", sarà possibile, utilizzando i tasti di incremento e decremento, scegliere se attivare un solo connettore (1 o 2) o entrambi (1 e 2). I connettori selezionati ed attivi saranno visibili ed illuminati sul display in corrispondenza degli indicatori 1-2.

Avvio del programma

Per avviare il programma basterà premere il tasto "Start/Stop".

Pausa del programma

Per mettere in pausa il trattamento in corso, basterà premere il tasto "Start/Stop".

Durante la pausa sarà possibile variare tutti i parametri sopra elencati.

PRINCIPI DI AZIONE

La pressoterapia rappresenta una metodica fisico-compressiva che, tramite un'onda di pressione, esegue un massaggio drenante i liquidi degli arti, svolgendo effetti benefici sia sul circolo venoso, che su quello linfatico.

La pressione generata applica una forza comprimente e una di trazione sul tessuto interstiziale e sui vasi in esso contenuti.

La forza compressiva riduce il calibro dei vasi venosi e linfatici, aumentando così la velocità del flusso ematico venoso e del flusso linfatico.

La stessa forza aumenta la pressione interstiziale riducendo la filtrazione sul versante arterioso e un aumento del riassorbimento capillare sul versante venoso.

Tutto ciò si traduce nella riduzione del carico linfatico interstiziale.

La forza di trazione sull'interstizio favorisce, nella porzione di arto a valle lontano dalla porzione di gambale/bracciale gonfia, lo stiramento delle fibre elastiche di ancoraggio dei capillari linfatici con conseguente apertura dei pori e aumento del riassorbimento dei liquidi.

Molti studi dimostrano che, se integrata con altri trattamenti, la pressoterapia, massimizza la sua efficacia.

E' assodato che associare un massaggio linfodrenante prima della pressoterapia, permette alla compressione di veicolare i liquidi verso il torrente ematico.

Per ottenere il miglior risultato è altresì necessario associare alle sedute di pressoterapia uno stile di vita salutare.

Indicazioni di utilizzo e applicazioni

La pressoterapia simula un massaggio linfatico manuale e il suo principale obiettivo è quello di agire per migliorare la circolazione venosa, aumentare la microcircolazione e drenare gli accumuli di liquido interstiziale.

La sequenza pressoria favorisce l'entrata del liquido interstiziale nei vasi linfatici e nel sistema circolatorio stimolando il drenaggio e la rimozione di stasi venose.

L'uso della pressoterapia trova indicazione sia in campo medico che estetico.

USO IN CAMPO MEDICALE

In campo medico la pressoterapia è indicata per: linfo-drenaggio, linfoedemi, edemi da immobilità, trattamento post mastectomia, ematomi, vascolarizzazione, drenaggio ecc...

Per protocolli di utilizzo e scelta del programma da effettuare, fare riferimento alle indicazioni del medico.

USO IN MEDICINA ESTETICA

In campo medico-estetico la pressoterapia è indicata per il trattamento di: cellulite, ritenzione idrica, gambe pesanti-gonfie, relax, prevenzione crampi ecc...

Utilizzo

Il ciclo di funzionamento corretto è quello che segue il movimento fisiologico del sangue e della linfa in senso distale-proximale, ovvero dalle estremità verso il centro.

Quindi, quando si indossano i gambali, la pressione gonfierà prima la camera del piede per poi salire verso l'inguine.

I bracciali invece inizieranno a gonfiarsi dalla mano, salendo verso l'ascella.

La fascia addominale inizierà a gonfiarsi dalla camera superiore per poi scendere progressivamente verso quelle più vicine all'inguine.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito al primo utilizzatore per il periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiali o di fabbricazione, di dodici (12) mesi nel caso in cui l'utente utilizzi lo stesso a scopo professionale, purché utilizzato appropriatamente e mantenuto in normali condizioni di efficienza.

La validità della garanzia è limitata nei seguenti casi:

- sei (6) mesi per gli accessori in dotazione soggetti ad usura come, ad esempio, alimentatori, cavi, gambali, bracciali, fasce addominali, connettori.

La presente garanzia è valida ed efficace nel Paese dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui il prodotto sia stato acquistato in un qualsiasi Paese della Comunità Europea, la garanzia è comunque valida in tutti i suoi Paesi.

Per usufruire del servizio di garanzia, l'utente deve rispettare le seguenti clausole di garanzia:

1. I prodotti dovranno essere consegnati per la riparazione a cura e spese del Cliente negli imballaggi originali e con la dotazione originale completa.

2. La garanzia del prodotto sarà subordinata all'esibizione di un documento fiscale (scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura di vendita), che attesta la data di acquisto del prodotto.

3. La riparazione non avrà effetto sulla data originale di scadenza della garanzia e non porterà il rinnovo o l'estensione della stessa.

4. Nel caso in cui, all'atto dell'intervento di riparazione, non si riscontri alcun difetto del prodotto stesso, saranno comunque addebitate le spese relative alla verifica tecnica.

5. La garanzia decade ove il guasto sia stato determinato da: urti, cadute, uso errato od improprio del prodotto, utilizzo di un alimentatore/caricabatterie esterno non originale, eventi accidentali, alterazione del prodotto, sostituzione/distacco dei sigilli di garanzia e/o manomissione del prodotto. La stessa inoltre non copre danni causati durante il trasporto per utilizzo di imballi non idonei (vedi punto 1).

6. La garanzia non risponde della impossibilità di utilizzazione del prodotto, di altri costi incidentali o consequenziali o di altre spese sostenute dall'acquirente.

N.B. Prima di restituire la macchina per le riparazioni, si consiglia di leggere attentamente le istruzioni d'uso contenute nel manuale e di consultare il sito Globus.

In caso si debba inviare il prodotto in assistenza, rivolgersi al proprio rivenditore o al servizio di assistenza Globus. Il produttore si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso tutte le modifiche necessarie a migliorare l'estetica e la qualità del prodotto. Le dimensioni, le caratteristiche e le immagini riportate nel presente manuale non sono vincolanti.

GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

DOMINO S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - Tel. (+39) 0438.7933

globuscorporation.com |   