

GLOBUS


ITALIAN EXCELLENCE

RADIOFREQUENZA



Manuale di utilizzo

RF CLINIC PRO

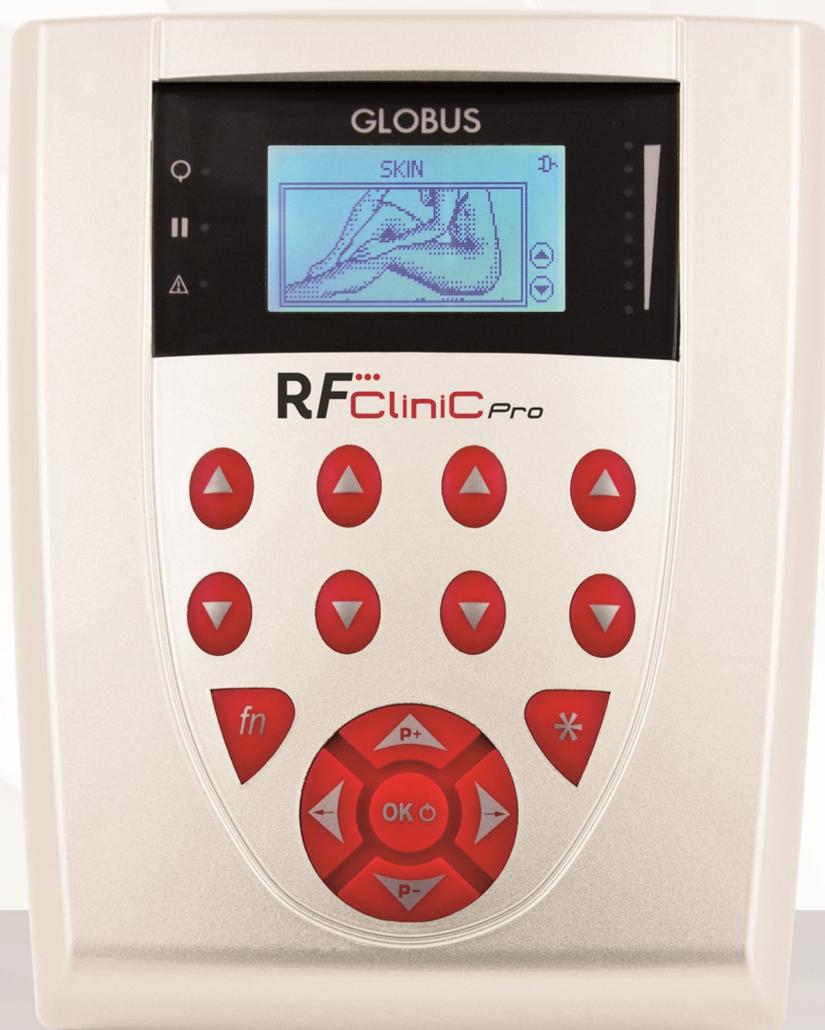

CE

EGREGIO CLIENTE

**LA RINGRAZIAMO PER LA SCELTA EFFETTUATA E LE CONFERMIAMO LA NOSTRA PIU'
COMPLETA DISPONIBILITÀ PER QUALSIASI AIUTO O SUGGERIMENTO DI CUI AVESSE
BISOGNO**

Gli apparecchi per radiofrequenza "RF Clinic Pro" sono prodotti e distribuiti da:

DOMINO SRL

Via Vittorio Veneto, 52

31013 Codogné - TV

Tel: (+39) 0438 7933

www.globuscorporation.com

info@globuscorporation.com

INDICE

CARATTERISTICHE TECNICHE.....	5
Dispositivo	5
Accessori in dotazione.....	5
DOTAZIONE	6
DESTINAZIONE D'USO	6
CONNESSIONI	6
Dispositivo	6
ETICHETTATURA E SIMBOLI	7
Accessori.....	8
Dispositivo	8
Interfaccia e comandi.....	9
Display	9
ALLARMI.....	10
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI	11
Comportamento obbligatorio	11
Avvertenze prima dell'uso	11
Avvertenze durante l'uso	11
Effetti indesiderati	12
Controindicazioni.....	12
MANUTENZIONE E PULIZIA	12
Dispositivo e accessori	12
Trasporto.....	13
Smaltimento.....	13
MODO D'USO.....	13
ELENCO PROGRAMMI.....	15
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivo

Contenitore:	in ABS
Grado di protezione contenitore:	IP 20
Dimensione:	170 x 220 x 60 mm
Peso:	circa 870 g
Potenza:	200 W (a 50 ohm)
Frequenze:	da 470 Khz a 2 Mhz
Modalità di trasferimento:	resistivo

Condizioni di trasporto e stoccaggio

Temperatura di stoccaggio e di trasporto:	da -10°C a 45°C
Umidità relativa massima:	75%
Pressione atmosferica:	da 700 hPa a 1060 hPa

Condizioni di utilizzo

Temperatura :	da 0°C a 40°C
Umidità relativa massima:	da 30% a 75%
Pressione atmosferica:	da 700 hPa a 1060 hPa

Alimentatore:

Modello : GlobTek GTM91099-6024-6.0-T2

PRI: 100-240V – 50-60Hz

SEC: 18Vd.c. 3.3A Max

Polarità: 

Accessori in dotazione

Manipolo Rf Clinic 100

Il manipolo Rf Clinic 100 è un manipolo bipolare a due sfere ideale per trattamenti sul viso e sul décolleté.

Manipolo Rf Clinic 500


Il manipolo Rf Clinic 500 è un manipolo bipolare concentrico. La superficie conduttiva è composta da due punti di contatto in nichel biocompatibile, uno più interno cilindrico e l'altro più esterno circolare, tra loro concentrici e separati da un anello isolante. Ogni singola parte è connessa ad uno dei due poli del cavo di connessione. Il diametro del manipolo bipolare in dotazione è Ø 50 mm.

Accessori non in dotazione

Batteria: 12V 4000mA (non inclusa, accessorio opzionale)

DOTAZIONE

- A. Valigetta per il trasporto
- B. Dispositivo
- C. 1 manipolo RF Clinic 500
- D. 1 manipolo RF Clinic 100
- E. Alimentatore (Vedi caratteristiche tecniche)
- F. Manuale d'uso
- G. 2 barattoli di crema da 50 ml

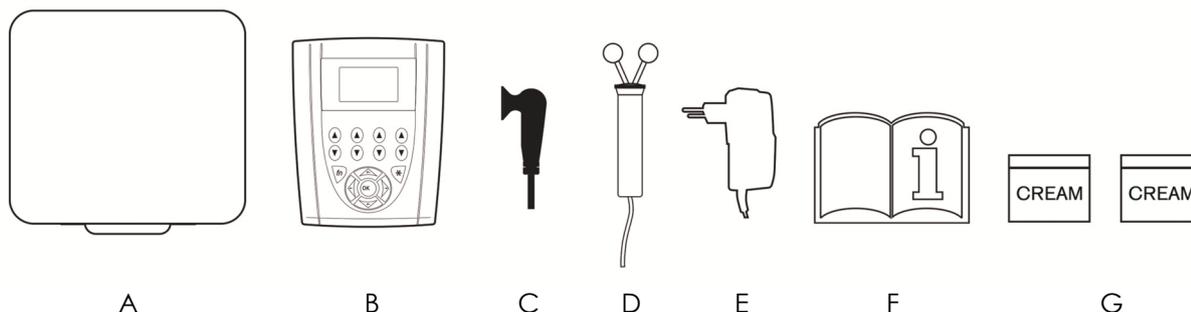

Una volta aperto l'imballaggio, verificare che la dotazione di base sia completa. Qualora dovesse mancare qualche elemento contattare immediatamente il rivenditore autorizzato a cui ci si è rivolti per l'acquisto. Controllare a vista l'integrità dell'apparecchio e degli accessori.

DESTINAZIONE D'USO

La vita utile stimata del prodotto è di anni 5. Si consiglia il rientro del prodotto presso il fabbricante e/o centro autorizzato ogni 2 anni per la manutenzione e verifica di sicurezza.

I dispositivi Rf Clinic Pro sono stati studiati per essere utilizzati in ambiti operativi quali:


- ambienti domiciliari;
- per uso estetico personale opportunamente informati delle metodologie usate dall'apparato.

CONNESSIONI

Dispositivo

Il dispositivo funziona collegato alla rete elettrica. Per collegare l'alimentatore al connettore inserire la presa nell'entrata A. Vedi figura (sotto).

Inserire prima il connettore nel dispositivo e poi collegarlo alla rete elettrica.

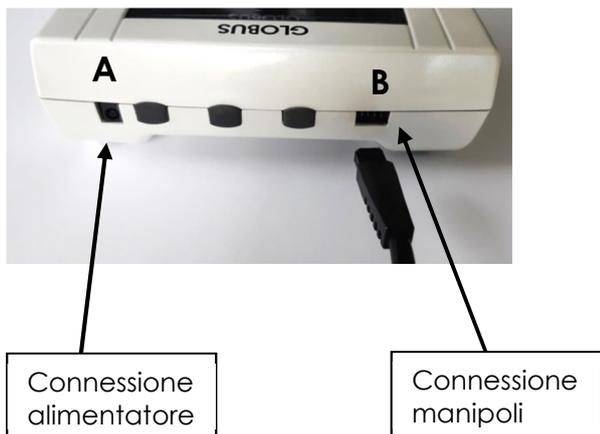

Per collegare il manipolo all'apparecchio inserire il connettore all'uscita B facendo attenzione a posizionare la parte con le scanalature verso il basso.

BATTERIA: come caricare le batterie (accessorio opzionale)

L'apparecchio è munito di un pacco batterie ricaricabili (12V, 2Ah) al Nichel Metal-idrato ad alto rendimento e senza effetto memoria.

Quando nel display l'indicatore di batteria indica 1/4 di carica si consiglia di provvedere alla ricarica. Dopo aver spento il dispositivo collegarlo all'alimentatore in dotazione, inserendo il connettore nell'apposita presa (vedi fig.A).

Non utilizzare mai l'alimentatore diverso da quello fornito con lo strumento. Per la sostituzione del pacco batterie contattare l'assistenza.

ETICHETTATURA E SIMBOLI

	<p>Simbolo RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Simbolo di riciclaggio.</p> <p>Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto indica che quest'ultimo non può essere trattato come rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale, alla società addetta allo smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio dove è stato acquistato il prodotto.</p>
	<p>Questo simbolo sul vostro apparecchio serve ad indicare che è in conformità con i requisiti delle direttive vigenti</p>
	<p>Indica che il prodotto è realizzato nel rispetto della direttiva 2011/65/UE</p>
	<p>Informa l'operatore che prima dell'uso dell'apparato è obbligatorio la lettura del manuale</p>


	Fa riferimento al fabbricante
PRI	Tensione di rete elettrica
SEC	Tensione di alimentazione del dispositivo

Accessori


Etichetta crema conduttiva Globus

	Non ingerire
	Prodotto ipoallergenico
	Il prodotto è utilizzabile solo esternamente su pelle integra.
	Il prodotto è monouso. Per trattare più pazienti utilizzare l'apposito dosatore oppure spatoline usa e getta.
	Indica il simbolo del polietilene.
	Non disperdere la confezione nell'ambiente dopo l'uso.

Dispositivo

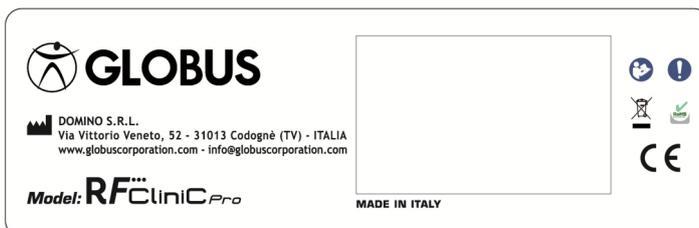


Interfaccia e comandi

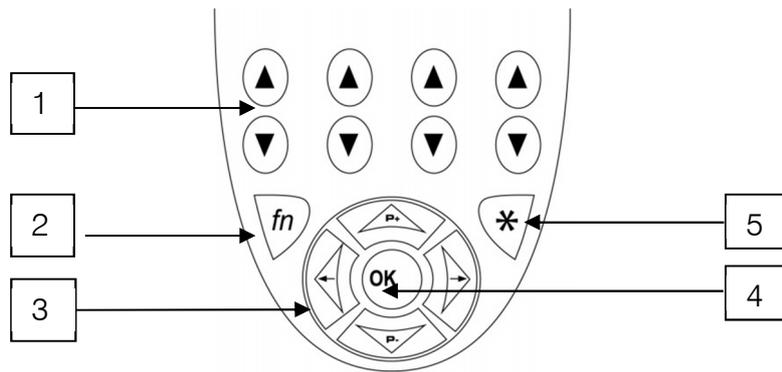

Tasti incremento-decremento. I tasti superiori incrementano i tasti inferiori decrementano. Nel caso della potenza i superiori la aumentano del 5%, mentre gli inferiori la diminuiscono del 5%.

- 1- Tasto fn: non attivo.
- 2- Tasti direzionali (P+, P-, dx e sx) per scorrere le opzioni del menu di navigazione, tasto con freccia a sinistra per tornare alla schermata precedente.
- 3- Tasto accensione-spegnimento e pausa.
- 4- Tasto asterisco per modificare la durata del trattamento.

Display

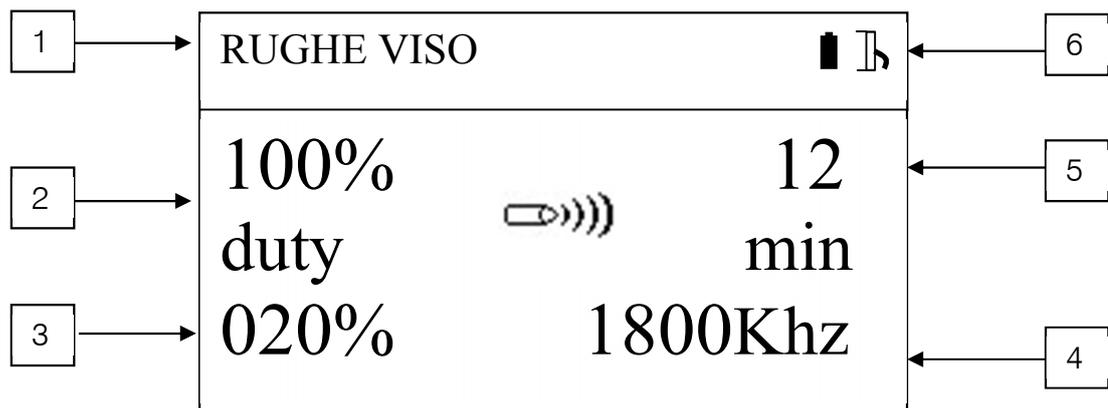

- 1- Indica il nome del programma scelto
- 2- Indica la percentuale di duty cycle emessa dal dispositivo. Quando il duty cycle è a 100 significa che la macchina emette in modo continuo per tutta la durata del trattamento. Un duty cycle minore, per esempio del 50%

indica un'emissione del 50% del tempo su base 1 secondo. L'effetto termico di un programma, a parità di potenza emessa, sarà più basso con duty cycle minori.

- 3- Indica la percentuale di potenza emessa dal dispositivo
- 4- Indica la frequenza in Khz utilizzata dal programma
- 5- Indica la durata del programma in minuti
- 6- Il simbolo con la presa elettrica indica che il dispositivo è correttamente collegato alla rete, mentre il simbolo con la batteria indica che il dispositivo sta funzionando a batteria.

Avvisi luminosi



Indicatore On/off

Indicatore PAUSA (durante il trattamento)

Indicatore errore generale. Se si accende la spia verificare i collegamenti cavi/elettrodi. Se la spia rimane accesa contattare l'assistenza.



Indicatore livelli di potenza

Avvisi sonori



Durante l'utilizzo il dispositivo emette un suono simile a un "do-re-mi" che indica una corretta emissione.

Un beep lungo indica il termine del trattamento.

Gli avvisi sonori possono essere disabilitati dal menu impostazioni.

ALLARMI

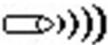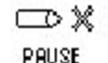

	<p><u>Erogazione corretta di potenza:</u> il trattamento procede correttamente, si presenta emissione laser.</p>
	<p><u>Cavo non collegato:</u> verificare che il cavo sia collegato all'uscita corretta.</p>
	<p><u>Apparecchio in pausa:</u> premere OK per continuare con il trattamento.</p>
	<p><u>L'apparecchio è in modalità standby:</u> premere il pulsante sul manipolo per inizializzare l'emissione</p>

AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI

Comportamento obbligatorio

Per mantenere il livello massimo di sicurezza l'utente deve utilizzare l'apparecchio nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di impiego del manuale d'uso.

Il produttore declina ogni responsabilità in merito ad un uso difforme da quanto indicato e prescritto nel presente manuale.

Senza il permesso scritto del produttore sono vietati la riproduzione anche parziale in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico di testi e/o foto contenute in questo manuale.

Se l'involucro, il cavo o il connettore dell'alimentatore presentano segni di usura o danneggiamento provvedere alla sostituzione immediata dello stesso.

L'apparato va collegato alla linea elettrica attraverso il proprio alimentatore, prima di eseguire tale operazione verificare che l'impianto sia conforme alle direttive vigenti nel proprio Paese. Non collocare l'alimentatore in modo che risulti difficile scollegarlo dalla presa di alimentazione.

Non è ammessa alcuna modifica del dispositivo.

Avvertenze prima dell'uso

PERICOLO DI SCOTTATURE E USTIONI: un uso scorretto del sistema può provocare delle scottature o ustioni al soggetto trattato.

Si sconsiglia l'uso dell'apparecchio in concomitanza con altri apparati elettronici, in modo particolare con quelli che vengono impiegati per il sostentamento di funzioni vitali; si faccia riferimento alle tabelle allegate per una corretta messa in funzione del dispositivo elettromedicale. Nel caso in cui sia necessario l'uso del dispositivo vicino o sovrapposto ad altri apparecchi va osservato il funzionamento. E' buona norma leggere attentamente tutto il manuale di istruzioni prima di utilizzare l'unità; conservate con cura il presente libretto.

Prima di ogni utilizzo controllate sempre l'integrità dell'apparecchio, condizione indispensabile per l'effettuazione della terapia; non utilizzate l'unità se presenta difettosità o malfunzionamenti dei cavi o dei tasti.

Non utilizzare agenti infiammabili durante l'applicazione del dispositivo.

Il dispositivo deve essere tenuto fuori della portata dei bambini.

Durante il trattamento è preferibile rimuovere oggetti metallici come braccialetti, collanine, piercing e simili.

Assicurarsi che la pelle del soggetto, prima di iniziare il trattamento, sia pulita e asciutta.

Avvertenze durante l'uso

Durante l'utilizzo del dispositivo bisogna assicurarsi che i manipoli siano ben cosparsi di crema conduttiva e che tutta la loro superficie sia mantenuta a contatto con la cute del soggetto.

Regolare la potenza di emissione in relazione alla tolleranza individuale al calore.

Non lasciare fermo il manipolo durante l'emissione perché potrebbe provocare scottature.

Effetti indesiderati

- Arrossamento
- Irritazione cutanea

Controindicazioni

L'uso del dispositivo per radiofrequenza è controindicato:

- In soggetti portatori di pacemaker e di altre apparecchiature elettroniche impiantabili.
- Non effettuare trattamenti negli occhi.
- Non effettuare trattamenti su donne in stato di gravidanza.
- Non effettuare in corrispondenza di filler riassorbibili e non riassorbibili.

Evitare nel modo più assoluto di effettuare trattamenti su superfici del corpo insensibili al calore e in presenza di una delle seguenti malattie:

- neoplasie;
- insufficienza cardiocircolatoria grave;
- emorragie;
- infezioni locali o sistemiche;
- patologie dermatologiche attive;
- tessuti ischemici;
- febbre;
- alterazioni della coagulazione.

Sono da considerarsi avvertenze relative :

- la presenza di aree del corpo con poca sensibilità (aree ipoestetiche);
- soggetti particolarmente obesi;
- malattie infiammatorie in fase acuta.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Dispositivo e accessori

- In caso di guasto reale o presunto non manomettere il dispositivo o tentare di ripararlo in proprio.

Non intervenire sul dispositivo, non aprirlo. Le riparazioni possono essere effettuate solo da un centro specializzato ed autorizzato.

- Evitare urti violenti che potrebbero danneggiare l'apparecchio e determinare malfunzionamenti anche non immediatamente riscontrabili.
- Il dispositivo va utilizzato in un ambiente asciutto e libero in aria (non avvolto da altri oggetti).
- Pulire il dispositivo e gli accessori solo con Amuchina o sali d'ammonio di quaternario diluiti in acqua distillata in percentuale pari al 0,2-0,3%. Prestare

attenzione a rimuovere ogni residuo di crema dalla piastra e dagli elettrodi mobili. Al termine della pulizia/disinfezione il dispositivo e i suoi accessori vanno perfettamente asciugati con l'uso di un panno pulito.

- Utilizzare il dispositivo e gli accessori sempre con le mani adeguatamente pulite.
- Si raccomanda di utilizzare il dispositivo in un ambiente pulito, onde evitare la contaminazione del dispositivo stesso e degli accessori con polveri e sporco.
- Si raccomanda di utilizzare il dispositivo in un ambiente ventilato, dove avvengono ricambi periodici dell'aria.
- Si prevede che il processo di pulizia/disinfezione degli elettrodi avvenga ad ogni fine utilizzo. Per quanto riguarda le altre parti che potrebbero venire a contatto con il soggetto trattato si consiglia di pulirle all'occorrenza.
- Il prodotto ed i suoi accessori , quando non utilizzati e/o quando trasportati vanno riposti nella loro confezione originaria.

Trasporto

Al termine dell'utilizzo o durante il trasporto il dispositivo ed i suoi accessori vanno riposti all'interno della valigetta originale e disposti come all'origine.

Smaltimento

Non gettare l'apparecchio o sue parti nel fuoco, ma smaltire il prodotto nei centri specializzati e comunque nel rispetto delle normative in vigore nel proprio Paese. Si informa l'utilizzatore che può riconsegnare il prodotto a fine vita al distributore all'atto di acquisto di una nuova apparecchiatura.

MODO D'USO

Accensione/ Spegnimento del dispositivo

- Inserire il connettore dell'alimentatore nell'apposito alloggiamento del dispositivo.
- premere per qualche secondo il tasto ON-OFF. Il display si illuminerà ed un bip sonoro confermerà l'avvenuta accensione.

Per spegnere il dispositivo tenere premuto il tasto ON-OFF.

Per selezionare un'opzione del menu spostarsi con le frecce direzionali e premere il tasto ok.

Menu iniziale

ELENCO PROGRAMMI
NUOVI PROGRAMMI
IMPOSTAZIONI

Elenco programmi

Scegliendo "Elenco programmi" si visualizzeranno le aree VISO, PELLE, CELLULITE e My PROGRAMS. Procedere alla selezione del programma desiderato.

Una volta scelto il programma premere il tasto ok e procedere con il trattamento. I parametri dei programmi sono già predefiniti, tuttavia è possibile regolare la potenza di emissione utilizzando gli appositi tasti.

Modifica della durata del trattamento

Per modificare la durata del trattamento premere il tasto * e regolare il tempo utilizzando i tasti P+ e P-.

Nuovi programmi

Scegliendo nuovi programmi è possibile creare dei programmi personalizzati che verranno memorizzati nell'area My Programs (dentro elenco programmi).

Parametri

Per spostarsi tra le opzioni utilizzare le frecce P+ e P-, per modificare il valore utilizzare i tasti di incremento e decremento.

- Frequenza: modificabile con possibilità di scelta tra 470, 900, 110, 1200, 1500, 1600, 1800, 2000 KHz.
- Tensione: indica la potenza, inserire una percentuale.
- Durata: modificabile al massimo fino a 59 minuti.
- Duty cycle: modificabile da 10% a 100% con step di 10.

Una volta terminato premere il tasto Ok e inserire il nome del programma.

Per modificare una lettera utilizzare i tasti di incremento e decremento, per spostarsi alla lettera successiva utilizzare i tasti direzionali di dx e sx. Al termine premere Ok per salvare il programma.

E' possibile memorizzare fino a 30 programmi.

Impostazioni

Il menu impostazioni da accesso alla modifica di alcune funzioni. In questa schermata è possibile visualizzare anche il numero di software del dispositivo (Gui e Pow).

Avvisi sonori: permette di abilitare o disabilitare gli avvisi sonori. La scelta sarà visibile tramite il simbolo di una campanella e la scritta ON in caso di abilitazione oppure di una campanella barrata e la scritta OFF in caso di allarme disabilitato.

Autospegnimento: permette di impostare un tempo in minuti oltre il quale il dispositivo non utilizzato si spegne autonomamente. E' possibile impostare un tempo da 1 a 20 minuti.

Contrasto: permette di modificare il contrasto del display da un valore molto basso e chiaro (1) a un tono deciso (valore 16).

Lingua: è possibile scegliere la lingua del menu di navigazione della macchina.

ELENCO PROGRAMMI



NOME PROGRAMMA	DUTY CYCLE	TEMPO min.	Intensità consigliata
VISO			
Rughe viso	100%	12	da 60% a 90%
Rughe occhi	100%	10	da 60% a 90%
Acne Viso	100%	8	da 60% a 90%
Micro-Lifting Viso	100%	12	da 60% a 90%
Couperose	100%	12	da 60% a 90%
Foruncoli Viso	100%	10	da 60% a 90%
Anti Age	100%	15	da 60% a 90%
PELLE			
Acne pelle	100%	18	da 60% a 90%
Rughe Corpo	100%	20	da 60% a 90%
Rughe pelle sensibile	100%	18	da 60% a 90%
Micro-Lifting décolleté	100%	16	da 60% a 90%
Smagliature	100%	16	da 60% a 90%
Elasticità Pelle	100%	20	da 60% a 90%
Collagene Bio-Skin	100%	18	da 60% a 90%
Cicatrici	100%	12	da 60% a 90%
Foruncoli corpo	100%	18	da 60% a 90%
Skin restructure	100%	20	da 60% a 90%
Skin smoothing	100%	20	da 60% a 90%
Rassodamento	100%	14	da 60% a 90%
Massaggio	100%	20	da 60% a 90%
CELLULITE			
Lipolisi	100%	20	da 60% a 90%
Cellulite	100%	20	da 60% a 90%
Cellulite edematosa	100%	18	da 60% a 90%
Cellulite fibrosa	100%	20	da 60% a 90%
Culotte de Cheval	100%	15	da 60% a 90%
Cellulite pelle a buccia d'arancia	100%	15	da 60% a 90%
Adiposità maschile addome	100%	12	da 60% a 90%
Adiposità maschile fianchi	100%	14	da 60% a 90%
Adiposità maschile arti inferiori	100%	18	da 60% a 90%
Adiposità maschile arti superiori	100%	12	da 60% a 90%

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Per applicazioni sul viso e sul décolleté consigliamo di utilizzare il manipolo con due sfere, mentre per trattamenti sul corpo è preferibile quello cilindrico.

Il manipolo di trattamento deve essere applicata in maniera perpendicolare alla zona da trattare e fatto scorrere lentamente con movimenti circolari, raccogliendo di tanto in tanto la crema. Per evitare di surriscaldare la zona di trattamento è necessario spostare il manipolo con movimento lento e uniforme, facendo attenzione a non lasciarlo mai fermo. Prima di procedere con l'applicazione pulire accuratamente la pelle e assicurarsi che non siano presenti tracce di detergenti o altri prodotti.

I trattamenti effettuati sul viso devono essere fatti cercando di tirare la pelle verso l'esterno e verso l'alto, con l'intento di dare ai tessuti maggior sostegno.

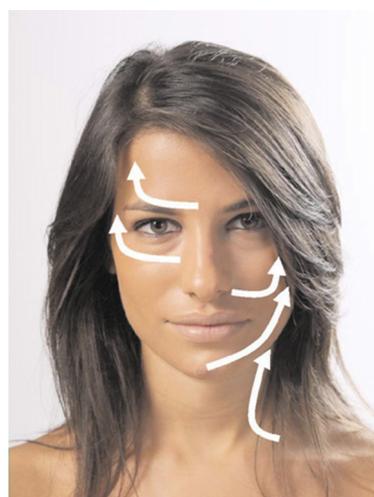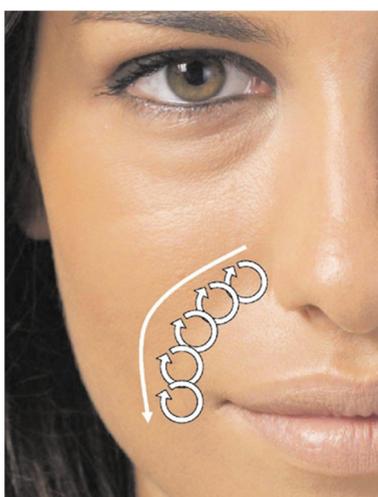

Le applicazioni

Il protocollo suggerito è un ciclo di 10-15 sedute con una frequenza di due/ tre volte alla settimana da ripetere almeno a distanza di sei mesi. I primi miglioramenti sono normalmente già visibili dopo ogni trattamento e dovuti principalmente all'azione sul micro-circolo locale. Dopo 10 sedute la compattezza della pelle diventa un dato soggettivo riferito dagli utilizzatori.

Rughe

Vengono trattate numerose zone: volto (fronte, contorno occhi, contorno bocca e naso, linea mandibolare, contorni del volto). RF Clinic determina anche un'attenuazione delle "zampe di gallina" e delle lassità su collo e décolleté, braccia (lato interno), dorso delle mani, addome e fianchi, interno cosce e glutei.

Rughe-pelle sensibile

Come sopra ma specifico per una pelle particolarmente sensibile.

Acne viso

Sulle cicatrici dell'acne finora trattate con scarsi risultati l'energia emessa da RF

Clinic provoca la formazione di nuovo collagene che spiana le cicatrici acneiche ed effettua un'azione linfodrenante che favorisce la rigenerazione cutanea. La RF è efficace anche nelle forme attive di acne volgare dove determina un miglioramento della componente infiammatoria legato ad un'inibizione dell'attività delle ghiandole sebacee visibile da una minore untuosità della zona trattata.

Micro-lifting

L'innovativo (ma sperimentato e ufficialmente riconosciuto per uso medico già da anni) sistema con utilizzo di onde radio a determinate frequenze (innocue per la salute), costituisce una indicazione elettiva per tutti quei casi di rilassamento cutaneo dovuto a perdita di fibre collagene ed elastiche, responsabile, indipendentemente dall'età, della perdita di elasticità e del tono tessutale, con conseguente aspetto di decadimento del distretto corporeo interessato (che apparirà lasso, anelastico, ipototonico e distrofico, con aspetto senescente e rugoso).

Smagliature

RF Clinic agisce soprattutto sulle strie rubre con la regressione delle smagliature in fase infiammatoria e sul miglioramento di quelle ormai stabilizzate (strie albae). L'effetto è subito evidente e si consolida nei mesi successivi. La cute trattata si presenta più spessa: il calore stimola infatti i fibroblasti a compiere il processo di autoriparazione del derma stimolando la sintesi di nuovo collagene anche nei casi di diminuito o rallentato rinnovamento cellulare legato all'età avanzata.

Cicatrici

Stesso principio di funzionamento ma studiato appositamente per applicazioni sul tessuto cicatriziale.

Inoltre l'energia emessa da RF Clinic provoca la formazione di nuovo collagene che spiana le cicatrici.

Elasticità

La minore attività dei fibroblasti, dovuta all'invecchiamento, ma non solo, ovvero delle fibre che producono collagene ed elastina, determinano anche la perdita di elasticità da parte della pelle. Questo programma è particolarmente indicato per contrastare questo fenomeno tramite l'aumentata produzione di elastina.

Collagene Bio-Skin

Il patrimonio di collagene va incontro a un progressivo processo fisiologico di deterioramento, legato al proprio patrimonio genetico e a vari fattori ambientali (come il fumo, l'alcool, lo stress ossidativo, l'esposizione ai raggi solari, cattive abitudini alimentari e uno stile di vita scorretto). La perdita di collagene si manifesta con la comparsa delle prime rughe e con una progressiva perdita di tonicità cutanea. RF Clinic, con il suo programma studiato

appositamente, stimola la produzione di collagene, attraverso una biostimolazione cutanea.

CONDIZIONI DI GARANZIA

L'apparecchio è garantito al primo utilizzatore per il periodo di 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiali o di fabbricazione purché utilizzato appropriatamente e mantenuto in normali condizioni di efficienza.

La validità della garanzia è limitata nei seguenti casi:

- sei (6) mesi per gli accessori in dotazione come, ad esempio, alimentatori, manipoli ecc...
- nessuna garanzia per accessori e materiali da considerarsi "di consumo" come, ad esempio le creme.

La presente garanzia è valida ed efficace nel paese dove il Prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui il prodotto sia stato acquistato in un qualsiasi Paese della Comunità Europea, la garanzia è comunque valida in tutti i suoi Paesi.

Per usufruire del servizio di garanzia, l'utente deve rispettare le seguenti clausole di garanzia:

1. I prodotti dovranno essere consegnati per la riparazione a cura e spese del Cliente negli imballaggi originali.
2. La garanzia del prodotto sarà subordinata all'esibizione di un documento fiscale (scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura di vendita), che attesta la data di acquisto del prodotto.
3. La riparazione non avrà effetto sulla data originale di scadenza della garanzia e non porterà il rinnovo o l'estensione della stessa.
4. Nel caso in cui, all'atto dell'intervento di riparazione, non si riscontri alcun difetto del prodotto stesso, saranno comunque addebitate le spese relative alla verifica tecnica
5. La garanzia decade ove il guasto sia stato determinato da: urti, cadute, uso errato od improprio del prodotto, utilizzo di un alimentatore o caricabatterie non originale, eventi accidentali, alterazione del prodotto, sostituzione/distacco dei sigilli di garanzia e/o manomissione del prodotto. La stessa inoltre non copre danni causati durante il trasporto per utilizzo di imballi non idonei.
6. La garanzia non risponde della impossibilità di utilizzazione del prodotto, di altri costi incidentali o consequenziali o di altre spese sostenute dall'acquirente.

GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

DOMINO S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - Tel. (+39) 0438.7933

globuscorporation.com |   