

# GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

## PRESSOTERAPIA



Manuale di utilizzo

PRESSCARE G-SPORT<sup>3</sup>



CE



# EGREGIO CLIENTE

**LA RINGRAZIAMO PER LA SCELTA EFFETTUATA E LE CONFERMIAMO LA  
NOSTRA PIU' COMPLETA DISPONIBILITA' PER QUALSIASI AIUTO O  
SUGGERIMENTO DI CUI AVESSE BISOGNO**

Le pressoterapia PressCare G-Sport 3 sono prodotte dalla:

**Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.**

4th Floor, Building 15, 1008 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen,  
518108, China

Tel: (+86) 755.29060097

Fax: (+86) 755.29060036

Web site: <http://www.lifotronic.com>

e distribuite dalla:

**DOMINO s.r.l.**

via Vittorio Veneto 52

31013 - Codognè - TV - Italy

Tel. (+39) 0438.7933

Fax. (+39) 0438.793363

E-Mail: [info@globuscorporation.com](mailto:info@globuscorporation.com)

[www.globuscorporation.com](http://www.globuscorporation.com)

## SOMMARIO

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| CARATTERISTICHE TECNICHE .....       | 5  |
| Dispositivo .....                    | 5  |
| DOTAZIONE .....                      | 7  |
| DESTINAZIONE D'USO .....             | 7  |
| CONNESSIONI .....                    | 7  |
| Come collegare i gambali .....       | 8  |
| Utilizzo del power bank .....        | 8  |
| INTERFACCIA E COMANDI .....          | 10 |
| ALLARMI .....                        | 11 |
| AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI ..... | 12 |
| Comportamento obbligatorio .....     | 12 |
| Avvertenze prima dell'uso .....      | 12 |
| Avvertenze durante l'uso .....       | 12 |
| Effetti indesiderati .....           | 12 |
| Controindicazioni .....              | 13 |
| MANUTENZIONE E PULIZIA .....         | 13 |
| Dispositivo .....                    | 13 |
| Smaltimento dell'apparato .....      | 14 |
| MODO D'USO .....                     | 14 |
| PRINCIPI DI AZIONE .....             | 16 |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

---

### Dispositivo

Dimensione: 180x190x135 mm

Peso: 1118 g.

Contenitore: in ABS

Temperatura di stoccaggio e di trasporto: da -10°C a +40°C

Umidità relativa massima: ≤ 85%

I valori rappresentano i limiti consentiti qualora il prodotto o gli accessori non siano nella loro confezione originaria.

### Condizioni di utilizzo

Temperatura: da 5°C a 40°C

Umidità relativa massima: ≤ 75%


Pressione atmosferica: da 750 hPa a 1060 hPa

### Caratteristiche delle pressioni

Tempo del trattamento: da 1 a 99 minuti


Range pressione: da 1 a 180mmHg

### Accessori

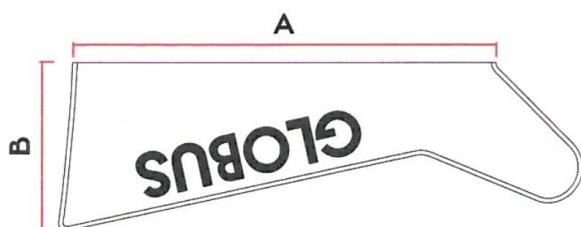

- Gambali taglia S: (A x B) 745 x 310 mm
- Gambali taglia M: (A x B) 880 x 352 mm
- Gambali taglia L: (A x B) 980 x 380 mm

### Accessori opzionali

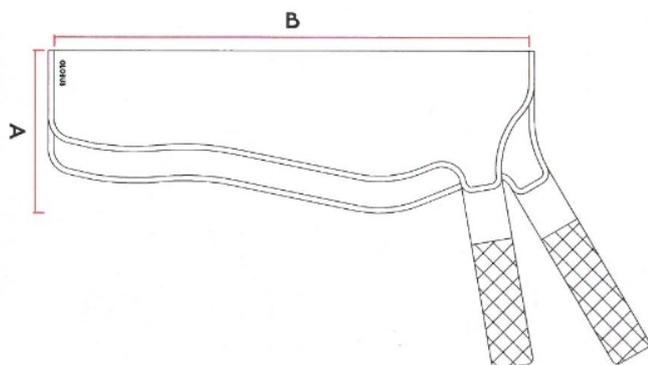

- Bracciale: (A x B) 440 x 1287 mm



- Fascia addominale: circonferenza max 1330 mm.
- Estensore gambale: 100 mm
- Estensore bracciale: 100 mm

I gambali e i bracciali sono universali e non prevedono distinzione tra arto destro e sinistro.

### **Power bank**

Capacità: 8000mAh

Input voltage: DC5V-DC14V

Input current: 5V 1.9A, 12V 0,6A

Output voltage: DC9-12V & USB5V

Peso: 250 g

Dimensioni: 98x50x22 mm

Max output power: 50W

Tempo di ricarica: 2-3 ore

### **Alimentatore**

Marca: Dongguam shilong fuhua electronic co.ltd

Modello: UE48-120400SPA1

PRI: 100 - 240 V a.c. 1,2mA 50 - 60 Hz

SEC: 12 Vd.c. - 4A

Polarità :



## **DOTAZIONE**

---

L'apparecchio per la pressoterapia viene fornito completo di connettori e accessori per l'uso; pertanto, una volta aperto l'imballaggio, verificare che la dotazione di base sia completa. Qualora dovesse mancare qualche elemento contattare immediatamente il rivenditore autorizzato a cui ci si è rivolti per l'acquisto.

- 1 PressCare G-Sport 3
- 2 gambali
- 2 cavi di collegamento
- 1 power bank
- 1 borsa per il trasporto
- 1 alimentatore

Il dispositivo può essere utilizzato con alcuni accessori opzionali (è possibile vedere le caratteristiche nel sito [www.globuscorporation.com](http://www.globuscorporation.com)). Per l'acquisto di questi accessori rivolgersi al proprio rivenditore.

## **DESTINAZIONE D'USO**

---

La vita utile stimata del prodotto è di anni 5. Si consiglia il rientro del prodotto presso il fabbricante e/o centro autorizzato ogni 2 anni per la manutenzione e verifica di sicurezza.

Il dispositivo può essere utilizzato in modo continuo quando è collegato alla rete elettrica.

I dispositivi PressCare G-Sport 3 sono stati studiati per essere utilizzati in ambiti sportivi, opportunamente informati delle metodologie usate dall'apparato.



## **CONNESSIONI**

---


### **Prese di connessione dei cavi e alimentazione**

Attenzione: se l'involucro, il cavo o il connettore dell'alimentatore presentano segni di usura o danneggiamento provvedere alla sostituzione immediata dello stesso.


### **Dispositivo**

Alimentazione tramite la rete elettrica. Per collegare l'alimentatore al connettore inserire la presa come rappresentato in figura.

Per isolare l'alimentatore dalla rete di alimentazione occorre scollegarlo dalla presa di rete.

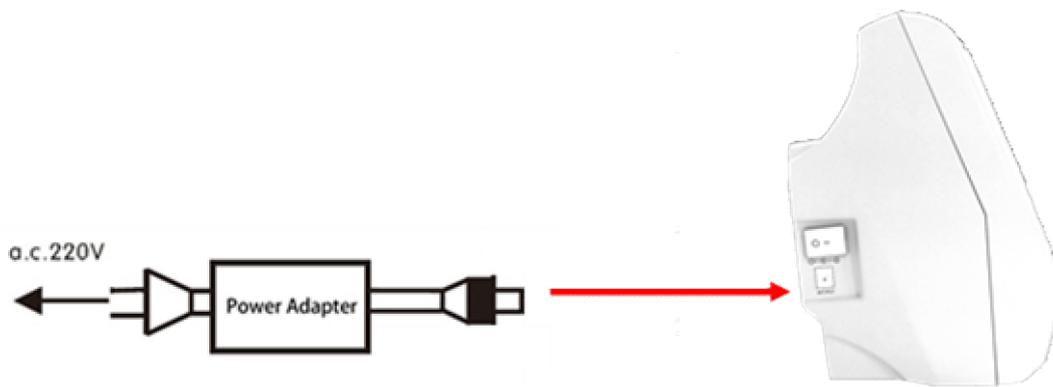

### Come collegare i gambali

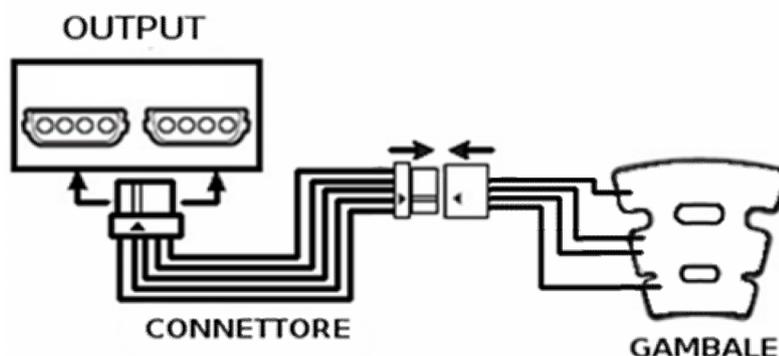

Il gambale va collegato ad un terminale del connettore mentre l'altro va collegato nella parte posteriore del dispositivo (canale 1 o canale 2).

### Utilizzo del power bank

Il power bank permette di utilizzare il dispositivo anche in assenza di prese elettriche. Il power bank deve essere precedentemente ricaricato così da poter alimentare il dispositivo per alcuni cicli di utilizzo. Il numero di cicli effettuabili con una carica non è preventivabile, in quanto dipende dal programma utilizzato, dalla pressione impostata e dalla durata del trattamento.

Per utilizzare il power bank è necessario collegare il suo connettore al dispositivo, quindi accenderlo e mettere in funzione la pressoterapia.

## ETICHETTATURA E SIMBOLI



|   |   |
|---|---|
|    | <p>Attenzione</p>   |
|    | <p>Questo simbolo sul vostro apparecchio serve ad indicare che è in conformità con i requisiti delle direttive vigenti</p>  |
|    | <p>Indica che il dispositivo è di classe II</p>   |
|    | <p>Simbolo RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Simbolo di riciclaggio.<br/>Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto indica che quest'ultimo non può essere trattato come rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale, alla società addetta allo smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio dove è stato acquistato il prodotto.</p> |
|  | <p>Indica che il prodotto è realizzato nel rispetto della direttiva 2011/65/CE</p>  |
|  | <p>Indica la temperatura prevista per la conservazione ed il trasporto del prodotto</p>   |
|  | <p>Informa l'operatore che prima dell'uso dell'apparato è obbligatorio la lettura del manuale</p>   |
|  | <p>Fa riferimento alla pressione dell'ambiente di trasporto e di conservazione del dispositivo e degli accessori</p>  |
|  | <p>Fa riferimento all'umidità dell'ambiente di utilizzo e di conservazione del dispositivo e degli accessori</p>  |
|  | <p>Fa riferimento al fabbricante</p>  |
|  | <p>Fa riferimento alla data di produzione</p>   |
|  | <p>Rappresentante autorizzato nell'Unione Europea</p>   |
|  | <p>Indica che l'imballaggio può essere smaltito come rifiuto riciclabili</p>  |

|       |   |
|-------|---|
| Type  | Indica il tipo di dispositivo             |
| Power | Indica il modello di alimentatore         |
| PRI   | Tensione di rete elettrica                |
| SEC   | tensione di alimentazione del dispositivo |


**Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.**  
 4th Floor, Building 15, 1008 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen, 518108, China  
 Tel: (+86) 755.29060097 - Fax: (+86) 755.29060036 - www.lifotronic.com

Production name: **Sequential Compression Device**

Input PWR: Dongguan Shilong Fuhua Electronic Co., Ltd  
 Type: UE48-120400SPA1  
 PRI 100-240Vac 50/60Hz 50VA  
 SEC 12Vdc 4A








**GLOBUS**  
 Model: PressCare G Sport3

**DOMINO S.R.L.** - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALY  
 Tel. (+39) 0438.7933 - www.globuscorporation.com

## INTERFACCIA E COMANDI

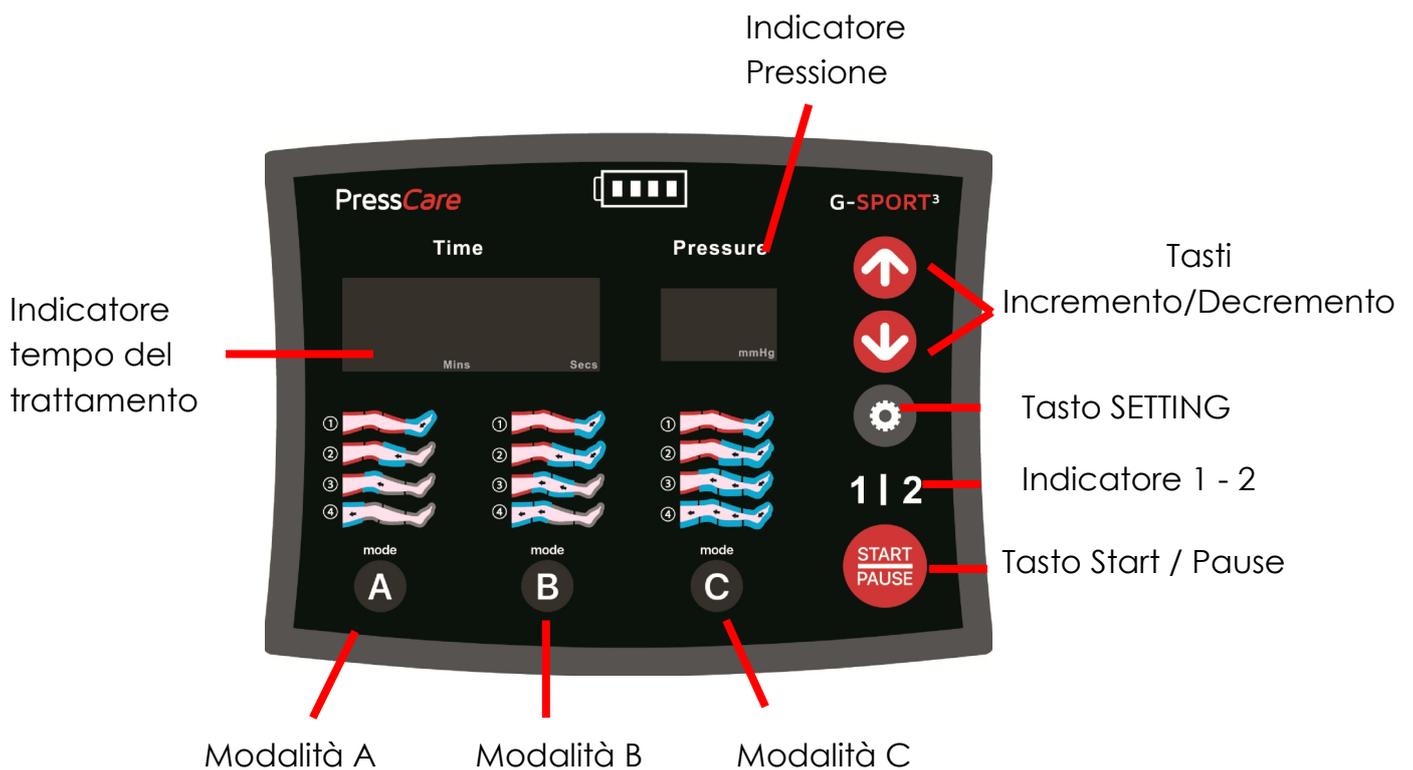

|   |   |
|---|---|
| <b>Tasto Start/Pause</b>                | Avvia e mette in pausa un programma in corso  |
| <b>Tasto Setting</b>                    | Permette di selezionare il parametro da modificare (tempo, pressione e numero di uscite attive)           |
| <b>Tasto incremento</b>                 | Incrementa il valore selezionato (tempo, pressione, modalità 1-2)   |
| <b>Tasto decremento</b>                 | Decrementa valore selezionato (tempo, pressione, modalità 1-2)  |
| <b>Tasti modalità A-B-C</b>             | Permettono di selezionare il programma  |
| <b>Indicatore 1 / 2</b>                 | Permette di visualizzare quali uscite sono attive   |
| <b>Indicatore tempo del trattamento</b> | Indica il tempo impostabile durante la fase di programmazione e il tempo rimanente durante il trattamento |
| <b>Indicatore Pressione</b>             | Indica la pressione impostata   |



## ALLARMI

Durante l'utilizzo del dispositivo potrebbero verificarsi delle condizioni che attivano i segnali di allarme.

### Significato allarme "HPR"

La sigla "HPR" significa che la pressione è troppo elevata.

La sigla comparirà nella sezione del display dedicata alla pressione; la macchina emetterà un segnale acustico e bloccherà le sue funzioni.

Compare quando la pressione media all'interno dei bracciali e dei gambali è superiore ai 120mmHg per almeno 0.5s.

Alla comparsa dell'allarme, premere il tasto "Start/Pause" per fermare il segnale acustico e resettare l'allarme.

### Significato allarme "LPR"

La sigla "LPR" significa che la pressione è troppo bassa.

La sigla comparirà nella sezione del display dedicata alla pressione; la macchina emetterà un segnale acustico e bloccherà le sue funzioni.

Compare quando la pressione è inferiore a 5mmHg.

Alla comparsa dell'allarme, premere il tasto "Start/Pause" per fermare il segnale acustico e resettare l'allarme.

## **AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI**

---

### **Comportamento obbligatorio**

Per mantenere il livello massimo di sicurezza l'utente deve utilizzare l'apparecchio nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di impiego del manuale d'uso.

Se l'involucro, il cavo o il connettore dell'alimentatore presentano segni di usura o danneggiamento provvedere alla sostituzione immediata dello stesso. L'apparato va collegato alla linea elettrica attraverso il proprio alimentatore, prima di eseguire tale operazione verificare che l'impianto sia conforme alle direttive vigenti nel proprio Paese. Non collocare l'alimentatore in modo che risulti difficile scollegarlo dalla presa di alimentazione.

Si declina ogni responsabilità in merito ad un uso difforme da quanto indicato e prescritto nel presente manuale.

Senza il permesso scritto del produttore sono vietati la riproduzione anche parziale in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico di testi e/o foto contenute in questo manuale.

### **Avvertenze prima dell'uso**

Nel caso in cui sia necessario l'uso del dispositivo vicino o sovrapposto ad altri apparecchi verificare il corretto funzionamento.

- E' buona norma leggere attentamente tutto il manuale di istruzioni prima di utilizzare l'unità; conservare con cura il presente libretto.
- Assicurarsi che l'utilizzatore non presenti alcuna patologia indicata nella sezione "controindicazioni".
- Prima di ogni utilizzo controllate sempre l'integrità dell'apparecchio e degli accessori, condizione indispensabile per l'effettuazione della terapia.
- Non dev'essere utilizzato per fini diversi da quelli indicati in questo manuale.
- Dev'essere utilizzato con gli accessori forniti da Domino s.r.l.
- Dev'essere tenuto fuori della portata dei bambini.

### **Avvertenze durante l'uso**

Durante l'utilizzo del dispositivo vanno seguite alcune avvertenze.

- I cavi e i connettori non devono essere avvolti attorno al collo di persone per evitare qualsiasi rischio di strangolamento o asfissia.
- Non coprire le aperture di ventilazione poste nella parte posteriore del dispositivo.
- Non comprimere i tubi dei connettori durante il trattamento.
- Non versare alcun liquido sopra il dispositivo e i suoi componenti.
- Gli apparecchi di radiocomunicazioni mobili e fissi potrebbero influenzare il funzionamento del dispositivo.
- Il dispositivo non deve essere usato in presenza di liquidi infiammabili
- Mantenere il dispositivo in un luogo asciutto.

### **Effetti indesiderati**

Non sono stati registrati effetti indesiderati.

In casi particolari, se non associata a delle terapie complementari, possono insorgere casi di indurimento dell'edema e di flogosi cronica.

Come precauzione, si sconsiglia questo tipo di trattamento su bambini e su donne in gravidanza.

### **Controindicazioni**

Si sconsiglia l'uso nei seguenti casi:

- trombosi venosa profonda;
- tromboflebiti;
- embolia polmonare;
- arteriosclerosi degli arti inferiori e problemi di ischemia vascolare;
- dermatiti della zona da trattare, cancrena, traumi ecc;
- insufficienza cardiaca, edema polmonare, edema nell'area da trattare;
- deformità importati dell'area da trattare;
- emofilia;
- fragilità dei capillari;
- aritmia;
- ipertensione arteriosa;
- edemi da insufficienza cardiaca, epatica, renale o da farmaci;
- soggetti che non tollerano impedimenti meccanici.

E' inoltre opportuno ricorrervi con cautela nel caso si soffra di fragilità capillare, in quanto una stimolazione eccessiva potrebbe portare alla rottura di un numero maggiore di capillari.

## **MANUTENZIONE E PULIZIA**

---

### **Dispositivo**

- In caso di deterioramento dell'involucro dell'apparecchio, questo va sostituito e non più utilizzato.
- In caso di guasto reale o presunto non manomettere il dispositivo o tentare di ripararlo in proprio.
- Non intervenire sulla macchina, non aprirla. Le riparazioni possono essere effettuate solo da un centro specializzato ed autorizzato.
- Evitare urti violenti che potrebbero danneggiare l'apparecchio e determinare malfunzionamenti anche non immediatamente riscontrabili.
- L'apparecchio va utilizzato in un ambiente asciutto e libero in aria (non avvolto da altri oggetti).
- Pulire l'apparecchio solo con Amuchina o sali d'ammonio di quaternario diluiti in acqua distillata in percentuale pari al 0,2-0,3%. Al termine della pulizia/disinfezione il dispositivo va perfettamente asciugato con l'uso di un panno pulito.
- Pulire i gambali utilizzando solo un panno umido e del sapone neutro. Non utilizzare alcun prodotto chimico o solvente.
- Non immergere le camere in acqua.

- Non immergere i tubi di raccordo in acqua.


### **Smaltimento dell'apparato**

Non gettare l'apparecchio o sue parti nel fuoco, ma smaltire il prodotto nei centri specializzati e comunque nel rispetto delle normative in vigore nel proprio Paese. Si informa l'utilizzatore che può riconsegnare il prodotto a fine vita al distributore all'atto di acquisto di una nuova apparecchiatura.

L'adeguata raccolta differenziata o il rispetto di quanto sopra evidenziato contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

## **MODO D'USO**

---

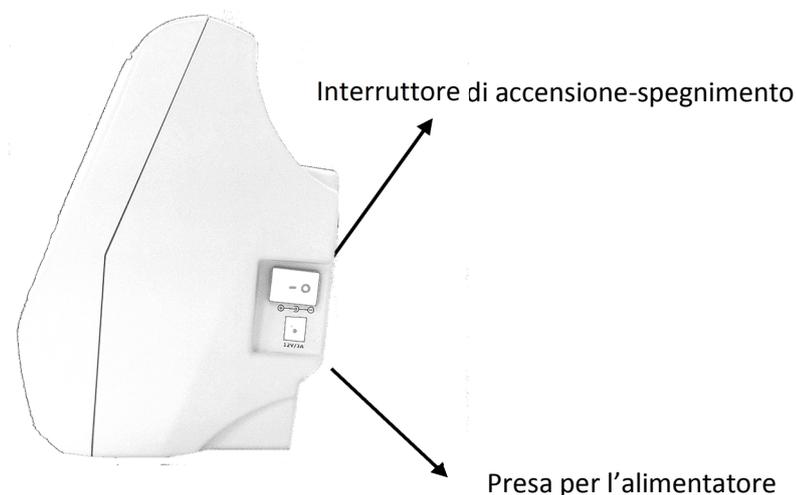

Prima di iniziare il trattamento appoggiate il dispositivo su di una superficie piana.

Per il corretto funzionamento del prodotto l'utilizzatore deve procedere come segue:

- indossare l'accessorio/gli accessori che si desidera utilizzare;
- collegare i cavi dei connettori alle rispettive prese (vedi pagina 6).

### **Come indossare gli accessori**

- Gambali: aprire la zip, indossare il gambale e richiudere la zip.
- Bracciale: indossare il bracciale facendo passare la fascia di sostegno sotto il braccio opposto.
- Fascia addominale: avvolgere la fascia attorno alla circonferenza addominale e fissarla utilizzando il velcro. Fare attenzione ad indossare la

fascia in modo che le camere si gonfino iniziando da quella superiore, per poi proseguire verso quelle più in basso.

Nel caso sia necessario aumentare la circonferenza dei gambali collegare gli estensori, acquistabili come accessorio opzionale.

### Accensione e spegnimento

Per accendere il dispositivo collegare l'alimentatore alla macchina e alla rete elettrica, quindi premere l'interruttore posto sul lato del dispositivo.

Per spegnere premere nuovamente l'interruttore.


### Selezione del programma

Selezionare la modalità desiderata:

#### Modalità A:

la macchina gonfierà una camera per volta a partire dalla porzione distale (1 – 2 – 3 – 4).

Questo tipo di compressione risulta ideale per effettuare un massaggio attivante, ideale prima della gara o dell'allenamento.

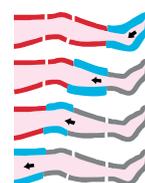


mode

**A**

#### Modalità B:

verranno gonfiate due camere per volta a partire dalla porzione distale (1 – 12 – 23 – 34).

Le camere si gonfieranno due per volta, garantendo un massaggio fisiologico, graduale e progressivo. Il gonfiaggio e sgonfiaggio di due camere per volta ridurrà il reflusso di fluidi verso il basso e renderà il trattamento efficace e molto confortevole.

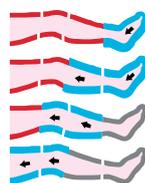

mode

**B**

#### Modalità C:

a partire dalla porzione distale verranno gonfiate tutte le camere (1 -12 -123 – 1234).

Il massaggio effettuato con questo programma opera, in maniera ottimale, lo svuotamento dell'arto dai fluidi che ristagnano. Grazie alla spinta omogenea e continua questo programma è ideale per un massaggio profondo.



mode

**C**

Il ciclo di funzionamento delle pressoterapie Globus PressCare G Sport 3 rispetta il movimento fisiologico del sangue e della linfa, quindi effettua una pressione in senso distale-proximale ( dal piede verso l'inguine o dalla mano verso la spalla).

### **Nota**

Il dispositivo è tarato per lavorare in modo ottimale con i gambali di taglia S e M. Qualora si utilizzassero gambali di taglia L e pressioni di gonfiaggio abbastanza alte, potrebbero essere necessari più cicli per avvertire una compressione soddisfacente.

## **Programmazione del trattamento**

### **Durata**

Premendo il tasto "Setting" l'indicatore del tempo inizierà a lampeggiare e sarà possibile modificarne il valore utilizzando i tasti di incremento e decremento. La durata del trattamento può essere impostata da 1 a 99 minuti. Consigliamo di iniziare con trattamenti di 5-10 minuti per poi eventualmente incrementare il tempo nelle successive sedute.

### **Regolazione della pressione**

Premendo nuovamente il tasto "Setting" inizierà a lampeggiare l'indicatore della pressione e sarà possibile modificare il valore utilizzando i tasti di incremento e decremento. Sugeriamo di impostare una pressione di applicazione attorno ai 30-40 mmHg per poi, eventualmente, incrementare progressivamente.

### **Selezione dei connettori**

Premendo una terza volta il tasto "Setting", sarà possibile, utilizzando i tasti di incremento e decremento, scegliere se attivare un solo connettore (1 o 2) o entrambi (1 e 2). I connettori selezionati ed attivi saranno visibili ed illuminati sul display in corrispondenza degli indicatori 1-2.

### **Avvio del programma**

Per avviare il programma basterà premere il tasto "Start/Stop".

### **Pausa del programma**

Per mettere in pausa il trattamento in corso, basterà premere il tasto "Start/Stop".

Durante la pausa sarà possibile variare tutti i parametri sopra elencati.

## **PRINCIPI DI AZIONE**

---

La pressoterapia rappresenta una metodica fisico-compressiva che, tramite un'onda di pressione, esegue un massaggio drenante i liquidi degli arti, svolgendo effetti benefici sia sul circolo venoso, che su quello linfatico.

La pressione generata applica una forza comprimente e una di trazione sul tessuto interstiziale e sui vasi in esso contenuti.

La forza compressiva riduce il calibro dei vasi venosi e linfatici, aumentando così la velocità del flusso ematico venoso e del flusso linfatico.

La stessa forza aumenta la pressione interstiziale riducendo la filtrazione sul versante arterioso e un aumento del riassorbimento capillare sul versante venoso.

Tutto ciò si traduce nella riduzione del carico linfatico interstiziale.

### **Pressoterapia e sport**

Dopo un allenamento o una gara gli arti inferiori sono generalmente più gonfi e dolenti. Effettuare una seduta di pressoterapia al termine della sessione consente di ridurre i tempi di recupero del muscolo.

### **Utilizzo**

Il ciclo di funzionamento corretto è quello che segue il movimento fisiologico del sangue e della linfa in senso distale-proximale, ovvero dalle estremità verso il centro. Quindi, quando si indossano i gambali, la pressione gonfierà prima la camera del piede per poi salire verso l'inguine.

I bracciali invece inizieranno a gonfiarsi dalla mano, salendo verso l'ascella.

La fascia addominale inizierà a gonfiarsi dalla camera superiore per poi scendere progressivamente verso quelle più vicino all'inguine.

## **GARANZIA**

L'apparecchio è garantito al primo utilizzatore per il periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiali o di fabbricazione, di dodici (12) mesi nel caso in cui l'utente utilizzi lo stesso a scopo professionale, purché utilizzato appropriatamente e mantenuto in normali condizioni di efficienza.

La validità della garanzia è limitata nei seguenti casi:

- sei (6) mesi per gli accessori in dotazione soggetti ad usura come, ad esempio, alimentatori, cavi, gambali, bracciali, fasce addominali, connettori.

La presente garanzia è valida ed efficace nel Paese dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui il prodotto sia stato acquistato in un qualsiasi Paese della Comunità Europea, la garanzia è comunque valida in tutti i suoi Paesi.

Per usufruire del servizio di garanzia, l'utente deve rispettare le seguenti clausole di garanzia:

1. I prodotti dovranno essere consegnati per la riparazione a cura e spese del Cliente negli imballaggi originali e con la dotazione originale completa.
2. La garanzia del prodotto sarà subordinata all'esibizione di un documento fiscale (scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura di vendita), che attesta la data di acquisto del prodotto.
3. La riparazione non avrà effetto sulla data originale di scadenza della garanzia e non porterà il rinnovo o l'estensione della stessa.
4. Nel caso in cui, all'atto dell'intervento di riparazione, non si riscontri alcun difetto del prodotto stesso, saranno comunque addebitate le spese relative alla verifica tecnica.
5. La garanzia decade ove il guasto sia stato determinato da: urti, cadute, uso errato od improprio del prodotto, utilizzo di un alimentatore/caricabatterie esterno non originale, eventi accidentali, alterazione del prodotto, sostituzione/distacco dei sigilli di garanzia e/o manomissione del prodotto. La stessa inoltre non copre danni causati durante il trasporto per utilizzo di imballi non idonei (vedi punto 1).
6. La garanzia non risponde della impossibilità di utilizzazione del prodotto, di altri costi incidentali o consequenziali o di altre spese sostenute dall'acquirente.

**N.B.** Prima di restituire la macchina per le riparazioni, si consiglia di leggere attentamente le istruzioni d'uso contenute nel manuale e di consultare il sito Globus. In caso si debba inviare il prodotto in assistenza, rivolgersi al proprio rivenditore o al servizio di assistenza Globus.



# **GLOBUS**

**ITALIAN** EXCELLENCE

DOMINO S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - Tel. (+39) 0438.7933

[globuscorporation.com](http://globuscorporation.com) |   