



# Alzacoperte Smontabile VLA 350

Cod. 90590350



Prodotto Conforme **CE**

## MANUALE D'USO

VAIMAS SRL

Via Volpato, 39  
36035 Marano Vicentino VI

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =

Direttiva 93/42 CEE  
Ausili Medici Classe I

Rev. 1,1

---

## INFORMAZIONI GENERALI

---

Ausilio utilizzato per sollevare le coperte o lenzuola al fine di evitare contatti con il corpo del paziente

---

## DATI TECNICI e REGOLAZIONI

---


Struttura in tubo di acciaio cromato diametro 18 con innesti

- Altezza 37 cm
  - Profondità 38 cm
  - Larghezza est max. 48 cm
  - Peso struttura 1,5 Kg ferro , 0,70 Kg in alluminio
- 

## MONTAGGIO

---

**Attrezzatura:** non è richiesta alcuna attrezzatura  
Liberate dall'imballo il solleva coperte, quindi incastrare le estremità dei tubi , inserendo la parte più stretta in quella più larga come da immagine a lato. Assicurarsi di inserire fino al termine gli innesti

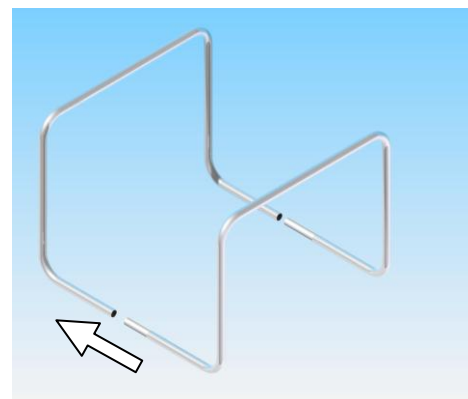

## MANUTENZIONE

---

L'alzacoperte non richiede particolare manutenzione se non una ordinaria pulizia

---

## USO e PULIZIA

---

Pulire l'alzacoperte con un panno leggermente inumidito con normali detergenti, non abrasivi .

---

## SMALTIMENTO

---

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia ti tutela ambientale e raccolta differenziata.

---

## SICUREZZA

---

- **PORTATA MAX 15 Kg**
- **Usare esclusivamente per gli usi previsti dal fabbricante.**
- **Ogni uso diverso da quello previsto dal fabbricante può arrecare danni alla salute del paziente.**
- **Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati dall'utilizzo scorretto o non previsto nel presente manuale.**
- **Ogni eventuale modifica o rimessa a nuovo deve essere approvata dal fabbricante.**

**AVVERTENZE:** le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.