



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## **LETTINO VISITA MEDICA TRADIZIONALE EXAMINATION COUCH - ALUMINIUM**

**MANUALE D'USO – ISTRUZIONI E MONTAGGIO  
USER MANUAL – ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located

**REF** 27403



Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)  
Made in Italy



## INTRODUZIONE

Ai fini del regolamento (UE) 2017/745, il prodotto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I. Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

Questo modello è stato progettato cercando di contenere eventuali rischi per l'utente in caso di urto involontario, eliminando bordi taglienti, spigoli vivi ecc.

## SICUREZZA

Non è consentito l'utilizzo per scopi estranei alla sua destinazione.

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati da un utilizzo del prodotto in modo scorretto, improprio o non previsto nel presente manuale.

Per ragioni di sicurezza, sostituire tempestivamente, parti usurate o danneggiate.

## MANUTENZIONE / PULIZIA

Il lettino visita a 1 snodo non richiede particolari manutenzioni, tuttavia deve essere controllato il corretto serraggio di tutte le parti mobili, prima dell'impiego.

Per la pulizia può essere utilizzato un panno leggermente inumidito, possono essere utilizzati anche normali detersivi, purché non contengano cloro e suoi composti.

Attenzione:

- Evitare l'uso di acido muriatico o candeggina.

## ASSISTENZA

Nel caso che qualche componente, fuori dall'ordinaria manutenzione, si dovesse deteriorare, rivolgersi al vostro distributore, saranno a vostra disposizione per qualsiasi problema consigliandovi la soluzione più opportuna.

## AVVERTENZE

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

Smaltimento: il prodotto descritto in questo manuale deve essere consegnato a ditte specifiche per la rottamazione.

## INFORMAZIONI GENERALI


Letto da visita con struttura in tubo tondo di alluminio lucido di  $\varnothing$  30 x 2 mm di spessore; provvisto di alzatesta elevabile e regolabile manualmente, a 1 snodo e 2 sezioni e rivestito in morbida simil-pelle facilmente lavabile. L'imbottitura è così composta, base in legno truciolare a basso contenuto di formaldeide, spugna in heliocell, di densità kg 25/mc di spessore cm 4, comoda e confortevole.

Modello smontato fornito in kit di montaggio

## SCHEDA TECNICA

Scheda Dimensionale	Mod. Smontato
Dimensione (L x P x H) Cm	176 x 60 x 78
Portata Kg	90
Peso netto Kg	22,0
Peso lordo Kg	27,0
Volume mc	0,21
Numero colli	1
Imballo (LxPxH) Cm	151 x 19 x 74

## ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

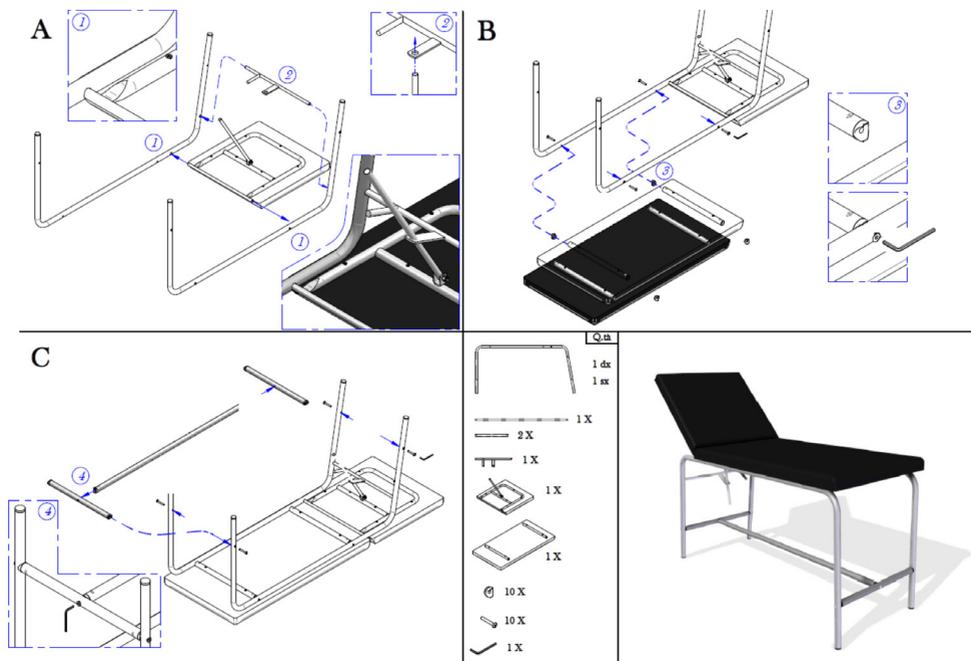

### Simboli:

	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Conservare al riparo dalla luce solare
	Conservare in luogo fresco ed asciutto		Data di fabbricazione
	Fabbricante	<b>REF</b>	Codice prodotto
<b>LOT</b>	Numero di lotto		Leggere le istruzioni per l'uso
<b>CE</b>	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745	<b>MD</b>	Dispositivo medico

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi