

# BARELLE CORSIA PATIENT TROLLEYS



- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

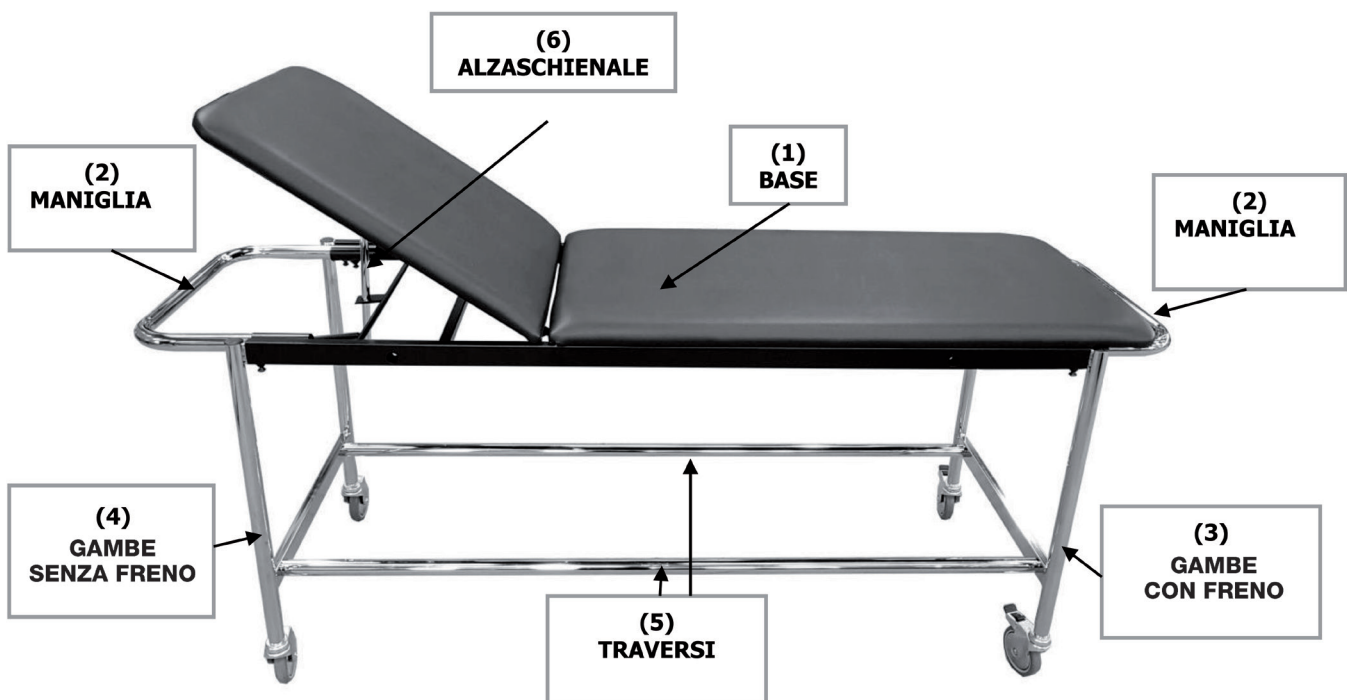


**PRODOTTI:****-27800 Barella fissa****-27801 Barella con parte superiore smontabile****INTRODUZIONE**

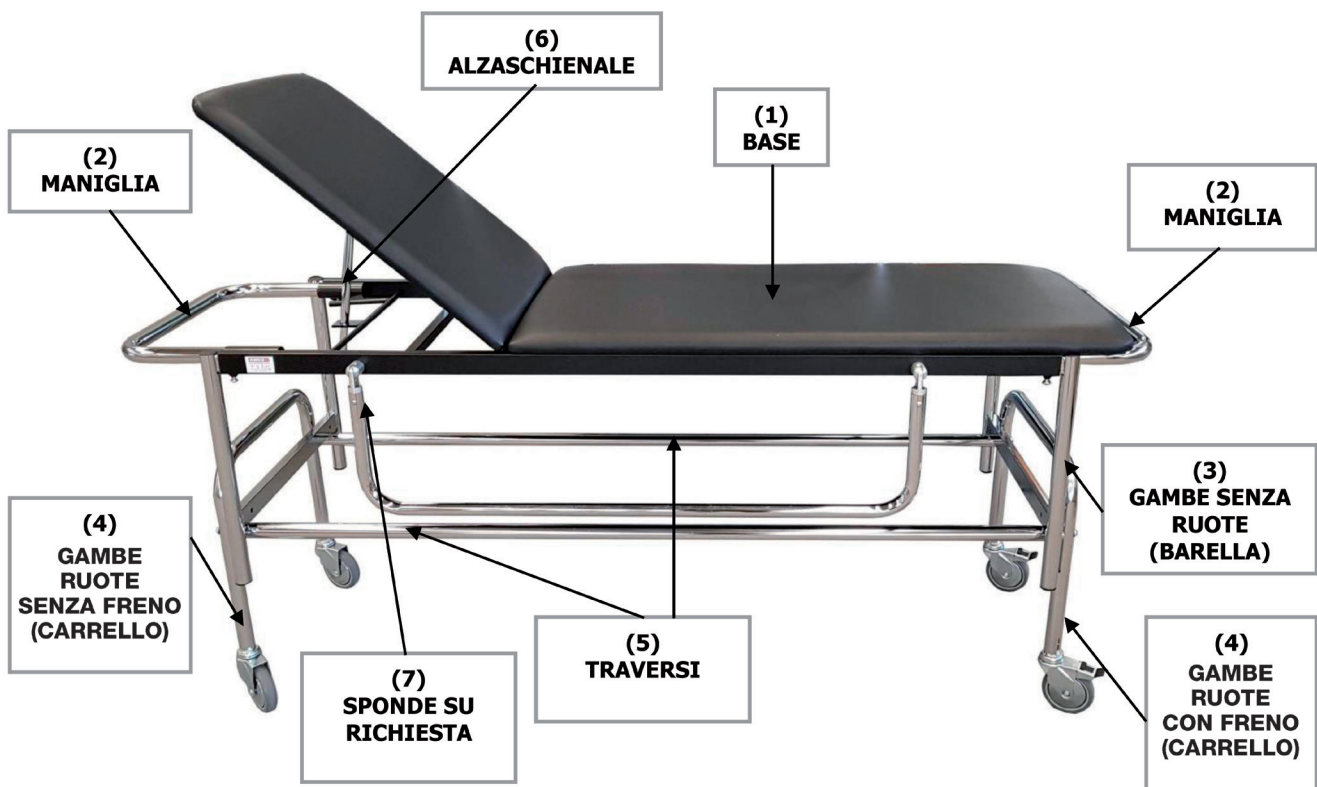
Ai fini del regolamento (UE) 2017/745, il prodotto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I. Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il dispositivo.

**DESCRIZIONE**

La barella è destinata per luoghi ospedalieri ed è realizzata per trasporti semplici del paziente in corsia. La barella è disponibile in due versioni, quella fissa e quella smontabile con la parte superiore asportabile senza ruote completa di carrello inferiore per il trasporto.

**27800 – COMPONENTI**

1	Base barella con imbottitura
2	Maniglie di Testata e pediera inserite nella struttura fissata all'imbottitura
3	N. 1 struttura anteriore Gambe con Ruote Ø 100 mm dotate di freno
4	N. 1 struttura posteriore Gambe con Ruote Ø 100 mm senza freno
5	Traversi di connessione delle gambe
6	Tubetto per schienale
7	Accessori su richiesta: sponde ribaltabili, cestello porta bombola e porta coperta

**27801 – COMPONENTI****BARELLA ASPORTABILE****CARRELLO PER IL TRASPORTO**

1	Base barella con imbottitura
2	Maniglie di Testata e pediera inserite nella struttura fissata all'imbottitura
3	N. 2 strutture Gambe senza ruote (barella)
4	N. 2 strutture curvate con ruote da Ø100
5	Traversi di connessione delle gambe (carrello)
6	Tubetto per schienale
7	Accessori su richiesta: sponde ribaltabili, cestello porta bombola e porta coperta

**Sacchetto con materiale di montaggio per cod.27800/27801:**

- N.4 viti TBE 8 x 50 + ranelle M8
- N.1 TE 6 x 35 + n.1 dado
- N.1 Chiave a brugola da 5

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:**

Iniziare la fase di montaggio predisponendo un piano orizzontale di lavoro stabile.

Fare attenzione ad inserire le gambe con ruote dotate di freno dal lato dei piedi e di conseguenza le gambe con le ruote senza freno dal lato dello schienale.

**ALLENTARE LE VITI DALLA STRUTTURA FISSATA ALL'IMBOTTITURA.**

**27800:** Prendere le gambe dotate di ruote con freno (3) ed inserirle nella struttura dal lato dei piedi.

**27801:** Prendere le gambe senza ruote (3) ed inserirle nella struttura dal lato che si preferisce (le gambe sono identiche).

**27800****27801**

Inserire le gambe e riavvitare.

(Attenzione! La vite non evidenziata serve per regolare la sporgenza del maniglione, vedi istruzioni nell'ultima riga)

**RIPETERE LA STESSA OPERAZIONE DAL LATO OPPOSTO.**

**27800:** Allentare le viti, inserire le gambe dotate di ruote senza freno (4) ed inserire nella struttura dal lato dello schienale.

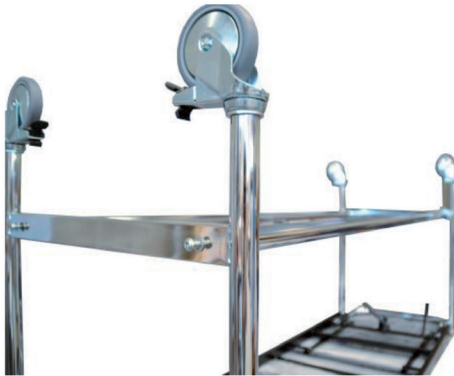
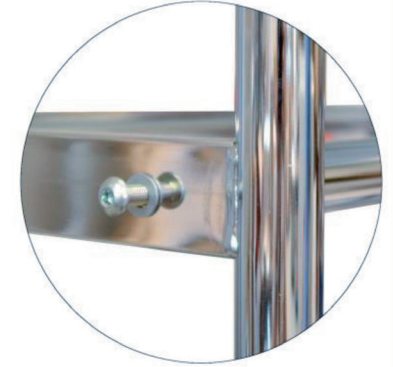
**27801:** Allentare le viti, inserire le gambe senza ruote (3) ed inserire nella struttura dal lato opposto a quello precedente.

**27800/27801:** Prendere la bacchetta dell'alza schienale (6), inserirla nell'apposita sede e fissarla attraverso vite esagonale e bullone forniti in dotazione.



**27800:** Prendere i due tubi traversi (5) e fissarli alle gambe attraverso le viti TBE con le relative ranelle in dotazione.

**27801:** Prendere i due tubi traversi (5) e fissarli alle gambe curve (4) dotate di ruote del carrello attraverso le viti TBE con le relative ranelle in dotazione.

**27800****27801**

Infine la sporgenza delle maniglie deve essere regolata in entrambi i modelli.

Allentare le viti ed estrarre la maniglia (2) in modo da permettere l'inserimento delle mani per la spinta della barella. Stringere le viti una volta trovata la posizione desiderata.



**Attenzione! SALITA E DISCESA CONSENTITA SOLO CON LE RUOTE BLOCCATE.**

### **SCHEDA TECNICA**

	<b>27800</b>	<b>27801</b>
<b>Misure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cm 181 x 55 x 79 h</li> <li>• Regolazione schienale da 0° a max. 55°</li> <li>• Scatola 198 x 17 x 64 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cm 181 x 55 x 80 h.</li> <li>• Solo barella cm 51 h (cm 47 h telaio, materasso escluso)</li> <li>• Solo carrello cm 53.5 h</li> <li>• Regolazione schienale da 0° a max. 55°</li> <li>• Scatola 198 x 17 x 64 cm</li> </ul>
<b>Peso</b>	Scatola 198 x 17 x 64 cm	36 kg (39 kg con scatola)
<b>Portata massima</b>	110 kg	110 kg

### AVVERTENZE D'USO

- Verificare che i dadi del bloccaggio siano ben stretti.
- Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Non adatto all'uso in ambienti aperti.
- Quando si regola l'altezza del lettino e dello schienale verificare che nessuno inserisca mani, gambe o altro all'interno dell'area di spostamento: **RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO!**
- Spostare il letto senza sollevarlo da terra.
- Se il letto è dotato di ruote, accertarsi prima di spostarlo che non ci siano ruote frenate.

### MANUTENZIONE E PULIZIA

Utilizzare solo ricambi originali.

Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.

Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.

Lavare le superfici in acciaio inox con acqua saponata ed usare disinfettanti appositi.











Risciacquare con un panno bagnato ed asciugare con cura.

Non versare sulle superfici detergenti a base di cloro o ammoniaca, sostanze grasse ed oleose.

Non usare per la pulizia utensili contenenti ferro. Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.

### Indicazioni di pulizia per il tessuto:

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare. Attenzione: In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire.

	Conservare al riparo dalla luce solare		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Codice prodotto		Leggere le istruzioni per l'uso		Fabbricante
	Data di fabbricazione		Numero di lotto		Dispositivo medico
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso				

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.