



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TAPPETINO IN SILICONE SILICONE MAT

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Destinazione d'uso/funzione

- il prodotto deve essere utilizzato per i processi di sterilizzazione in autoclave.
- il tappetino in silicone consente di tenere fermi gli strumenti nel vassoio di sterilizzazione in modo ben saldo ma delicatamente.
Può essere utilizzato intero o tagliato per adattarlo al vassoio. I fori migliorano la circolazione dell'aria, aiutando il processo di asciugatura.

Specifiche componenti

Il tappetino è fabbricato in silicone

Pulizia/sterilizzazione

Tutti i tappetini in silicone devono essere conservati in ambiente asciutto e senza polvere.
I tappetini in silicone forniti da GIMA S.p.A. non sono sterili al momento della spedizione.

Sterilizzazione a vapore

- Sterilizzatore a vapore conforme alle normative DIN EN 13060 o DIN EN 285
- Temperatura massima di sterilizzazione 134°C/273°F, in conformità con le relative norme e standard.
- Il tempo di sterilizzazione (tempo di esposizione alla temperatura di sterilizzazione) minimo 5 min. a 134°C/273°F.

Detergente

Quando si scelgono detergente e disinfettante assicurarsi che non contengano i seguenti componenti:

- Acidi organici, ossidanti o minerali (Ph massimo consentito 9.5, si consiglia un detergente neutro/enzimatico)
- Forti alcali
- Solventi organici
- Agenti ossidanti (es. perossido di idrogeno)
- Alogeni (cloro, iodio, bromo)
- Idrocarburi aromatici/alogenati
- Sali metallici pesanti

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

	Conservare in luogo fresco ed asciutto		Numero di lotto
	Codice prodotto		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Fabbricante
	Conservare al riparo dalla luce solare		Leggere le istruzioni per l'uso
	Dispositivo medico		Non sterile
	Data di fabbricazione		

REF 37320 - 37321 - 37323



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan

