



Comoda Mod. VC 100

Cod. 90100100



Comoda Mod. VC 200

Cod. 90100200



Comoda Mod. VC 400

Cod. 90100400



Comoda Mod. VC 500

Cod. 90100500



Prodotto Conforme **CE**

MANUALE D'USO

VAIMAS SRL








Via Volpato, 39
36035 Marano Vicentino VI


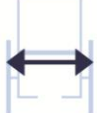


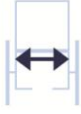


AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Direttiva 93/42 CEE
Ausili Medici Classe I

Rev. 1,4

DIMENSIONI (in cm) – PESI E PORTATE (in kg)

							
VC100	39-43-48-53	43	53	52	21	da 44 a 60	da -10° a 70°
VC200	39-43-48-54	43	53	50	21	da 44 a 60	da -10° a 70°
VC400	39-43-48-55	43	53	50	21	da 44 a 60	da -10° a 70°
VC500	39-43-48-56	43	53	50	21	da 44 a 60	da -10° a 70°

							
VC100	da 0 a 70°	larghezza sedile +12	105	105	67	20	100
VC200	da 0 a 70°	larghezza sedile +11	105	105	78	21	100
VC400	da 0 a 70°	larghezza sedile +22	105	105	93	26	120
VC500	da 0 a 70°	larghezza sedile +22	105	105	93	26	120

INFORMAZIONI GENERALI

La sedia da comodo sono state realizzate per consentire il trasporto e la mobilità di persone invalide in ambienti domestici o comunitari.

La comoda permette al paziente di spostarsi (da solo o con accompagnatore a seconda della versione) con facilità e destrezza grazie alle ruote piroettanti anteriori o posteriori, inoltre può essere usata momentaneamente come WC oppure essere inserita direttamente sul WC domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Caratteristiche comuni ai vari modelli

1. Struttura in tubo acciaio cromato.
2. Sedile imbottito in similpelle con gomma piuma indeformabile.
3. Schienale imbottito, sagomato, anatomico reclinabile.
4. Braccioli imbottiti e fiancate estraibili.
5. Bacinella in PVC su feritoie in plastica.
6. Pedane indipendenti regolabili in altezza, con poggia polpacci imbottiti.
7. Maniglione di accompagnamento.



1.2 Caratteristiche specifiche per modello


VC\100

- a. ruote anteriori piroettanti da Ø100
- b. ruote posteriori da Ø100 piroettanti con freno integrato



VC\200

- c. ruote anteriori da Ø200 fisse
- d. freno a leva agente sulle ruote anteriori
- e. ruote posteriori da Ø200 piroettanti.

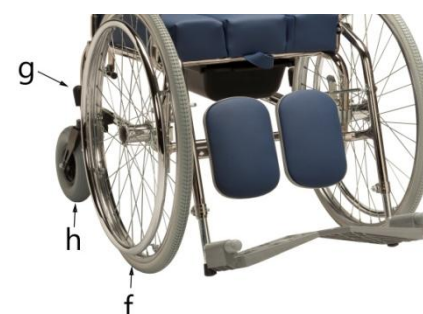

VC\400

- f. ruote anteriori 24" con corrimano per autospinta
- g. freno a leva agente sulle ruote anteriori
- h. ruote posteriori Ø200 piroettanti.



VC\500

- i. ruote anteriori piroettanti da Ø200
- j. freno a leva agente sulle ruote posteriori
- k. ruote posteriori 24" con corrimano per autospinta

Componenti

- Estrarre dall'imballo in cartone la comoda completa ed i componenti
- Togliere gli imballi dei braccioli
- Rimuovere la striscia di carta che avvolge il sedile e la bacinella W.C.

Attrezzature

Per il montaggio della comoda servono due chiavi fisse da 10 (non in dotazione)

Montaggio schienale

Per montare lo schienale é sufficiente inserirne le due estremità nei tubetti rastremati, quindi una volta fatti coincidere i fori infilare le viti M6 e procedere al serraggio delle stesse con due chiavi da 10.

Montaggio braccioli

Per montare i braccioli é sufficiente inserirne le due estremità negli appositi alloggiamenti tenendo premuto il piolo anteriore (k) per farlo poi scattare una volta in sede.



Regolazione delle pedane

Aprire il morsetto eccentrico (a) tirando l'apposita levetta; far ruotare, mantenendolo in asse, il portapedana (b) fino alla posizione frontale; bloccare il morsetto. Ruotare le pedane in plastica (c) fino alla posizione orizzontale.



Regolazione del portapedana

- Per elevare il gruppo porta pedana, accompagnarlo verso l'alto tenendo premuta la levetta (d); raggiunta la posizione voluta, rilasciare la levetta, il bloccaggio è automatico.
- Per abbassarlo, agire sulla levetta (d) tenendola premuta sino al raggiungimento della posizione desiderata.


Regolazione dello schienale

- Per reclinare lo schienale:
 1. svitare i morsetti con volantino (m) posti sul retro
 2. far arretrare lo schienale nella posizione desiderata spingendo all'indietro
 3. richiudere bene i morsetti

- Per richiamare lo schienale

1. aprire i morsetti, e spingere lo schienale nella posizione desiderata

2. chiudere bene i morsetti.

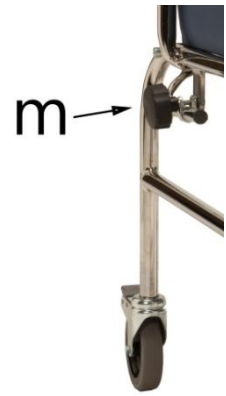

Prima dell'utilizzo controllate che:

- Lo schienale sia bloccato
- I freni siano funzionanti
- Le ruote piroettanti girino
- Entrambe le pedane siano poste correttamente e ben fissate
- Il tappo e la bacinella WC siano inseriti correttamente

Indicazioni per un utilizzo in sicurezza:

- **E' assolutamente proibito appoggiarsi con i piedi sulle pedane** in plastica per sedersi e alzarsi
- **Non sedersi sul bordo frontale della sedia** per raggiungere oggetti od appigli in fase di seduta e alzata
- **Non abbandonare la presa con le due mani dal maniglione su discese superiori al 10%, con il paziente seduto sulla comoda**
- **Tenere la sedia sempre lontana da fonti dirette di calore**
- Se il paziente viene lasciato senza assistenza, anche solo momentaneamente, deve essere azionato il freno di bloccaggio delle ruote
- Eseguire i controlli periodici previsti dal manuale d'uso
- **La portata massima è di KG100**

Si declina ogni responsabilità per usi impropri della comoda.

MODALITA DI SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

PULIZIA


Pulire completamente la sedia settimanalmente con prodotti detergenti, non usare acidi, benzine, diluenti o acqua ragia ma normali prodotti di pulizia.

Pulire immediatamente dopo ogni utilizzo come WC la bacinella ed il sedile.

Entrambe le ruote vanno frenate poiché frenandone una solamente in presenza di pendenza anche minima si potrebbe avere uno sbilanciamento della carrozzina tale da non garantire la sicurezza dell'utente.

Il Modello VC 100 dispone di freni integrati nei gruppi ruote posteriori:

- per frenare, premere a fondo verso il basso la parte posteriore della levetta di comando sino a portare freno in posizione di bloccaggio.
- per sbloccare i freni, riportare la levetta in posizione orizzontale premendo con il piede la parte anteriore della stessa.

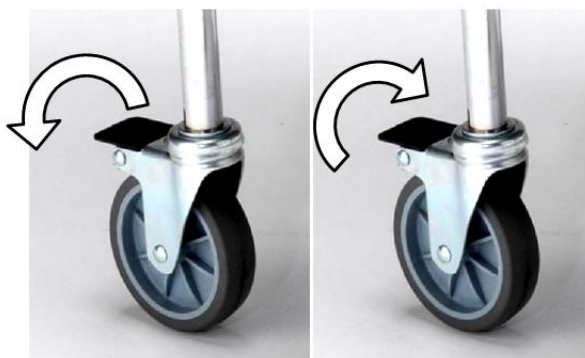

I Modelli VC 200, VC 400, VC 500 sono provvisti di freni a leva agenti sulle ruote fisse; per frenare, premere a fondo la leva di comando sino a portare il freno in posizione di bloccaggio.

Per sbloccare i freni, riportare la leva in posizione di riposo.



ATTENZIONE. Per evitare danneggiamenti, le leve di comando freni provviste di pomello in materiale plastico, devono essere usate solo con le mani.

Istruzioni d'uso

- Il paziente per sedersi o alzarsi deve essere sempre aiutato e assistito.
- Per agevolare l'alzata e la seduta del paziente, sollevare le pedane in plastica facendole ruotare.
- Fate sedere correttamente il paziente sulla comoda, facendo appoggiare bene la schiena allo schienale, il bacino sul cuscino e le gambe sul sedile.
- Fate attenzione a regolare correttamente i portapedana, in maniera tale che le ginocchia non siano troppo alte o troppo basse rispetto al sedile, ciò consentirà una corretta circolazione del sangue sugli arti inferiori.
- Per spostarsi sbloccare le ruote posteriori e spingere la comoda con il maniglione posteriore dello schienale.

- Porre molta attenzione nel percorrere salite o discese, nell'affrontare eventuali piccoli scalini e negli ambienti con limitate possibilità di manovra.
- Evitare l'uso della comoda su superfici sconnesse.
- Fare attenzione alla possibilità che i vestiti si impiglino sulle parti in movimento.
- Per salire o scendere lateralmente, togliere un bracciolo afferrandolo con una mano nella parte superiore avvolgendo anche la parte metallica, premere il piolo e sfilare verso l'alto.
- Per rimetterlo innestare il bracciolo fino a far scattare la molla con il piolo.

Utilizzo WC

Per l'utilizzo del WC: frenare la comoda, rimuovere il tappo appoggiando una mano sul sedile, afferrare l'asola del tappo asportabile e tirare verso l'alto. Per rimuovere la bacinella WC dalla posizione posteriore od anteriore estrarre la bacinella afferrandola per l'impugnatura.

MANUTENZIONE

Controlli

	Settimanale	Mensile	Annuale
Gomme	✓		
Freni	✓		
Pulizia tappezzerie	✓		
Pulizia bacinella WC	✓		
Regolazione pedane	✓		
Gioco ruote piroettanti		✓	
Innesto braccioli		✓	
Fissaggio pedane		✓	
Fissaggio tappezzerie		✓	
Fissaggio braccioli		✓	
Centraggio ruote posteriori		✓	
Revisione completa			✓

Ruote anteriori

- Per togliere le ruote anteriori, svitare la vite da M12 con una chiave da 19, quindi estrarre il perno ad espansione dal tubo. Per rimetterla procedere al contrario e fissare bene la vite.
- Per togliere la ruota dalla forcella, svitare il dado da M8, trattenendo la vite con le chiavi da 13.

Freni

In caso di sostituzione delle ruote, o di pneumatici con battistrada usurato, può rendersi necessaria la regolazione dei freni a leva; agire come segue:

- In caso di ruota pneumatica, accertarsi che la stessa sia correttamente gonfiata
- Allentare il dado posto nella parte interna del tubo che supporta il freno
- Fare scorrere il gruppo freno verso la ruota in modo da ottenere una corretta frenatura
- Serrare nuovamente il dado

N.B. La taratura dei freni va necessariamente eseguita su entrambi i lati in modo che la frenata risulti simmetrica

GARANZIA

I prodotti Vaimas sono garantiti contro difetti di fabbricazione o di materiale per un durata di **mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data di consegna/acquisto, rilevabile da un regolare documento fiscale** (fattura o scontrino).

Questa Garanzia è espressamente limitata alla riparazione o alla sostituzione gratuita dei pezzi (manodopera esclusa) riconosciuti difettosi presso il Costruttore o le officine autorizzate dal Costruttore.

Qualsiasi sostituzione potrà essere effettuata con dei pezzi/componenti nuovi oppure riparando le parti, dopo un'attenta valutazione del Costruttore o del suo distributore.

Per l'applicazione della Garanzia è necessario rivolgersi al Vostro distributore ed esibire il documento fiscale (scontrino o fattura) che comprovi la reale applicazione della presente Garanzia (data d'acquisto/consegna del prodotto).

Le spese di spedizione e d'imballo, così come le spese di trasferimento, sono a carico dell'acquirente.

Per l'eventuale rientro della merce è necessario chiedere l'autorizzazione.

È a discrezione del Vostro distributore addebitarvi tali spese in base alle condizioni di vendita praticate.

La Garanzia si applica a condizione che:

- il prodotto sia riparato presso il Costruttore o un suo distributore
- le manutenzioni periodiche menzionate nel Manuale d'uso siano state svolte regolarmente

Questa Garanzia non potrà essere applicata in caso di:

- incidenti, cadute, urti, uso improprio
- manutenzione errata o insufficiente
- smontaggio, riparazione o modifiche effettuate da officine non autorizzate
- mancata conservazione della fattura o scontrino che comprovi l'avvenuto acquisto del prodotto

La Garanzia non copre:

- la manutenzione ordinaria, le regolazioni, la programmazione e le verifiche periodiche
- la sostituzione di pezzi sottoposti a normale usura dovuta all'uso del carrozzeria
- tutte le spese non previste dalla presente Garanzia Contrattuale, o dalla Garanzia Legale, in particolare le spese conseguenti al mancato utilizzo

Gli interventi realizzati a titolo di Garanzia non hanno l'effetto di prolungarla, salvo particolari disposizioni.