


## MATERASSO BARIATRICO – BARIAFORM

*Ref. MA-200/XXX*

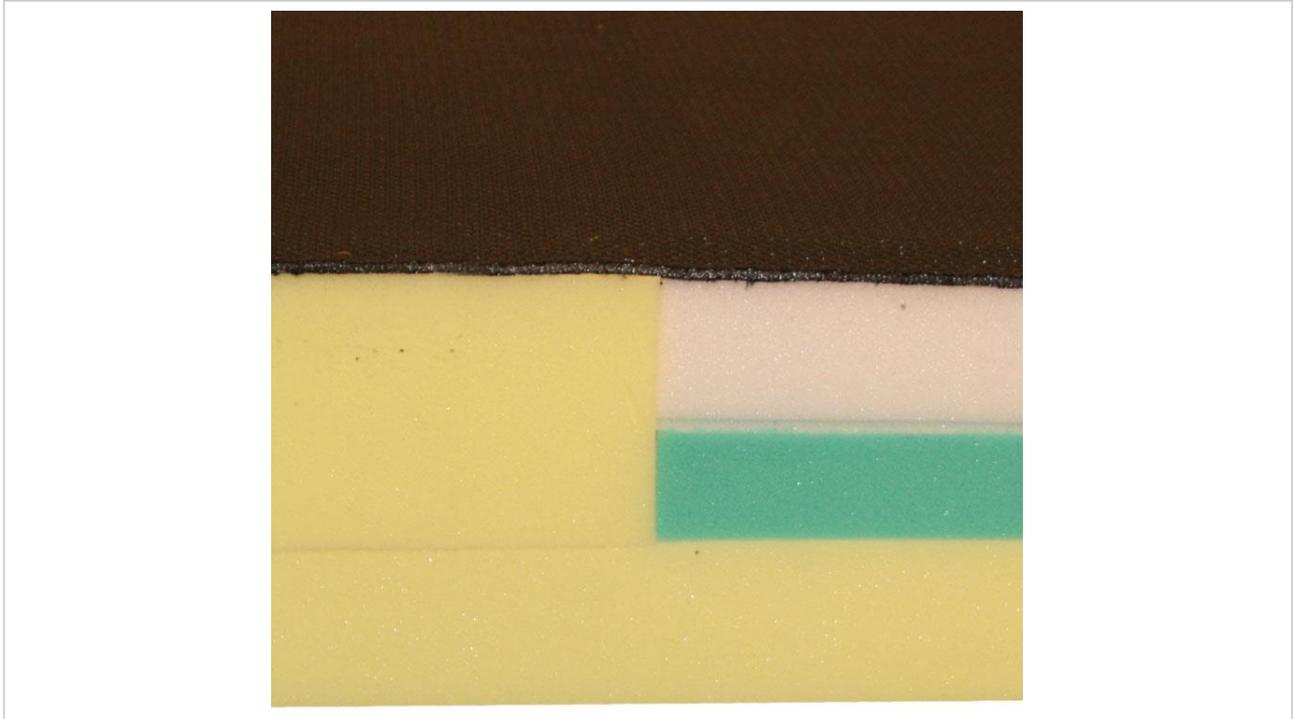

### Descrizione

Materasso bariatrico realizzato con materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni a livello delle diverse zone corporee.

Costituito superficialmente da un tessuto in maglia 3D di spessore 7 mm e in Poliestere. Uno strato di mousse viscoelastica a memoria di forma con densità  $80 \text{ kg/m}^3$ , uno strato centrale ad alta resilienza in Poliuretano espanso con densità  $37 \text{ kg/m}^3$ , due sostegni laterali e una base in Poliuretano espanso ad alta resilienza con densità  $43 \text{ kg/m}^3$ . I sostegni non sono presenti nella versione MA-200/90.

I materassi Bariaform sono disponibili nelle varianti di misura a richiesta e sono tutti corredati di fodera integrale Pharmatex (Poliuretano e Poliestere) con cerniera su tre lati.

### Destinazione d'uso


Materasso indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti allettati obesi.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y033306	
Identificativo di Registrazione BD/RDM		
Materasso MA-200/90	1562564/R	
Materasso MA-200/120	1562574/R	
Materasso MA-200/140	1562575/R	
Materasso MA-200/160	1562576/R	
Codice Classificazione ISO	03.33.06.006	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2013	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	Pharma Ouest Industries	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

## Caratteristiche Tecniche – Materasso

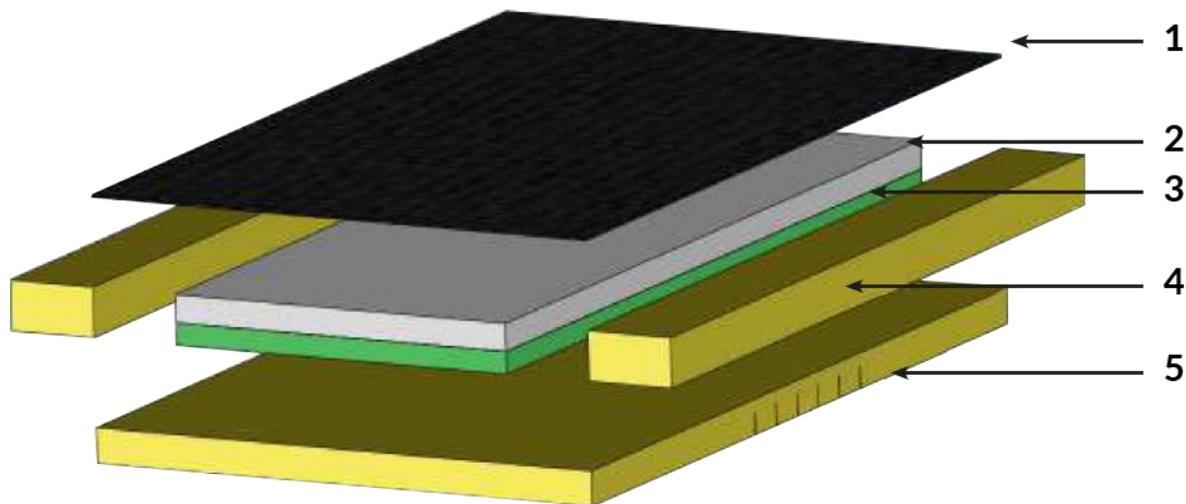

Materiale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tessuto in Poliestere.</li> <li>2. Strato in mousse viscoelastica, densità 80 kg/m<sup>3</sup>.</li> <li>3. Strato in Poliuretano espanso, densità 37 kg/m<sup>3</sup>.</li> <li>4. Sostegni in Poliuretano espanso, densità 43 kg/m<sup>3</sup>.</li> <li>5. Base in Poliuretano espanso, densità 43 kg/m<sup>3</sup>.</li> </ol>		
Varianti	Dimensioni	Portata	Peso
MA-200/90	198 x 90 x 20 cm	Da 130 a 180 kg	25 kg
MA-200/120	198 x 120 x 20 cm	Da 130 a 270 kg	33 kg
MA-200/140	198 x 140 x 20 cm	Da 130 a 270 kg	40 kg
MA-200/160	198 x 160 x 20 cm	Da 130 a 270 kg	45 kg
Conformità resistenza al fuoco	EN 597-1 ; EN 597-2		

## Caratteristiche Tecniche – Fodera

Materiale	Tessuto Pharmatex: Poliestere (51 %) – Poliuretano (49 %). Superficie di appoggio antiscivolo.
Conformità resistenza al fuoco	EN 597-1 ; EN 597-2

## Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo asciutto e pulito. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
PULIZIA E DISINFEZIONE	Materasso: lavabile con panno morbido umidificato. Disinfezione con vapori di formaldeide a 45 °C per 3 ore. Fodera: lavabile fino alla temperatura di 60 °C. Non candeggiare. Non stirare. Lavabile a secco.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\* Per ulteriori dettagli sulle indicazioni descritte attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
MA-200/XXX**	Materasso bariatrico Bariaform con fodera di rivestimento.	1

\*\*la confezione contiene 1 materasso fra le varianti di misura disponibili.

## Componenti opzionali

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
MA-20090F	Fodera per materasso MA-200/90	1
MA-200120F	Fodera per materasso MA-20/120	1
MA-200140F	Fodera per materasso MA-200/140	1
MA-200160F	Fodera per materasso MA-200/160	1

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.

