

GERMOCID SOAPANTISETTICO LIQUIDO PER LA DISINFEZIONE
DELLE MANI E DELLA CUTE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. Min. Sal. n° 16.161

COMPOSIZIONE:**100 g di prodotto contengono:**

Cloruro di
Alchilbenzildimetilammonio.....0,5 g
Ortofenilfenolo.....0,5 g
Glicerina, Profumo,
coformulanti , acqua depurata q.b.a... 100,0 g

ASPETTO:

Liquido chiaro

PROFUMO:

Composto

BIODEGRADABILITA':

Detergente conforme al regolamento CE n° 648/2004

ATTIVITA'*** AZIONE DISINFETTANTE**

L'Alchilbenzildimetilammonio Cloruro associato a
O-Fenilfenolo garantisce un completo spettro d'azione nei
confronti di:

- batteri gram + e gram -
- funghi

*** AZIONE DETERGENTE**

GERMOCID SOAP contiene, oltre ai principi attivi
disinfettanti, anche sostanze altamente detergenti non
aggressive per la cute.

GERMOCID SOAP grazie al suo PH (5,5), tipico della pelle
integra ed al suo contenuto in glicerina rende morbida la cute e
ne rispetta il manto lipidico. E' quindi particolarmente indicato
per il medico e il personale ausiliario in quanto consente
frequenti lavaggi.

E' consigliabile in tutti i casi in cui si richieda attività sulla
flora microbica cutanea.

INDICAZIONI D'USO:

Per la disinfezione delle mani del chirurgo prima degli
interventi operatori; delle mani del personale medico per
evitare infezioni crociate. Per la disinfezione del paziente
prima dell'intervento chirurgico.

GERMOCID SOAP viene utilizzato tal quale premendo la
pompetta (che eroga una dose fissa di 2,5 ml).

Inumidire le mani, erogare GERMOCID SOAP e lavarle a
lungo usando lo spazzolino per pulire a fondo le unghie.
Risciacquare.

Per la disinfezione delle mani prima di interventi chirurgici
ripetere il lavaggio prolungandolo per 2 minuti .

TOLLERABILITA':	E' ben tollerato dalla cute.
AVVERTENZE:	<p>S2: Conservare fuori dalla portata dei bambini S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. S45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).</p> <p>Da non usarsi su cute lesa e mucose. Il prodotto non è compatibile con saponi e tensioattivi anionici. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.</p>
CONTROINDICAZIONI:	Ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto.
VALIDITA':	5 anni – confezione integra.
CONFEZIONI:	<p>Flacone da 1 lt in cartoni da 12 flaconi Dimensioni esterne cartone: mm330x245x 250 Bancale da 40 scatole (4 piani da 10 scatole) BAR CODE: 8009110025028 TIFF CODE 08009110025028 CODICE PRODOTTO S521</p> <p>Flacone da 300 ml in cartoni da 12 flaconi Dimensioni esterne cartone: mm243x186x168 Bancale da 108 scatole (6 piani da 18 scatole) EAN CODE: 8009110029989 TIFF CODE 08009110029989 CODICE PRODOTTO S555</p> <p>Tanica da 3000 ml in cartoni da 6 taniche Dimensioni esterne cartone: mm340x257x2500 Bancale da 24 scatole (4 piani da 6 scatole) BAR CODE: 8009110021099 CODICE PRODOTTO S523</p>
MODALITA' DI CONSERVAZIONE:	Conservare nella confezione integra in luogo asciutto e al riparo da fonti di calore
PRODUTTORE	<p>Titolare Registrazione e Officina di produzione Germo S.p.A. – Via Giotto, 19/21 – Cormano (Mi) – tel 02.66301938 – fax 02.66301939 www.germo.it info@germodis.com</p>