

Manuale per l'uso e la manutenzione delle Poltrone Imbottite



Nuova Blandino S.r.l.
Strada Cebrosa, 24 - 10036 Settimo Torinese
Torino Italy
Tel. +39 011 2625140 - fax +39 011 2625141
www.nuovablandino.com - infonb@nuovablandino.com



INDICE

1. Introduzione - Simbologia
2. Modelli: GR201- 202
3. Modelli: GR204- 205
4. Spedizione
 - Montaggio
 - Specifiche di utilizzo
 - Informazioni per la sicurezza
5. Denominazione dei componenti
6. Controlli prima dell'utilizzo
 - Uso della sedia a rotelle
 - Freno - Freno a pressione
 - Ruota con freno
7. Regolazioni
 - Parapolpaccio
 - Braccioli
 - Braccioli desk/regolabili in altezza
8. Assemblaggio e rimozione del bracciolo
9. Regolazione schienale
10. Alzagambe regolabile
11. Regolazione pedana in altezza
12. Manutenzione della sedia a rotelle
13. Misure
14. Accessori
15. Norme generali sulla sicurezza
16. Peso trasportabile
 - Trasferimento dalla sedia a rotelle
17. Attraversamento di strettoie
 - Utilizzo in ascensore e su ponti elevatori
 - Trasporto in auto o su altri mezzi di trasporto
18. Dichiarazione di conformità
19. Garanzia
20. Targhetta e marcatura CE
21. Registro manutenzione
24. Note informative
25. Spazio per il rivenditore

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Introduzione

Simbologia

Spesso, durante la lettura del manuale d'uso, potrete imbattervi in questi simboli di particolare importanza o interesse.



Indica di porre particolare attenzione pericolo in generale



chiave per dadi o bulloni da 6 mm.



chiave a brugola per viti con esagono cavo da 6

La gamma di prodotti che verrà di seguito proposta, GR 201 202 204 205 è il risultato di un'esperienza ventennale che ha visto impegnata la nostra azienda in un processo di continua ricerca volta a migliorare ed affinare tecniche di progettazione e realizzazione dei prodotti; tutto ciò è stato possibile avvalendosi di Tecnici Ortopedici e consulenze da parte di esperti del settore della Riabilitazione, Educazione ed Assistenza.

Questo manuale fornisce le istruzioni per l'uso di questo modello. Leggete attentamente le istruzioni che seguono, prima di utilizzare l'ausilio per la prima volta.

La particolare cura posta nella progettazione e nella fabbricazione di questi prodotti, Vi assicura un elevato grado di sicurezza e comfort.

Utilizzate la Vostra sedia a rotelle seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale.

Introduzione - Modelli

Modello GR 201: poltrona imbottita ad autospinta.

Indicazioni cliniche prevalenti: indicata per persone anziane con ridotta capacità di deambulazione, in grado di compiere brevi percorsi interni ed esterni.

Allestimento di base: disponibile in diverse misure, dotata di schienale avvolgente e reclinabile predisposto ad accogliere situazioni di instabilità del tronco, braccioli estraibili, piano di seduta wc, vaschetta estraibile, pedane elevabili regolabili in altezza dotate di poggia gambe imbottiti.

Accessori: possibilità di personalizzazione attraverso la scelta di accessori che consentono di rispondere ad esigenze di comfort e sicurezza: appoggiatesta, braccioli estraibili regolabili in altezza, tavoli di diverse caratteristiche e piano seduta ad "U"; per ulteriori informazioni vedi scheda tecnica.

Modello GR 202: poltrona imbottita ad autospinta, con ruote anteriori grandi per favorire le manovre in spazi interni ridotti.

Indicazioni cliniche prevalenti: indicata per persone anziane con ridotta capacità di deambulazione che possono presentare condizioni di grave cifosi dorsale, in grado di esercitare un controllo attivo del tronco e compiere brevi percorsi in ambienti interni ed esterni.

Allestimento di base: disponibile in diverse misure, dotata di schienale avvolgente e reclinabile predisposto ad accogliere situazioni di instabilità del tronco, braccioli estraibili, piano di seduta wc, vaschetta estraibile, pedane elevabili regolabili in altezza dotate di poggia gambe imbottiti.

Accessori: possibilità di personalizzazione attraverso la scelta di accessori che consentono di rispondere ad esigenze di comfort e sicurezza: appoggiatesta, braccioli estraibili regolabili in altezza, tavoli di diverse caratteristiche e piano seduta ad "U"; per ulteriori informazioni vedi scheda tecnica.

Introduzione - Modelli

Modello GR 204: poltrona imbottita a quattro ruote piroettanti da Ø100 mm.

Indicazioni cliniche prevalenti: indicata per persone anziane con ridotta capacità di deambulazione, che necessitano dell'assistenza di un accompagnatore specie in ambienti dagli spazi interni ridotti.

Allestimento di base: disponibile in diverse misure, dotata di schienale avvolgente e reclinabile predisposto ad accogliere situazioni di instabilità del tronco, braccioli estraibili, piano di seduta wc, vaschetta estraibile e pedane elevabili regolabili in altezza dotate di poggia gambe imbottiti.

Accessori: possibilità di personalizzazione attraverso la scelta di accessori che consentono di rispondere ad esigenze di comfort e sicurezza: appoggiatesta, braccioli estraibili regolabili in altezza, tavolo e piano di diverse caratteristiche, piano seduta ad "U"; per ulteriori informazioni vedi scheda tecnica.

Modello GR 205: poltrona imbottita a quattro ruote da Ø200 mm di cui le posteriori piroettanti per favorire le manovre in spazi interni molto ridotti .

Indicazioni cliniche prevalenti: indicata per persone anziane con ridotta capacità di deambulazione che necessitano dell'assistenza di un accompagnatore.

Allestimento di base: disponibile in diverse misure dotato di schienale avvolgente e reclinabile predisposto ad accogliere situazioni di instabilità del tronco, braccioli estraibili, piano di seduta wc, vaschetta estraibile, pedane elevabili regolabili in altezza dotate di poggia gambe imbottiti.

Accessori: possibilità di personalizzazione attraverso la scelta di accessori che consentono di rispondere ad esigenze di comfort e sicurezza: appoggiatesta, braccioli estraibili regolabili in altezza, tavolo di diverse caratteristiche e piano seduta ad "U"; per ulteriori informazioni vedi scheda tecnica.

Spedizione

Tutti i prodotti Nuova Blandino vengono verificati in Azienda per escludere difetti e sono quindi imballati in cartoni speciali.

Vi preghiamo perciò di controllare l'ausilio subito dopo il ricevimento, per verificare eventuali danni occorsi durante il trasporto, e in presenza del trasportatore.

Nel caso in cui si dovesse rilevare che l'ausilio è stato danneggiato durante il trasporto, i danni devono essere denunciati immediatamente, facendo riserva scritta sulla bolla di ritiro.

Occorre quindi provvedere all'invio in porto Franco a Nuova Blandino S.r.l - entro 8 giorni dalla data di ricevimento - delle parti danneggiate, se queste sono smontabili, o dell'intera sedia, unitamente ad una copia della bolla di ritiro.

Il riconoscimento del danno da parte nostra non può avvenire nel caso di mancata osservazione di questa procedura, o di segnalazione del danno successivamente al ricevimento.

Montaggio

Il tecnico ortopedico specializzato vi consegnerà la vostra sedia a rotelle pronta per l'uso, adattata alle vostre esigenze personali.

Specifiche di utilizzo

La vostra sedia è stata progettata per essere utilizzato in ambiente chiuso. Essa ha esclusivamente lo scopo di trasportare una persona sul sedile con i poggiatesta e le

parti laterali montate, e non funge da mezzo di trazione, di trasporto o altro.

Informazioni sulla sicurezza

Tutte le informazioni per un utilizzo sicuro della sedia a rotelle sono riportate nella seconda parte di questo manuale.

Denominazione dei componenti



1. Schienale imbottito reclinabile
2. Bracciolo estraibile
3. Sedile wc
4. Manopola reclinazione schienale
5. Ruota posteriore piena
6. Freno acciaio
7. Leva regolazione alzagambe
8. Ruota piroettante Ø 175
9. Alzagambe regolabile in altezza
10. Vaschetta estraibile

Controlli prima dell'utilizzo

Prima di utilizzare la poltrona, verificate che tutte le parti siano state correttamente montate e serrate, in particolare i braccioli e le pedane.

Verificate il corretto funzionamento dei freni a pressione. Inserendo i freni su entrambe le ruote, ed imprimendo alle sedie una leggera forza in avanti ed all'indietro: le ruote non devono ruotare.

Uso della sedia a rotelle

Le sedie a rotelle della serie 200 sono ideali per interni.

Utilizzate inizialmente il seggiolone polifunzionale con molta prudenza.

Leggete attentamente la seconda parte del manuale "Informazioni per la sicurezza".

Freno - freno a pressione -

Il freno di stazionamento costituisce uno degli elementi di sicurezza principali di una sedia a rotelle ed è presente come freno a pressione, che agisce direttamente sulle gomme.

I freni devono essere sempre mantenuti in piena efficienza: l'effetto frenante dei freni a pressione può ridursi e non essere garantito se:

- il profilo dei copertoni è usurato
- i copertoni sono bagnati
- la pressione del pneumatico è ridotta

Attenzione:

frenate la Vostra carrozzina con grande cautela quando state andando indietro. Questa cautela va assunta in particolare quando si vai indietro in pendio. Una frenata brusca sugli anelli corrimano o usando le leve dei freni può causare un ribaltamento della carrozzina.

Ruota con freno

La ruota con freno di stazionamento viene attivato dall'accompagnatore tramite una pressione del piede direttamente sulla leva della ruota. Vantaggi: azione frenante indipendentemente dal profilo della gomma.

Azione frenante indipendente dalla pressione della gomma. Utilizzo più sicuro dell'accompagnatore grazie al posizionamento della leva freno.

Regolazioni

Parapolpaccio

Parapolpaccio impedisce lo scivolamento delle gambe dalle pedane.



Attenzione: non sollevare mai la sedia dal parapolpaccio poichè sono elementi mobili.

Braccioli

I braccioli estraibili sono dotati di bracciolo imbottito:

- i braccioli estraibili facilitano il trasferimento dal -la sedia a rotella al letto, alla sedia, etc...
- sostegno laterale del corpo



Attenzione: non sollevare mai la sedia dai braccioli. La sedia a rotelle deve essere utilizzata solo quando i braccioli sono montati.

Braccioli desk/regolabili in altezza

Il bracciolo desk permette di avere dei braccioli imbottiti più corti necessari per casi d'impiego specifici. La sedia a rotelle può avvicinarsi con maggior facilità al tavolo, scrivania etc...

Il bracciolo regolabile in altezza permette all'utente una maggiore adattabilità. Nel caso si utilizzi un cuscino è possibile adattare l'altezza dei braccioli al nuovo livello del sedile.

Assemblaggio e rimozione del bracciolo

Assemblaggio:

- inserire le due estremità negli appositi alloggiamenti, tenendo premuto il pernetto della molletta per poi farlo scattare una volta in sede.

Rimozione:

- premere il pernetto della molletta, lentamente spingere il bracciolo fuori dagli appositi alloggiamenti.



Regolazione schienale

Per reclinare lo schienale svitare le manopole laterali, arretrare lo schienale nella posizione desiderata spingendo all'indietro con le mani; bloccare le manopole.

Per riportare lo schienale nella posizione verticale allentare le manopole laterali e spingere lo schienale nella posizione desiderata; bloccare le manopole.

Prima di regolare l'inclinazione dello schienale assicurarsi che: i freni di stazionamento siano inseriti in questo modo si evita che la carrozzina continui inavvertitamente a muoversi.



Alzagambe regolabile

La regolazione dell'alzagambe permette di adattare la lunghezza delle cosce con la gamba tesa.

Gli appoggipiedi sono ribaltabili per facilitare l'avvicinamento della persona alla carrozzina.

Regolazione in altezza:

- sollevare l'alzagambe fino a portarla nella posizione desiderata.
- riportarla in posizione di partenza esercitare una lieve pressione sulla leva e sulla pedana.

Regolazione parapolpaccio

- Girare il parapolpaccio fino a portarlo nella posizione desiderata.



Regolazione pedana altezza

Per tutte le pieghevoli si ha la regolazione della pedana in altezza.

Regolazione della pedana in altezza:

- allentare il bullone e regolarla secondo l'altezza desiderata
- avvitare il bullone in modo da bloccare l'astina della pedana.



Attenzione:

verificare che l'astina della pedana sia inserita almeno di 5 cm all'interno del supporto pedana.

Regolare l'astina pedana in modo da avere sempre una distanza tra la pedana in plastica ed il terreno di circa 6 cm



Manutenzione della sedia a rotelle

Controlli annuali

La manutenzione deve essere eseguita una volta all'anno. Si consiglia un accurato controllo dello stato dei cuscinetti, sabbia, acqua e polveri li danneggiano. Lubrificare leggermente con olio per biciclette privo di resine. Per la pulizia del telaio utilizzare acqua calda con poco sapone, oppure un detergente casalingo. Le parti in materiale sintetico dovranno essere pulite con i comuni detergenti specifici per questo materiale.



Attenzione!

Non usare apparecchi di pulizia ad alta pressione! Pericolo di danneggiamento della parte meccanica provocato dai getti d'acqua.

Le sedie non devono essere pulite con detergenti ed oggetti per la pulizia aggressiva.



Attenzione!

Tutti i componenti che possono essere a contatto con la pelle, se la carrozzina passa da un utilizzatore ad un altro, devono essere sostituiti.

Riparazioni

Per interventi di riparazione affidatevi al vostro rivenditore specializzato Nuova Blandino S.r.l., il quale è stato istruito presso il nostro stabilimento secondo le nostre specifiche, ed è in grado di offrire consulenza, assistenza e servizi di riparazione.

Parti di ricambio


Ordinarli tramite il proprio rivenditore. Ai fini di una corretta consegna delle parti di ricambio è necessario indicare il numero di telaio relativo alla sedia a rotelle. Per motivi di sicurezza utilizzare ricambi e accessori autorizzati da Nuova Blandino S.r.l. indicazioni di dove trovare il numero di telaio. (pag. 21)

Smaltimento


L'imballo della sedia a rotelle può essere portato al riciclo materiali. Le parti in metallo vengono raccolte e riciclate nel metallo vecchio. Le parti in stoffa e in plastiche vengono riciclate.

Lo smaltimento deve avvenire in base alle relative norme di legge nazionali.

Misure

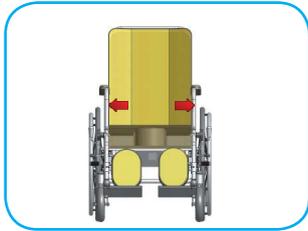


cm 43

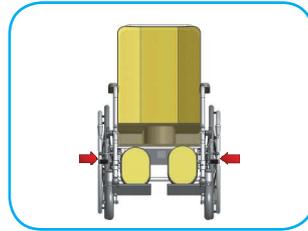


cm 65




cm 123

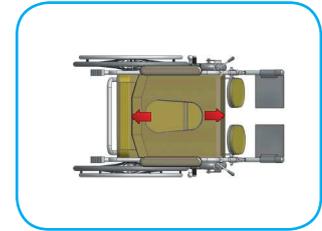

cm 44

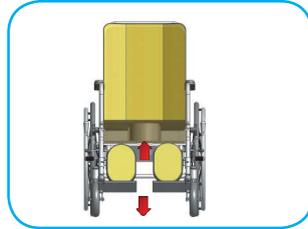

cm 53

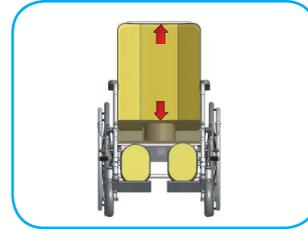

cm 56



Kg 25



Optional 38 48 53



Portata Max. Kg 120

Accessori



Sondina regolabile



Sedile con foro "U"



Sedile senza foro WC



Appoggiatesta



Spinta tronco



Tavolo bordo incavo



Tavolo rettangolare



Pedana unica



Fascione cm 25



Cintura semplice



Cintura di sicurezza



Cintura pelvica grande



Divaricatore a fasce



Pettorina singola



Cintura "Y"

Norme generali di sicurezza

Utilizzare le sedie a rotelle esclusivamente come previsto nelle istruzioni per l'uso.

Per sostare, salire o scendere scegliete sempre un fondo piano e stabile, assicurare, la sedia a rotelle per evitare che si muova utilizzando entrambi i freni.

Se esposti direttamente ai raggi del sole, il rivestimento e l'imbottitura dei sedili e dei braccioli, i poggiatesta e le maniglie possano raggiungere temperature oltre i 41° C. Al contatto di queste parti con la pelle non protetta c'è il rischio di ustione. Per evitare il riscaldarsi di queste parti parcheggiate la Vostra sedia a rotelle all'ombra.

InformateVi presso il Vostro rivenditore autorizzato su tutte le possibili caratteristiche di marcia, allo scopo di escludere possibili pericoli e sulle possibilità di variazioni e regolazioni e sul loro effetto sul funzionamento e sulla sicurezza dello spostamento.

Il rivenditore autorizzato sarà lieto di regolare la vostra sedia a rotelle in base alle vostre esigenze individuali, nel massimo rispetto della vostra sicurezza.

Quando attivate i dispositivi di regolazione (ad es. del poggiatesta), fate attenzione e non mettete mai le mani nella zona di orientamento dei componenti. C'è il rischio di ferirsi.

Quando si trasportano oggetti, assicurarsi che non pregiudichino o limitino la manovrabilità della sedia a rotelle. Controllare la pressione e lo stato di usura delle gomme e controllare i freni.

Peso trasportabile

Non sovraccaricare la sedia a rotelle con pesi eccessivi e non usarla mai per trasportare più di una persona.

Il carico massimo ammissibile è riportato nelle Istruzioni per l'uso e sulla targhetta del veicolo.

Trasferimento dalla sedia a rotelle

Scendere dalla sedia a rotelle per passare in altro luogo, se effettuato autonomamente, è pericoloso.

Richiede:

- rilevanti forze fisiche
- buone capacità di coordinamento
- un appoggio antidrucciolevole (ad es. con il palmo delle mani sulla superficie del sedile)
- molto esercizio

La conoscenza di tutte le possibili situazioni di pericolo.

FateVi quindi aiutare da una persona. Discutete insieme lo svolgimento dell'operazione e fate presente che potrebbero insorgere dei pericoli imprevisti come ad es. eventuali punti d'inciampo, oppure spiegate il tipo del Vostro handicap.

Quando la sedia a rotelle non è carica, per esempio quando ci si sposta dalla sedia a rotelle al letto, al WC oppure all'auto, non fare mai forza sulla pedana.

- Pericolo di ribaltamento!

Attraversamento di strettoie

Quando si percorrono tratti con carreggiata stretta ad esempio ingressi di edifici, porte ecc., attenzione ai gomiti.

- **Pericolo di infortunio.**

Utilizzo in ascensore e su ponti elevatori

Ascensori ed elevatori costituiscono un particolare pericolo per l'utente.



Attenzione!

Le porte che chiudono automaticamente implicano il rischio di recare lesioni alle mani!

Trasporto in auto o su altri mezzi di trasporto

La sedia a rotelle non deve mai essere utilizzata come sedile quando si utilizza un'auto o un altro mezzo di trasporto. Provvedete allo smontaggio della sedia a rotelle (come specificato nelle istruzioni per l'uso) e riponetela nel vano portabagagli, o comunque assicuratela in modi da evitare incidenti in caso di manovre pericolose.

Occupate un posto adeguato all'interno dell'auto o del mezzo di trasporto ed allacciate le cinture di sicurezza.

Dichiarazione di conformità



NUOVA BLANDINO S.r.l.

con sede legale in Strada Cebrosa, 24
10036 Settimo Torinese - Torino

Responsabile della progettazione, fabbricazione, imballaggio, ed etichettatura di questo prodotto rientrante nella famiglia delle
POLTRONE IMBOTTITE

GARANTISCE E DICHIARA

che il suddetto ausilio, immesso in servizio ed in commercio a decorrere dalla data della presente attestazione, soddisfa integralmente le disposizioni enunciate negli allegati I e VII della Direttiva Comunitaria 2007/47 CEE e del D.L. 37 del 25 Gennaio 2010, recepimento italiano della summenzionata Direttiva.

I prodotti sopra indicati sono classificati Dispositivi Medici NON Invasivi di Classe I secondo quanto previsto nell'allegato IX e X della direttiva 2007/47 CEE .

Per quanto concerne le rimanenti direttive e norme applicabili al prodotto, la dichiarazione "CE" di conformità completa è disponibile sul sito internet www.nuovablandino.com

Si dichiara altresì che detti prodotti:

- *non sono strumenti di misura*
- *vengono commercializzati in confezione NON sterile*

Dichiariamo inoltre che i prodotti sopra indicati sono stati realizzati in conformità alle Procedure Tecniche definite dall'Azienda e che tutti i controlli e collaudi sono stati effettuati.

Settimo, 25 Novembre 2015

GARANZIA

Sulle poltrone imbottite di nostra fabbricazione, forniamo una garanzia della durata di due anni dalla corretta compilazione del certificato di acquisto (pag. 25).

La garanzia è valida per i prodotti che presentano difetti di fabbricazione o di funzionamento.

Sono esclusi dalla garanzia i prodotti che manifestano difetti dovuti ad incuria o ad un uso improprio.

Tramite i nostri rivenditori è comunque possibile ottenere informazioni su preventivi per eventuali riparazioni.

Per motivi di sicurezza utilizzare ricambi e accessori autorizzati da Nuova Blandino S.r.l.

L'uso di ricambi e accessori non autorizzati dalla Nuova Blandino S.r.l. sono motivo della immediata decadenza della garanzia.

Per garantire l'efficienza della sedia a rotelle, essa deve essere tenuta pulita, curata e sottoposta a manutenzione come indicato nelle Istruzioni per l'uso.

Attenzione:

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dall'uso combinato delle nostre sedie a rotelle con parti di ogni genere provenienti di altri produttori (ad es. unità rimorchio, dispositivi elettrici) che implicano eventualmente rilevanti pericoli – salvo che un determinato prodotto non sia stato espressamente autorizzato in forma scritta da parte della Nuova Blandino S.r.l.

La Nuova Blandino S.r.l. declina ogni responsabilità per danni a persone, cose, animali e terzi dovuti a modifiche o all'uso improprio della carrozzina.

TARGHETTA E MARCATURA CE

L'etichette CE (vedi immagine) presente sulla carrozzina la trovate sulla traversa anteriore sotto il sedile.



REGISTRO MANUTENZIONE

Data riparazione	Data riparazione
Parti sostituite o riparate	Parti sostituite o riparate
Timbro o firma dell'operatore	Timbro o firma dell'operatore
Timbro o firma del collaudatore	Timbro o firma del collaudatore

REGISTRO MANUTENZIONE

Data riparazione	Data riparazione
Parti sostituite o riparate	Parti sostituite o riparate
Timbro o firma dell'operatore	Timbro o firma dell'operatore
Timbro o firma del collaudatore	Timbro o firma del collaudatore

REGISTRO MANUTENZIONE

Data riparazione	Data riparazione
Parti sostituite o riparate	Parti sostituite o riparate
Timbro o firma dell'operatore	Timbro o firma dell'operatore
Timbro o firma del collaudatore	Timbro o firma del collaudatore

Note Informative

il dispositivo descritto in questo manuale riporta il marchio CE in quanto conforme alle regole stabilite dalla Direttiva Comunitaria 2007/47 CEE e del D.L. 37 del 25 Gennaio 2010, per i Dispositivi Medici e viene classificato come Dispositivi Medici NON Invasivi di Classe I, secondo quanto previsto dall'allegato IX e X della summenzionata direttiva.

- **destinazione d'uso**

il dispositivo viene fornito già montato dal tecnico ortopedico e regolato secondo le vostre esigenze.

Le poltrone imbottite sono state progettate per essere utilizzate in ambiente chiuso. Esse hanno esclusivamente lo scopo di trasportare una persona sul sedile con i poggiatesta e le parti laterali montate, e non funge da mezzo di trazione, di trasporto o altro. Leggere attentamente il Manuale di Istruzioni per un uso corretto del dispositivo.

- **controlli prima dell'utilizzo**

Prima di utilizzare *la sedia a rotelle*, verificate che tutte le parti siano state correttamente montate e serrate, in particolare le pedane. Qualora il prodotto presentasse danni visibili le parti danneggiate devono essere sostituite, per garantire la Vostra sicurezza

- **istruzioni per il lavaggio**

Non usare apparecchi di pulizia ad alta pressione! Pericolo di danneggiamento della parte meccanica provocato dai getti d'acqua. *Le sedie non devono essere pulite con detergenti aggressivi.*

- **durata del dispositivo**

La durata della *sedia a rotelle* di nostra fabbricazione, dipende dal tempo di utilizzo e dall'intensità e impiego a cui è soggetto. Un corretto utilizzo e una adeguata manutenzione permette di mantenere e prolungare la vita del dispositivo; in media si stima una durata tra i 5 e i 7 anni.

- **allegato VII - Dichiarazione di Conformità-**

La Nuova Blandino S.r.l. istituisce e aggiorna una procedura sistematica di valutazione dell'esperienza acquisita sui dispositivi nella fase successiva alla produzione, anche sulla base delle disposizioni di cui all'allegato X, e prevede un sistema appropriato per l'applicazione delle misure correttive eventualmente necessarie, tenuto conto della natura e dei rischi relativi al prodotto.

Si richiede all'utilizzatore, o chi per esso di informare la Nuova Blandino S.p.a. nel caso in cui il prodotto presenti una qualsiasi disfunzione, o carenza di informazioni per l'uso e che abbia causato incidenti o danni all'utilizzatore.



PER QUALSIASI TIPO DI INFORMAZIONE TECNICA O D'USO, UN NOSTRO TECNICO E' A VOSTRA DISPOSIZIONE TELEFONANDO DA LUNEDI' A VENERDI' DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 13:30 ALLE 17:00 AL NUMERO 0112625140.

TIMBRO RIVENDITORE

--

DATA VENDITA

--	--	--

DATA REGISTRAZIONE

--	--	--

N.B.: IL PRESENTE LIBRETTO DEVE
ESSERE PRESENTATO AD OGNI
TIPO DI RIPARAZIONE

Nuova Blandino S.r.l.
Strada Cebrosa, 24 - 10036 Settimo Torinese
Torino Italy
Tel. +39 011 2625140 - fax +39 011 2625141
www.nuovablandino.com - infonb@nuovablandino.com



Impegno e tecnologia al servizio dei disabili