


# Manuale per l'uso e la manutenzione GR XL

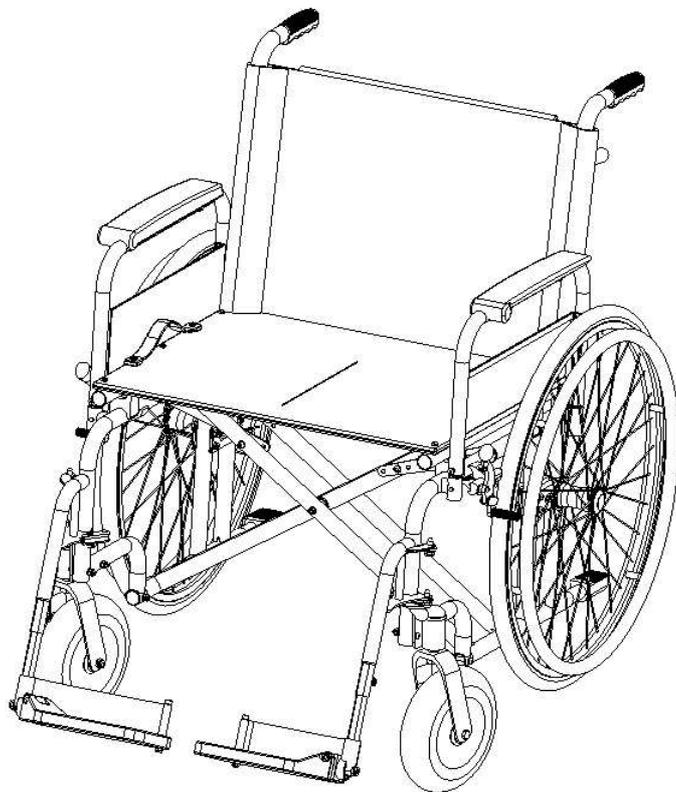

Nuova Blandino S.r.l.  
Strada Cebrosa, 24 - 10036 Settimo Torinese  
Torino Italy  
Tel. +39 011 2625140 - fax +39 011 2625141  
[www.nuovablandino.com](http://www.nuovablandino.com) - [infonb@nuovablandino.com](mailto:infonb@nuovablandino.com)



## INDICE

- |     |                                      |     |   |
|-----|--------------------------------------|-----|---|
| 1.  | Introduzione                         | 15. | Misure  |
|     | Simbologia                           | 16. | Accessori                                       |
| 3.  | Spedizione                           | 18. | Norme generali di sicurezza                     |
|     | Montaggio                            | 19. | Peso trasportabile                              |
|     | Specifiche di utilizzo               |     | Trasferimento dalla sedia a rotelle             |
|     | Informazioni per la sicurezza        | 20. | Allenamento                                     |
| 4.  | Denominazione dei componenti GR XL   |     | Prendere gli oggetti                            |
| 5.  | Controlli prima dell'utilizzo        | 21. | Marciapiedi                                     |
|     | Uso dell'ausilio                     |     | Salita e discesa scale                          |
|     | Freno - freno a pressione            | 22. | Attraversamento di strettoie                    |
| 6.  | Fascia fermatallon                   |     | Utilizzo in ascensore e su ponti elevatori      |
| 7.  | Braccioli                            |     | Trasporto in auto o su altri mezzi di trasporto |
| 8.  | Apertura e chiusura della carrozzina | 23. | Dichiarazione di conformità                     |
| 9.  | Smontaggio pedana completa           | 24. | Garanzia  |
| 10. | Regolazione della pedana in altezza  | 25. | Targhetta e marcatura CE                        |
| 11. | Regolazione della ruota posteriore   | 26. | Registro manutenzione                           |
| 12. | Trasporto in auto                    | 29. | Annotazioni                                     |
| 13. | Manutenzione della sedia a rotelle   | 30. | Note informative                                |
| 14. | Riparazioni                          | 31. | Spazio per il rivenditore                       |
|     | Parti di ricambio                    |     |   |
|     | Smaltimento                          |     |   |

## Istruzioni per l'uso e la manutenzione

### Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questa sedia a rotelle: un prodotto interamente progettato in Italia.

Da più di vent'anni siamo impegnati ed operiamo per dare il massimo del comfort, della comodità e funzionalità a chi necessita di sedie a rotelle e ausili per la deambulazione. Per questo impegno costante siamo protagonisti nella ricerca e nell'innovazione tecnologica.

La nostra gamma è in costante evoluzione e periodicamente alcuni modelli sono oggetto di studio al fine di migliorarne le caratteristiche e le prestazioni. Per questo è stato realizzato il modello GRXL.

Questo manuale fornisce le istruzioni per l'uso di questo modello. Leggete attentamente le istruzioni che seguono, prima di utilizzare l'ausilio per la prima volta.

Utilizzate sempre la vostra sedia a rotelle nel rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale.

**Modello GR XL:** carrozzina pieghevole ad autospinta a doppia crociera con telaio rinforzato in acciaio cromato, adatto a sopportare sollecitazioni di carico elevate.

**Indicazioni cliniche prevalenti:** indicata per persone adulte/anziane di costituzione particolarmente robusta e ridotta capacità motoria, in grado di manovrare autonomamente la carrozzina per brevi percorsi.

**Allestimento di base:** telaio disponibile in tre diverse misure, braccioli estraibili con para-abiti, pedane girevoli, estraibili e regolabili in altezza.

**Optional:** possibilità di personalizzazione attraverso la scelta di accessori che permettono di rispondere ad esigenze di comfort e sicurezza: cintura di sicurezza, cintura pelvica grande, spondina estraibile Desk (consente di passare meglio sotto alle scrivanie), tavolino con bordo incavo.

Nota: le immagini e le illustrazioni riportate nel presente manuale hanno carattere puramente indicativo e non vincolante; ci riserviamo di modificare il prodotto senza alcun preavviso e senza addurre giustificazioni.

## Introduzione

### Simbologia

Durante la lettura del manuale d'uso, potrete imbattervi in questi simboli di particolare importanza o interesse.



Indica di porre particolare attenzione pericolo in generale



chiave per dadi o bulloni da 6 / 19 mm.



chiave a brugola per viti con esagono cavo da 6

La GR XL è dotata di:

- Telaio pieghevole, rinforzato, in acciaio.
- Braccioli estraibili con spondine para abiti
- Regolazione posizionamento perni delle ruote posteriori
- ruote posteriori 24"x1
- ruote anteriori Ø 200mm
- pedana estraibile, girevole e regolabile in altezza puntali.

## Spedizione

Tutti i prodotti Nuova Blandino vengono verificati in Azienda per escludere difetti e sono quindi imballati in cartoni speciali.

Vi preghiamo perciò di controllare l'ausilio subito dopo il ricevimento, in presenza del trasportatore, per verificare eventuali danni occorsi durante il trasporto.

Nel caso in cui si dovesse rilevare che l'ausilio è stato danneggiato durante il trasporto, i danni devono essere denunciati immediatamente, facendo riserva scritta sulla bolla di ritiro.

Occorre quindi provvedere all'invio in porto Franco a Nuova Blandino S.r.l. - entro 8 giorni dalla data di ricevimento - delle parti danneggiate, se queste sono smontabili, o dell'intero ausilio, unitamente ad una copia della bolla di ritiro.

Il riconoscimento del danno da parte nostra non può avvenire nel caso di mancata osservazione di questa procedura, o di segnalazione del danno successivamente al ricevimento.

## Montaggio

Il tecnico ortopedico specializzato vi consegnerà il vostro ausilio pronto per l'uso, adattato alle vostre esigenze personali.

## Specifiche di utilizzo


L'ausilio è stato progettato per essere utilizzato sia in ambiente chiuso sia all'aperto. Essa ha esclusivamente lo scopo di accogliere una persona sul sedile e non funge da

mezzo di trazione, di trasporto o altro.

## Informazioni sulla sicurezza

Tutte le informazioni per un utilizzo sicuro della poltrona polifunzionale sono riportate nella seconda parte di questo manuale.

## Denominazione dei componenti GR XL

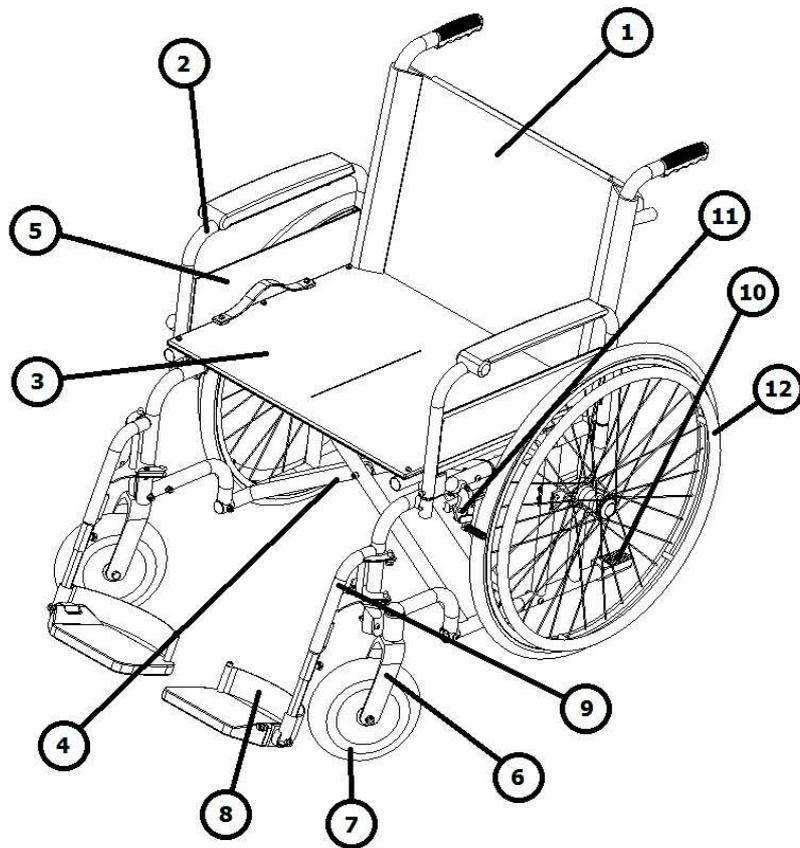

1. Tela schienale
2. Bracciolo estraibile
3. Tela sedile
4. Crociera
5. Spondina para-abiti
6. Forcella
7. Ruota anteriore
8. Fascia appoggiatalloni
9. Pedane girevoli estraibili
10. Puntali di spinta
11. Freno a pressione
12. Ruota posteriore

## Controlli prima dell'utilizzo

Prima di utilizzare l'ausilio, verificate che tutte le parti siano state correttamente montate e serrate, in particolare i braccioli e le pedane.

Se le pedane sono elevabili, verificate che consentano una seduta comoda con una corretta angolazione delle gambe.

Verificate il corretto funzionamento dei freni a pressione. Inserendo i freni su entrambe le ruote, ed imprimendo alle sedie una leggera forza in avanti ed all'indietro: le ruote non devono ruotare.

## Uso dell'ausilio

La sedia a rotelle è destinata a persone invalide o anziane di costituzione particolarmente robusta. E' ideale sia per interni (es: abitazione) sia per il tempo libero all'aperto, purché il terreno d'appoggio sia solido e non sdruciolevole.

Utilizzate inizialmente l'ausilio con molta prudenza. Leggete attentamente la seconda parte del manuale "Informazioni per la sicurezza".


## Freno - freno a pressione -

Il freno di stazionamento costituisce uno degli elementi di sicurezza principali di una sedia a rotelle ed è presente come freno a pressione, che agisce direttamente sulle gomme.

I freni devono essere sempre mantenuti in piena efficienza: l'effetto frenante dei freni a pressione può ridursi e non essere garantito se:


- il profilo dei copertoni è usurato
- i copertoni sono bagnati
- la pressione del pneumatico è ridotta

Controllate regolarmente e prima di ogni uscita la pressione delle Vostre ruote!! Controllare che i raggi delle ruote siano ben tirati.

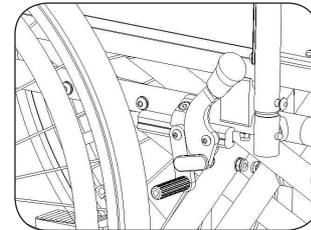

## Fascia fermatalloni

La fascia ferma-talloni impedisce lo scivolamento delle gambe dalle pedane. Viene inserita alla base della pedana.

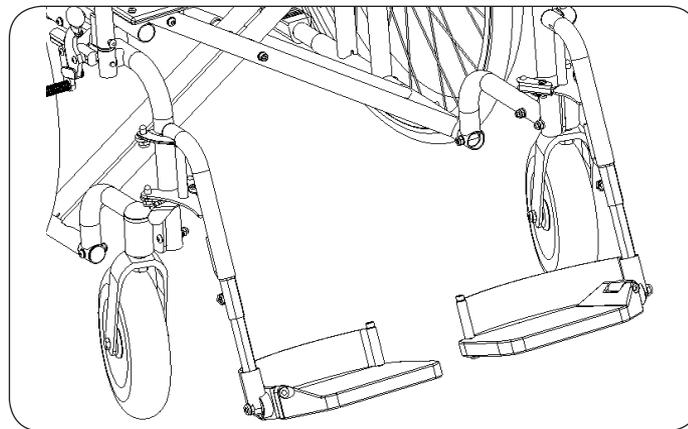

## Braccioli

I braccioli:


- sono estraibili (pulsante A), facilitano il trasferimento dalla sedia a rotelle al letto, alla sedia, etc...
- sono un sostegno laterale del corpo
- proteggono gli abiti contro i raggi delle ruote.

Il bracciolo desk permette di avere braccioli imbottiti più corti per casi d'impiego specifici. La sedia a rotelle consente di avvicinarsi con maggior facilità a tavoli, scrivanie, etc..



**Attenzione:** non sollevare mai la sedia dai braccioli.

Se rimuovete un bracciolo, oppure entrambi, per effettuare un trasferimento, assicuratevi di aver inserito i freni di stazionamento!

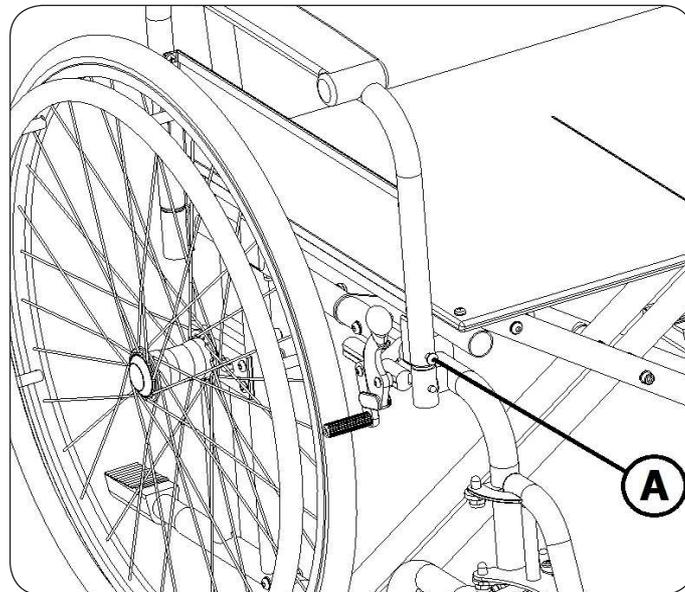

## Apertura e chiusura della carrozzina





La sedia a rotelle può essere piegata con facilità, senza l'utilizzo di attrezzi, eseguendo poche operazioni manuali

### Apertura:

- spingere lateralmente e verso il basso la parte superiore (A) della crociera fino alla posizione d'arresto;
- ribaltare verso il basso le pedane in plastica (B);
- posizionare e serrare la barra tensionamento schienale (D) tramite gli appositi volantini.

### Chiusura:

- sbloccare la barra tensionamento schienale (D);
- ribaltare verso l'alto le pedane in plastica (B);
- tirare verso l'alto il telo della seduta per sbloccare la crociera;
- spingere giù il telo e chiudere la crociera tirandola verso l'alto grazie alle apposite maniglie (c)

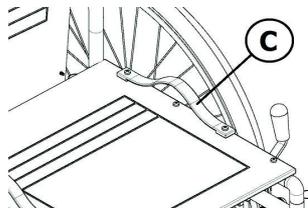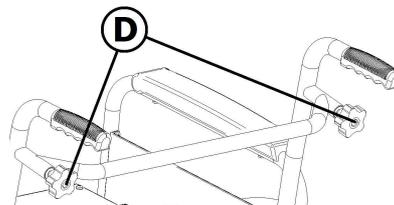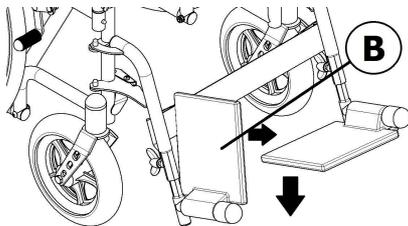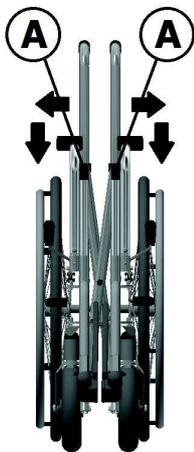


## Smontaggio pedana completa

L'appoggiapiede è ribaltabile verso l'alto per facilitare l'avvicinamento della persona alla carrozzina.


### Smontaggio della pedana:

- premere la leva sgancio pedana (b)
- girare verso l'esterno e sfilare verso l'alto.

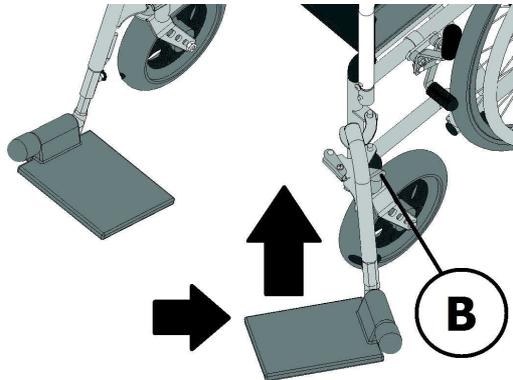

### Montaggio della pedana:



- inserire esternamente negli appositi attacchi (c) la pedana
- girare verso l'interno della carrozzina, finchè non è completamente agganciata a telaio

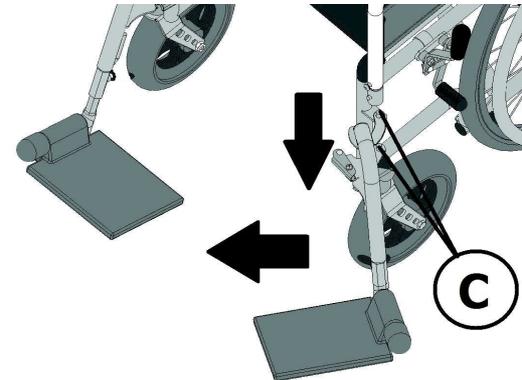

## Regolazione pedana in altezza

Per regolare l'altezza della pedana:

- allentare il bullone A e regolarla secondo l'altezza desiderata
- avvitare il bullone in modo da bloccare l'astina della pedana

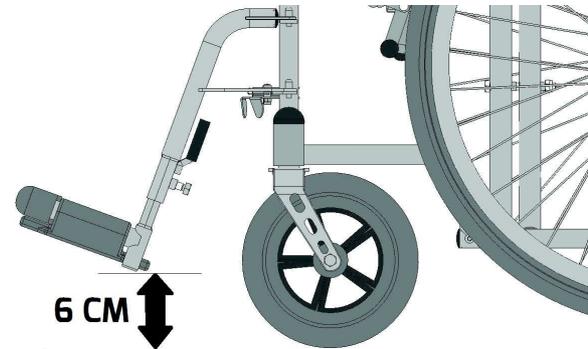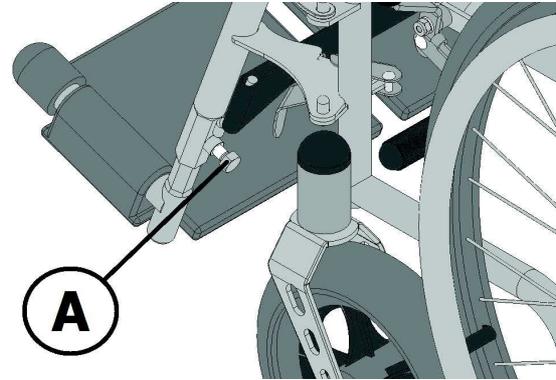

### Attenzione:

Verificare che l'astina della pedana sia inserita almeno di 5 cm all'interno del supporto pedana. Regolare l'astina pedana in modo da avere sempre una distanza tra la pedana in plastica ed il terreno di circa 6 cm.


## Regolazione ruota posteriore

Regolazione importante per la scelta del giusto assetto della carrozzina; è possibile intervenire sulla profondità.

### Regolazione in profondità:

la piastra consente di fissare la boccola del perno ruota in diverse posizioni

- rimuovere la ruota posteriore;
- rimuovere la boccola ed i rispettivi dado e rondella (A).
- trovato il giusto assetto, riavvitare tutte le parti.

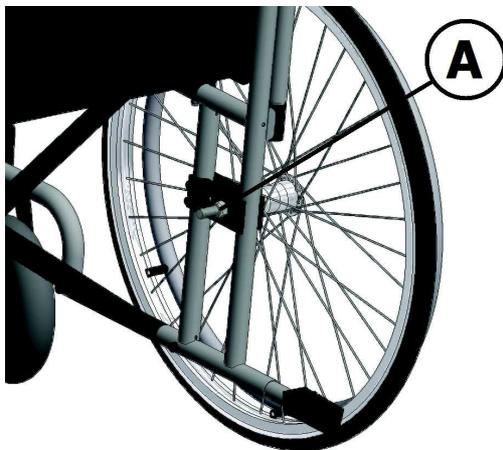

### Attenzione:



lo spostamento della boccola in posizione avanzata, rende l'assetto della carrozzina più "Attivo", questo farà sì che la carrozzina si impenni con maggior facilità.

Lo spostamento della boccola in posizione arretrata, rende l'assetto della carrozzina più "Prudente".

## Trasporto in auto

Per trasportare la carrozzina in macchina si consiglia di chiudere la carrozzina seguendo le istruzioni di pag.8 "APERTURA E CHIUSURA DELLA CARROZZINA".

Questa carrozzina non è stata progettata per essere utilizzata come sedile di un veicolo.

Per guidare un veicolo da seduti, utilizzare sedili appositamente modificati e progettati.

## Manutenzione e riparazione della sedia a rotelle

### Controlli annuali

La manutenzione deve essere eseguita una volta all'anno. Si consiglia un accurato controllo dello stato dei cuscinetti: sabbia, acqua e polveri li danneggiano. Lubrificare leggermente con olio per biciclette privo di resine. Per la pulizia del telaio utilizzare acqua calda con poco sapone, oppure un detergente casalingo. Le parti in materiale sintetico dovranno essere pulite con i comuni detergenti specifici per questo materiale.

### Attenzione!



Non usare apparecchi di pulizia ad alta pressione!

Le sedie non devono essere pulite con detergenti aggressivi.

### Attenzione!



Tutti i componenti che possono essere a contatto con la pelle, se la carrozzina passa da un utilizzatore ad un altro, devono essere sostituiti.

## Riparazioni

### **Riparazioni**

Per interventi di riparazione affidatevi al vostro rivenditore specializzato, il quale è stato istruito presso il nostro stabilimento secondo le nostre specifiche, ed è in grado di offrire consulenza, assistenza e servizi di riparazione.

### **Parti di ricambio**

Ordinare la parti di ricambio tramite il proprio rivenditore. Ai fini di una corretta consegna delle parti di ricambio è necessario indicare il numero di telaio relativo alla sedia a rotelle. Per motivi di sicurezza utilizzare ricambi e accessori originali Nuova Blandino S.r.l.

### **Smaltimento**


Lo smaltimento deve avvenire in base alle relative norme di legge nazionali.

L'imballo è in materiale riciclabile; le parti in metallo e in plastica possono essere riciclate

## Misure



cm 53 - 58 - 63

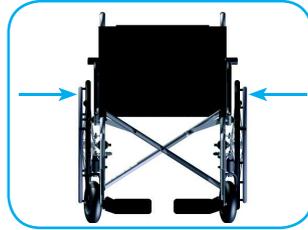


cm 71 - 76 - 81




cm 78



cm 117

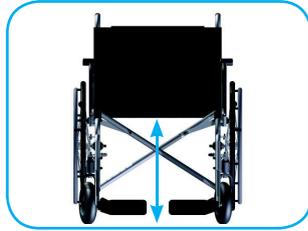


cm 51

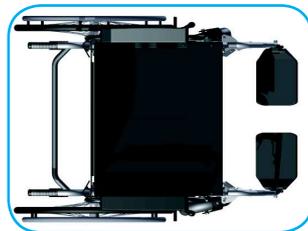

cm 52



cm 22

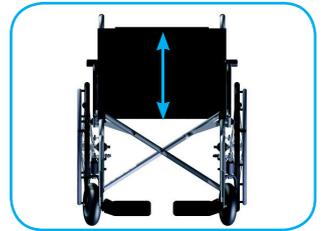

cm 42



23 kg



portata max. 180 kg

## Accessori



Cintura semplice



Cintura semplice con cuscinetto



Cintura pelvica grande



Divaricatore a fascia



Cintura ad Y semplice



Cintura di sicurezza



Pedana multifunzione



Spinta tronco



Bracciolo emiplegico



Appoggiatesta polifunzionale grande imbottito



Appoggiatesta polifunzionale imbottito

## Accessori



Tavolo bordo incavo



Tavolo rettangolare




Tavolo in plexiglass




Asta portaflebo



Copriraggi colorati "Frecce"

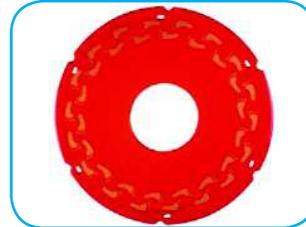

Copriraggi colorati "Orme"

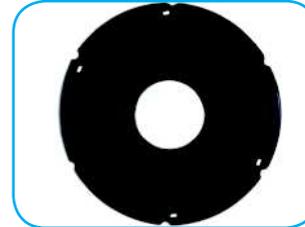

Copriraggi colorati "Total black"

## Norme generali di sicurezza

Utilizzare le sedie a rotelle esclusivamente come previsto nelle istruzioni per l'uso.

Per sostare, salire o scendere scegliete sempre un fondo piano e stabile, assicurare la sedia a rotelle per evitare che si muova utilizzando entrambi i freni a pressione.

Se esposti direttamente ai raggi del sole, il rivestimento e l'imbottitura di sedili e braccioli, i poggiatesta e le maniglie possono raggiungere temperature oltre i 41° C. Al contatto di queste parti con la pelle non protetta c'è il rischio di ustione. Per evitare il surriscaldamento di queste parti, parcheggiate la Vostra sedia a rotelle all'ombra.

InformateVi presso il Vostro rivenditore autorizzato su tutte le possibili caratteristiche di marcia, allo scopo di escludere possibili pericoli; sulle possibilità di variazioni e regolazioni e sul loro effetto per il funzionamento e nella sicurezza dello spostamento.

Il rivenditore autorizzato sarà lieto di regolare la sedia a rotelle in base alle vostre esigenze individuali, nel massimo rispetto della vostra sicurezza e del comfort.

Quando attivate i dispositivi di regolazione (ad es. del poggiatesta), fate attenzione e non mettete mai le mani nella zona di orientamento dei componenti. C'è il rischio di ferirsi.

Quando si trasportano oggetti, assicurarsi che non pregiudichino o limitino la manovrabilità della sedia a rotelle.

Controllare la pressione e lo stato di usura delle gomme e controllare i freni.

## Peso trasportabile

Il carico massimo ammissibile è di 180 kg ed è riportato nelle Istruzioni per l'uso e sulla targhetta dell'ausilio.

L'ausilio può trasportare una sola persona

## Trasferimento dalla sedia a rotelle

Scendere dalla sedia a rotelle per passare in altro luogo, se effettuato autonomamente, è pericoloso.

Richiede:

- rilevanti forze fisiche
- buone capacità di coordinamento
- un appoggio sicuro
- molto esercizio

FateVi quindi aiutare da una persona. Discutete insieme lo svolgimento dell'operazione e fate presente che potrebbero insorgere dei pericoli imprevisti, come ad es. eventuali punti d'inciampo.

## Allenamento

Per un utilizzo sicuro della sedia a rotelle, sia in casa sia all'aperto, è necessario un allenamento per acquistare sicurezza nelle diverse principali situazioni, quali: la spinta, la frenata, la guida in avanti, la curva, la retromarcia su superfici piane, eventualmente con l'ausilio di un accompagnatore. Inizialmente evitate salite ripide, strade sconnesse o altre situazioni simili.


## Prendere gli oggetti

Evitate di inchinarVi in modo estremo, in avanti, di lato o indietro, per raccogliere o posare oggetti: correte il rischio di ribaltamento o di perdita d'equilibrio della carrozzina soprattutto nel caso in cui sia dotata di sedile di larghezza ridotta e d'altezza elevata (cuscino).



### Attenzione:

- ribaltamento in caso di presa di oggetti in avanti
- perdita di equilibrio nel caso in cui si prenda un oggetto di lato
- ribaltamento nel caso in cui si raccolga un oggetto posto dietro allo schienale.

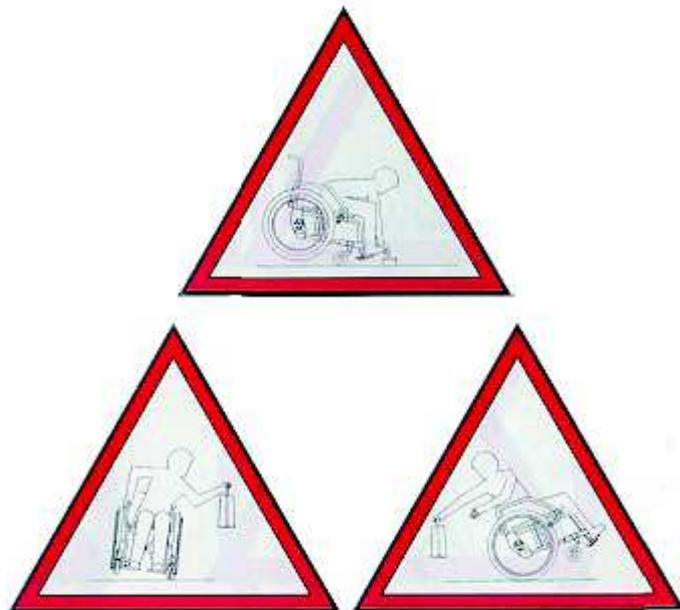


## Marciapiedi



### Attenzione!

Prima di scendere da un marciapiede da soli, valutatene bene l'altezza. Se è troppo alto, c'è il rischio di ribaltarsi. Pericolo di ribaltarsi in caso di forte pendenza.

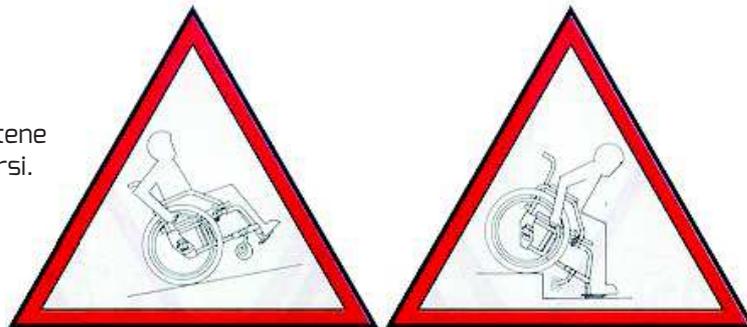

## Salita e discesa scale

Per percorrere delle salite, inclinate il busto in avanti; per le discese, invece, tenetevi ben appoggiati allo schienale frenando la carrozzina. In caso di salite con pendenza maggiore all'1% è consigliato farsi spingere da una seconda persona.



### Attenzione!

In caso di salita è pericoloso portare sacche, borse pesanti dietro lo schienale. Pericolo di ribaltamento.

AvvaleteVi dell'aiuto di due persone, per salire e scendere scale difficili. Per scendere, la carrozzina deve essere ribaltata sulle ruote grandi posteriori e accompagnata gradino per gradino. Per salire, la persona che vi aiuta, voltando la schiena alla scala, deve tirare verso di se la carrozzina di gradino in gradino, tenendola ribaltata sulle ruote posteriori.



### Attenzione!

Se la carrozzina viene alzata di peso c'è il pericolo di sbilanciarsi e cadere.

## Attraversamento di strettoie

Quando si percorrono tratti con carreggiata stretta ad esempio ingressi di edifici, porte ecc., attenzione ai gomiti.  
**Pericolo di infortunio.**

## Utilizzo in ascensore e su ponti elevatori

Ascensori ed elevatori costituiscono un particolare pericolo per l'utente.

**Attenzione!**



Prestate attenzione alle dimensioni dell'ascensore e all'ingombro dell'ausilio per evitare di rimanere incastrati

## Trasporto in auto o su altri mezzi di trasporto

L'ausilio non deve mai essere utilizzato come sedile per passeggero quando lo si utilizza in auto o su un altro mezzo di trasporto. Provvedete allo smontaggio della sedia a rotelle (come specificato nelle istruzioni per l'uso) e riponetela nel vano portabagagli, o comunque assicuratela in modi da evitare incidenti in caso di manovre pericolose.

Occupate un posto adeguato all'interno dell'auto o del mezzo di trasporto ed allacciate le cinture di sicurezza.

## Dichiarazione di conformità



**La NUOVA BLANDINO S.r.l.**  
con sede legale in Strada Cebrosa, 24  
10036, Settimo Torinese - Torino

Responsabile della progettazione, fabbricazione, imballaggio, ed etichettatura di questo prodotto rientrante nella famiglia delle  
**CARROZZINE MANUALI**

### **GARANTISCE E DICHIARA**

che il suddetto ausilio, immesso in servizio ed in commercio a decorrere dalla data della presente attestazione, soddisfa integralmente le disposizioni enunciate negli allegati I e VII della Direttiva Comunitaria 2007/47 CEE e del D.L. 37 del 25 Gennaio 2010, recepimento italiano della summenzionata Direttiva.

I prodotti sopra indicati sono classificati Dispositivi Medici NON Invasivi di Classe I secondo quanto previsto nell'allegato IX e X della direttiva 2007/47 CEE .

Per quanto concerne le rimanenti direttive e norme applicabili al prodotto, la dichiarazione "CE" di conformità completa è disponibile sul sito internet [www.nuovablandino.com](http://www.nuovablandino.com)

*Si dichiara altresì che detti prodotti:*

- *non sono strumenti di misura*
- *vengono commercializzati in confezione NON sterile*

Dichiariamo inoltre che i prodotti sopra indicati sono stati realizzati in conformità alle Procedure Tecniche definite dall'Azienda e che tutti i controlli e collaudi sono stati effettuati.

Settimo, 18 Gennaio 2016

## GARANZIA

Sugli ausili di nostra fabbricazione, forniamo una garanzia della durata di due anni dalla corretta compilazione del certificato di acquisto (pag. 29).

La garanzia è valida per i prodotti che presentano difetti di fabbricazione o di funzionamento.

Sono esclusi dalla garanzia i prodotti che manifestano difetti dovuti ad incuria o ad un uso improprio.

Tramite i nostri rivenditori è comunque possibile ottenere informazioni su preventivi per eventuali riparazioni.

Per motivi di sicurezza utilizzare ricambi e accessori autorizzati da Nuova Blandino S.r.l.

L'uso di ricambi e accessori non autorizzati dalla Nuova Blandino S.r.l. sono motivo della immediata decadenza della garanzia.

Per garantire l'efficienza dell'ausilio, esso deve essere tenuto pulito, curato e sottoposto a manutenzione come indicato nelle Istruzioni per l'uso.

### **Attenzione:**

**Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dall'uso combinato dei nostri ausili con parti di ogni genere provenienti di altri produttori (ad es. unità rimorchio, dispositivi elettrici) che implicano eventualmente rilevanti pericoli – salvo che un determinato prodotto non sia stato espressamente autorizzato in forma scritta da parte della Nuova Blandino S.r.l.**

*La Nuova Blandino S.r.l. declina ogni responsabilità per danni a persone, cose, animali e terzi dovuti a modifiche o all'uso improprio dell'ausilio.*

## TARGHETTA E MARCATURA CE

L' etichette CE (vedi immagine) presente sulla carrozzina la trovate sulla crociera sotto il sedile.



**b. BLANDINO** *srl*

STRADA CEBROSA, 24  
10036, SETTIMO T.SE  
TORINO, ITALY

Portata Massima Kg.  
Max Load Kg.

Modello/Model

Nr° di serie/serial Nr°

**CE**



**b. BLANDINO**

Controllo:

Operatore: xx



**ANNO  
XXXX**

## REGISTRO MANUTENZIONE

Data riparazione	Data riparazione
Parti sostituite o riparate	Parti sostituite o riparate
Timbro o firma dell'operatore	Timbro o firma dell'operatore
Timbro o firma del collaudatore	Timbro o firma del collaudatore

## REGISTRO MANUTENZIONE

Data riparazione	Data riparazione
Parti sostituite o riparate	Parti sostituite o riparate
Timbro o firma dell'operatore	Timbro o firma dell'operatore
Timbro o firma del collaudatore	Timbro o firma del collaudatore

## REGISTRO MANUTENZIONE

Data riparazione	Data riparazione
Parti sostituite o riparate	Parti sostituite o riparate
Timbro o firma dell'operatore	Timbro o firma dell'operatore
Timbro o firma del collaudatore	Timbro o firma del collaudatore



## Note Informative

il dispositivo descritto in questo manuale riporta il marchio CE in quanto conforme alle regole stabilite dalla Direttiva Comunitaria 2007/47 CEE e del D.L. 37 del 25 Gennaio 2010, per i Dispositivi Medici e viene classificato come Dispositivi Medici NON Invasivi di Classe I, secondo quanto previsto dall'alegato IX e X della summenzionata direttiva.

- **destinazione d'uso**

il dispositivo viene fornito già montato dal tecnico ortopedico e regolato secondo le vostre esigenze.

*La poltrona polifunzionale* è stata progettata per essere utilizzata sia in ambiente chiuso sia all'aperto. Essa ha esclusivamente lo scopo di trasportare una persona sul sedile con i poggiatesta e le parti laterali montate, e non funge da mezzo di trazione, di trasporto o altro. Leggere attentamente il Manuale di Istruzioni per un uso corretto del dispositivo.

- **controlli prima dell'utilizzo**

Prima di utilizzare *la OPTIMA* verificate che tutte le parti siano state correttamente montate e serrate, in particolare le pedane. Quando il prodotto presentasse danni visibili le parti danneggiate devono essere sostituite, per garantire la Vostra sicurezza

- **istruzioni per il lavaggio**

Non usare apparecchi di pulizia ad alta pressione!

*Le sedie non devono essere pulite con detergenti aggressivi.*

- **durata del dispositivo**

La durata della *poltrona polifunzionale* di nostra fabbricazione, dipende dall'intensità di impiego a cui è soggetta. Un corretto utilizzo e una adeguata manutenzione permette di mantenere e prolungare la vita del dispositivo; in media si stima una durata tra i 5 e i 7 anni.

- **allegato VII - Dichiarazione di Conformità-**

La Nuova Blandino S.r.l. istituisce e aggiorna una procedura sistematica di valutazione dell'esperienza acquisita sui dispositivi nella fase successiva alla produzione, anche sulla base delle disposizioni di cui all'allegato X, e prevede un sistema appropriato per l'applicazione delle misure correttive eventualmente necessarie, tenuto conto della natura e dei rischi relativi al prodotto.

Si richiede all'utilizzatore, o chi per esso di informare la Nuova Blandino S.r.l. nel caso in cui il prodotto presenti una qualsiasi disfunzione, o carenza di informazioni per l'uso e che abbia causato incidenti o danni all'utilizzatore.



PER QUALSIASI TIPO DI INFORMAZIONE TECNICA O D'USO, UN NOSTRO TECNICO E' A VOSTRA DISPOSIZIONE TELEFONANDO DA LUNEDI' A VENERDI' DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 13:30 ALLE 17:00 AL NUMERO 0112625140.

**TIMBRO RIVENDITORE**

--

**DATA VENDITA**

--	--	--

**DATA REGISTRAZIONE**

--	--	--

N.B.: IL PRESENTE LIBRETTO DEVE  
ESSERE PRESENTATO AD OGNI  
TIPO DI RIPARAZIONE

Nuova Blandino S.r.l.  
Strada Cebrosa, 24 - 10036 Settimo Torinese  
Torino Italy  
Tel. +39 011 2625140 - fax +39 011 2625141  
[www.nuovablandino.com](http://www.nuovablandino.com) - [infonb@nuovablandino.com](mailto:infonb@nuovablandino.com)



Impegno e tecnologia al servizio dei disabili  
32