

| Codice | Descrizione |
|--|----------------------------------|
| PRACTICA 41T PRACTICA 43T PRACTICA 45T PRACTICA 51T | Carrozzina da trasporto Practica |

DESCRIZIONI ED INDICAZIONI

Carrozzine da trasporto con telaio pieghevole a doppia crociera e braccioli desk estraibili per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione traumatica o congenita della funzionalità degli arti inferiori.

Ruote posteriori piene.

Pedane girevoli, estraibili e regolabili in altezza.

Disponibili nelle misure 41, 43, 45 e 51.

MATERIALI COMPONENTI

| | |
|--------------------|---------------------|
| Telaio e braccioli | Acciaio |
| Pannello braccioli | Plastica |
| Poggia-braccio | Nylon imbottito |
| Seduta e schienale | Nylon imbottito |
| Ruotini anteriori | Gomma |
| Ruote posteriori | Poliuretano morbido |
| Poggiapiedi | Plastica |

DATI TECNICI

| Seduta | Larghezza totale | Altezza seduta | Peso |
|--------------|------------------|----------------|-------|
| 41 cm | 54 cm | 51 cm | 21 kg |
| 43 cm | 56 cm | 51 cm | 21 kg |
| 45 cm | 58 cm | 51 cm | 21 kg |
| 51 cm | 64 cm | 51 cm | 21 kg |

Portata 120 kg

Diametro tubi telaio 22 mm

Diametro tubi crociera 26 mm

Ruote posteriori 12"

Ruote anteriori 8"

CONTROINDICAZIONI ED AVVERTENZE

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Per un corretto utilizzo del dispositivo, consultare le "Istruzioni per l'uso".

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Sono necessari controlli periodici per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente.

Freni Verificare lo stato dei tamponi, eventuali movimenti di gioco e l'efficacia della frenata.

Tele Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare attenzione alla presenza di tagli o strappi.

| | |
|---------------------|--|
| Ruote | Verificare lo stato di usura dei pneumatici. Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al telaio e ruotare facilmente. I perni delle ruote posteriori non devono avere gioco sul diametro. |
| Braccioli | Verificare lo stato delle imbottiture. Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale. |
| Poggia-piedi | Verificare che le pedane non presentino rotture e che siano ben fissate ai supporti metallici. |
| Bulloneria | Verificare il corretto fissaggio e la tenuta di viti e bulloni. |

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.

La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti soggette ad usura.

PRACTICA T

Codice CND Y122103
Progressivo di registrazione 315631

PRODUTTORE INTERMED srl

ACCESSORI

| | |
|----------------|--|
| P-11D/S | Braccioli lunghi destro e sinistro |
| P-12D/S | Braccioli desk regolabili in altezza destro e sinistro |
| P-13D/S | Braccioli lunghi regolabili in altezza destro e sinistro |
| P-20 | Pedane elevabili |
| P-25 | Sedile wc misura 41-43 |
| P-26 | Sedile wc misura 45-51 |
| P-27 | Sedile rigido misura 41-43 |
| P-28 | Sedile rigido misura 45-51 |
| P-29 | Tavolino con incavo fisso |
| P-30 | Tavolino con incavo ribaltabile |

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE