

RADDRIZZASPALLE

Art. 576

Mantiene eretta la colonna evitandone l'inclinazione anteriore ed alleviando da carichi eccessivi la muscolatura cervicale. Il particolare sistema di incrocio posteriore delle due fasce, esercita un'azione di forza sulla muscolatura dorsale, la cui efficacia cresce proporzionalmente alla tensione data alla banda di chiusura a velcro posta anteriormente, sulla parete addominale.



Indicazioni

Patologie posturali: Iper-cifosi - Chiusura anteriore delle spalle.

Caratteristiche

Colore BIANCO.




Benefici


Facile da indossare e regolare. Indossato sopra una maglietta intima, garantisce il massimo comfort e può essere portato per tutta la giornata.

Componenti specifici

Tessuto elasticizzato PAVIS in cotone, anallergico e traspirante.

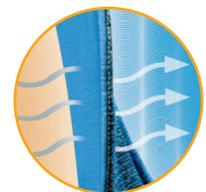

IL TESSUTO 100% TRASPIRANTE

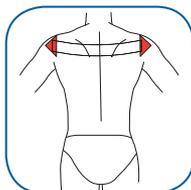

New EDGE[®]
LINE

Size	S	M	L	XL
Larghezza delle spalle CM	28-36	36-44	44-52	52-60

RADDRIZZASPALLE

Art. 576

Come si indossa

- Indossare sopra un indumento intimo.
- Infilare la parte destra sulla spalla destra e quella sinistra sulla spalla sinistra.
- Incrociare le bande posteriormente e allacciare la chiusura velcro anteriormente sull'addome.

