

REGGIBRACCIO

Art. 405

Reggibraccio costituito da una tasca in morbido tessuto traspirante e da un tirante che la sostiene. Il tirante è dotato di un'imbottitura di protezione per prevenire fastidi derivanti dallo sfregamento intorno al collo, è dotato di una comoda fibbia per poterlo aprire e regolare in altezza. Sostiene confortevolmente l'avambraccio in una corretta postura in seguito a traumi e distorsioni al braccio e alla spalla, paresi e post gesso.



Indicazioni

Post-gesso e post operatorio; traumi e distorsioni al braccio e alla spalla - paresi.

Caratteristiche


Fibbia di chiusura a scatto, apribile per facilitare l'applicazione. Comodo porta pollice interno alla tasca.

Benefici

Estremamente funzionale, completamente apribile è comodo da indossare e la lunghezza del tirante è personalizzabile secondo le esigenze. E' ambidestro. NO NEOPRENE.


Componenti specifici

Tessuto traspirante

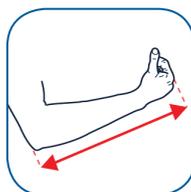

New EDGE[®]
LINE

Size	S	M	L
Lunghezza dell' avambraccio CM	25-31	31-37	37-43

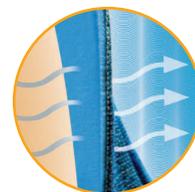

IL TESSUTO 100% TRASPIRANTE

REGGIBRACCIO Art. 405

Come si indossa

- Scegliere la misura, facendo riferimento alla tabella riportata sulla confezione.
- Indossare sopra gli indumenti.
- Infilare l'avambraccio nella tasca posizionando il pollice nell'apposito anello.
- Fare passare il tirante intorno al collo e regolare eventualmente la lunghezza del tirante in modo da tenere l'avambraccio in posizione orizzontale.