

## SCHEMA TECNICA

### WI H\_ST 21000\_MATERASSO ANTIDECUBITO VISCOFLEX \_P161MFPMH

<b>NOME PRODOTTO</b>	MATERASSO ANTIDECUBITO VISCOFLEX
----------------------	----------------------------------



<b>DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE</b>	<p>I materassi Viscoflex sono dispositivi medici destinati alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione. Prodotto in polimero viscoelastico ad alta densità (80 kg/m<sup>3</sup>), stampato su base in poliuretano ad alta resilienza (40 kg/m<sup>3</sup>), anatomicamente sagomato. Spessore del viscoelastico di 6 cm su tutto il materasso e 8 cm nella zona sacrale per maggior protezione del paziente. Garantisce una lunga durata ed è in grado di memorizzare la sagoma del corpo, ciò permette di aumentare la superficie di contatto riducendo le pressioni sui singoli punti di appoggio. Perfettamente articolabile con le articolazioni dei letti; ottimizzazione del microclima con ampi canali di areazione. Facile e sicuro ingresso/uscita paziente, con stabilizzatori laterali. Angoli arrotondati, utili per alloggiamenti. L' "effetto pelle" protegge da aggressioni esterne anche meccaniche. Fornito completo di copertura Polymaille® integrale bi-estensibile, impermeabile ma traspirante che assicura il massimo comfort ed una perfetta ventilazione mantenendo la temperatura corporea costante.</p>
--	--

<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Indicato per pazienti a medio-alto rischio di piaghe da decubito o con lesioni fino al III stadio (EPUAP).
---------------------------	--

## GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P161MFPMH	Materasso Viscoflex in materiale viscoelastico 90x200xh.14 cm. con copertura Polymaille 1.IM BD/RDM: 873276 CND: Y033306
P452PM	Telo Polymaille integrale per Viscoflex e Polyplot 90x200x14 cm. BD/RDM: N.A. CND: N.A.
P101M20	Inserto di estensione per materassi Polyplot e Viscoflex 90x200x14 cm. BD/RDM: N.A. CND: N.A.

## INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA
SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédat 47300 Villeneuve sur Lot Francia	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia



## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	86 x 199 x 14 cm
Peso	15,8 kg
Materiale/Densità della Base in Poliuretano	Poliuretano espanso - 40 kg/m <sup>3</sup>
Materiale/Densità della parte in Viscoelastico	Materiale Viscoelastico a memoria di forma ad alta densità - 80 kg/m <sup>3</sup>
Materiale della copertura	Polymaille - Trama di tessuto bielastico impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapor d'acqua e traspirante trattato contro i microrganismi.
Materiale del materasso	Fusione di poliuretano ad alta resilienza (base) con copertura in viscoelastico a memoria di forma (zona di interfaccia tra paziente e supporto).
Permeabilità della Copertura	> 500 gr/m <sup>2</sup> /24 h
Portata Terapeutica	130 kg
Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	<b>Schiuma:</b> pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciare asciugare all'aria. Disinfettare con prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi ecc. Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave. <b>Copertura Polymaille:</b> lavare a 95°C, non usare candeggina, non stirare. Pulire a secco mediante solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate in asciuga biancheria.
CFC	Completamente assente.
Lattice	free
Confezionamento	Il prodotto viene confezionato in busta di cellophane e inserito in scatola di cartone.

## Accessori e Ricambi

Cod. P452PM - Telo Polymaille integrale per Viscoflex e Polyplot 90 x 200 x 14 cm  
Cod. P101M20 - Inserto di estensione per materassi Polyplot e Viscoflex 90 x 200 x 14 cm

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio