

PRACTICA EASY LIGHT – Carrozzina Standard leggera **Ref. PRACTICA EL**



Descrizione

Carrozzina con telaio pieghevole in alluminio e doppia crociera, con ruote posteriori 24" in Poliuretano, ad estrazione rapida; dotate di mancorrenti in alluminio per l'autospinta a due mani, freni di stazionamento, ruotini per passaggi stretti e possibilità di regolazione in altezza e profondità. Le ruote anteriori hanno dimensione 7" con una forcella in Nylon per la regolazione in due posizioni.

Lo schienale e la seduta sono imbottiti e realizzati in Nylon.

I braccioli hanno configurazione desk (da tavolo) con imbottitura in Poliuretano e con pannello laterale di protezione; sono ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza.

Le pedane, estraibili, sono dotate di cinghia ferma-tallone, hanno la possibilità di rotazione antero-posteriore e di regolare l'altezza per l'appoggio dei piedi.

La carrozzina è disponibile in diverse misure di seduta.

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione della funzionalità degli arti inferiori.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122106	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	Practica EL39P Practica EL42P Practica EL45P Practica EL48P Practica EL51P	1391103/R 1392532/R 1392533/R 1392534/R 1392535/R
Codice Nomenclatore Tariffario	12.21.06.039 12.24.03.121 - 12.24.03.115 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172 12.24.21.106 - 12.24.21.109 - 12.24.06.175 - 12.24.06.160	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Conformità a UNI EN ISO 9001:2008	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Conformità a UNI CEI EN ISO 13485:2012	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2016	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

	PRACTICA				
	EL39P	EL42P	EL45P	EL48P	EL51P
Larghezza seduta	39 cm	42 cm	45 cm	48 cm	51 cm
Profondità seduta	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Larghezza totale	59 cm	62 cm	65 cm	68 cm	71 cm
Altezza seduta	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm
Altezza schienale	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Altezza totale	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm

Portata	120 kg														
Materiale	<table> <tr> <td>Telaio</td> <td>Alluminio</td> </tr> <tr> <td>Schienale e seduta</td> <td>Nylon</td> </tr> <tr> <td>Ruote posteriori</td> <td>Poliuretano</td> </tr> <tr> <td>Forcella per ruote anteriori</td> <td>Nylon</td> </tr> <tr> <td>Braccioli</td> <td>Poliuretano</td> </tr> <tr> <td>Sistema frenante</td> <td>Alluminio e Acciaio</td> </tr> <tr> <td>Mancorrenti</td> <td>Alluminio</td> </tr> </table>	Telaio	Alluminio	Schienale e seduta	Nylon	Ruote posteriori	Poliuretano	Forcella per ruote anteriori	Nylon	Braccioli	Poliuretano	Sistema frenante	Alluminio e Acciaio	Mancorrenti	Alluminio
Telaio	Alluminio														
Schienale e seduta	Nylon														
Ruote posteriori	Poliuretano														
Forcella per ruote anteriori	Nylon														
Braccioli	Poliuretano														
Sistema frenante	Alluminio e Acciaio														
Mancorrenti	Alluminio														
Peso	≥ 15 kg , secondo configurazione														
Diametro ruote posteriori	24"														
Diametro ruote anteriori	7"														
Diametro ruotini per passaggi stretti	1,5"														
Freni di stazionamento	Leve ad azionamento manuale														
Braccioli	Desk														

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	<p>Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti.</p> <p>Pulire con panno umido utilizzando detersivi non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.</p> <p>In ogni caso attenersi alle istruzioni d'uso.</p>
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
PRACTICA EL*	PRACTICA EASY LIGHT Carrozzina standard leggera ad autospinta	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

*La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura scelta.

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
EL-11	Pedane elevabili	2
P-29L	Tavolino fisso con incavo	1
P-25	Seduta WC – per misura 42	1
P-26	Seduta WC – per misure 45, 48, 51	1
P-27	Seduta rigida - per misura 42	1
P-28	Seduta WC – per misure 45, 48, 51	1
P-36	Portaflebo con attacco per carrozzina	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.

