

LAD700
Materasso antidecubito ad elementi intercambiabili con compressore con regolazione PROCARE Bariatrico – Materasso 25,4 Cm
Destinazione d'uso

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

Caratteristiche principali

Il PROCARE BARIATRICO è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al IV stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. E' composto di un materasso alto 25.4 cm a 20 elementi intercambiabili in Nylon/TPU impermeabili e traspiranti e da un compressore con regolazione di pressione. L'altezza degli elementi permette di utilizzare il materasso del PROCARE BARIATRICO senza l'utilizzo di un materasso aggiuntivo. I primi elementi del materasso sono a funzionamento statico per la testa; gli ultimi 5 elementi possono essere staccati in modo da poter mantenere i talloni sospesi in aria, eliminando completamente la pressione esercitata sui talloni, la restante parte del materasso è a funzionamento alternato a 2 vie. Le celle del materasso sono realizzate con la tecnica del "cell-incell" (la parte inferiore serve da supporto anche in caso di mancanza di corrente) e una particolare forma rettangolare "Qubicell" che consente maggior comfort dovuto ad una miglior dispersione dei punti di contatto. Il materasso viene fornito con coperta stretch in poliestere/PU traspirante, impermeabile, trattata agli ioni d'argento, fissata per mezzo di zip, può essere fissato al letto tramite cinghie in dotazione ed è dotato di occhielli passacavo. La valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permette uno sgonfiaggio rapido per interventi di rianimazione urgenti. Il compressore digitale permette di impostare peso del paziente e tempo del ciclo; molto silenzioso, compatto e leggero, è facile da usare, non necessita di lubrificazione e richiede pochissima manutenzione, è dotato di un allarme visivo e sonoro per bassa pressione, mancanza di alimentazione e manutenzione ed è dotato di un filtro aria intercambiabile. Il PROCARE BARIATRICO include le funzioni STATIC, MAX FIRM e SEAT INFLATE. Il materasso viene collegato al compressore tramite connettori veloci dotati di chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. Due ganci permettono di appendere il compressore all'estremità del letto.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>APEX MEDICAL CORP.</i>
Paese di produzione	<i>TAIWAN</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>35689</i>
Codice di classificazione CND	<i>Y033306</i>
Codice nomenclatore	<i>03.33.06.021</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	<i>220 - 240V / 50 Hz</i>
Cavo di alimentazione	<i>4,9 Mt</i>
Classificazione elettrica	<i>Classe II Tipo BF</i>
Fusibile	<i>T1AL 250V</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione erogata	<i>15 – 40 mmHg</i>
Uscita d'aria	<i>8 l/min</i>
Rumorosità	<i><= 30 dB</i>
Tempo di un ciclo	<i>Da 10 a 25 Minuti variabile</i>
Peso Max paziente	<i>450 Kg</i>
Protezione	<i>IP21</i>
Tempo di sgonfiaggio	<i>Circa 60 Secondi Variabile</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Materasso	<i>Nylon + TPU</i>
Coperta	<i>Nylon + PU (Trattata agli Ioni di Argento)</i>

DIMENSIONI

Dimensioni compressore	<i>29 x 20 x 11,7 Cm</i>
Peso compressore	<i>2,20 Kg</i>
Dimensioni materasso	<i>200 x 107 Cm</i>
Numero elementi	<i>20</i>
Altezza elementi gonfi	<i>25,4 Cm</i>