

Suprema




PRODOTTO
IN ITALIA



Suprema

SUPER • SLIDE • RELAX

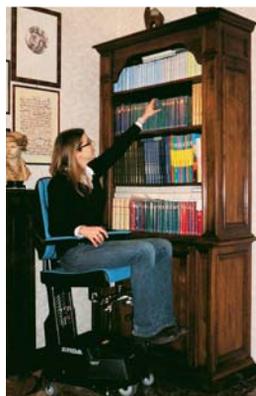

La poltrona **SUPREMA**, dotata di **movimentazione verticale** in tutte le sue versioni, è stata progettata per restituire **libertà** e **autonomia** di movimento a chi desidera vivere pienamente la propria quotidianità a casa come sul posto di lavoro.

Pratica, silenziosa e confortevole, **SUPREMA** con le sue **due batterie** diventerà la vostra **indispensabile alleata** accompagnandovi in ogni momento della giornata.

Vi conquisterà con le sue **caratteristiche uniche**: linee essenziali, seduta ergonomica, dimensioni compatte, e capacità di **girare su se stessa** grazie alla base dotata di ruote piroettanti e ruote motrici sterzanti.

Scegliere la poltrona **SUPREMA** significa accedere **facilmente** e in **totale autonomia** a tutti gli ambienti interni, compresi spazi di ridotte dimensioni e servizi di uso comune.

Ti invitiamo a provarla, non vorrai più farne a meno!

ACCESSORI

cod. **NE001**



Fiancate laterali con cuscini rimovibili di spessore 5 cm

cod. **NE003 (destra)**
cod. **NE004 (sinistra)**
cod. **NE005 (Solo mod. Slide)**



Appoggio laterale gambe

cod. **NE007**



Pedana poggipiedi in plastica.

cod. **NE008**



Appoggia gamba alzabile



mod. SUPER

Codice: E71000

Progettata per consentire la **movimentazione verticale** della seduta da un minimo di **43 cm** ad un massimo di **73 cm**.



mod. RELAX

Codice: E61000

Progettata per consentire non solo la **movimentazione verticale** della seduta da un minimo di **43 cm** ad un massimo di **65 cm** ma anche il **basculamento** della seduta fino ad un massimo di **12°**. Altezza massima basculata **84 cm**.



mod. SLIDE

Codice: E81000


Progettata per consentire non solo la **movimentazione verticale** della seduta da un minimo di **43 cm** ad un massimo di **73 cm** ma anche un'**escursione orizzontale** del sedile fino ad un massimo di **20 cm** in avanti.



DATI TECNICI

SUPREMA è stata progettata per l'**ESCLUSIVO UTILIZZO IN PIANO ED IN AMBIENTI INTERNI.**


Compatibilmente con le dimensioni riportate, è comunque possibile superare anche piccoli dislivelli.

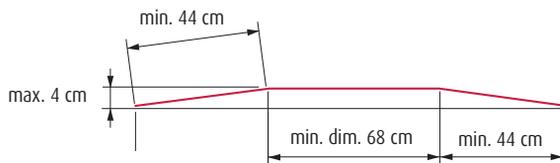

	Portata max. Kg	Escursione verticale della seduta	Escursione orizzontale del sedile	Basculamento Seduta	Altezza max. basculata	Velocità KM/h
SUPREMA Super	53	120	Min. 43 - Max. 73 cm	-	-	max. 1,23
SUPREMA Slide	58	120	Min. 43 - Max. 73 cm	Min. 0 - Max. 20 cm	-	max. 1,23
SUPREMA Relax	60	120	Min. 43 - Max. 65 cm	-	Min. 0 - Max. 12°	84 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DOPPIA batteria** ricaricabile 12V - 22 Ah, sigillate al piombo, senza manutenzione
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- Movimentazioni tramite motori elettrici a 12V c.c.
- **Caricabatteria elettronico incorporato o esterno**
- **Sistema automatico di selezione della batteria**
- Led indicante il raggiungimento della carica della batteria
- Joystick per impartire i comandi di marcia e graduare la velocità
- Pulsanti di selezione doppia velocità di marcia graduabile tramite Joystick
- Pulsanti movimentazione seduta del tipo "uomo presente" con azionamento ritardato del comando
- Azionamento verticale della seduta con partenza ed arresto graduale
- Autonomia media di ciascuna batteria 2H 30' con utilizzo in moto continuo
- **Spegnimento automatico** per soste oltre i **4 minuti**
- Pulsante spegnimento
- Sistema di sicurezza che disabilita la marcia al raggiungimento del punto di massima elevazione in sicurezza (circa 2/3 dell'escursione verticale possibile) (solo Mod. SUPER e SLIDE)
- Braccioli alzabili in tutte le versioni
- Poggiatesta regolabile
- Poltrona con imbottitura anatomica a densità differenziata e con rivestimento ignifugo

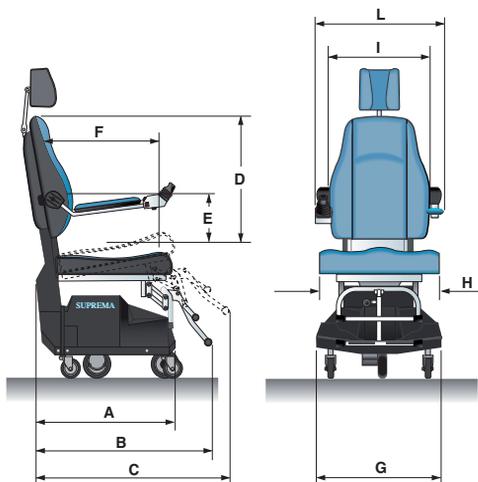

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
SUPREMA Super	62	72	81	56	19,5	47	45,5	42,5	42,5	58
SUPREMA Slide	62	72	81	56	19,5	47	45,5	42,5	42,5	58
SUPREMA Relax	62	72	81	56	19,5	47	45,5	42,5	42,5	58

- **Servizio di assistenza tecnica post-vendita presso centri autorizzati T.G.R. presenti sul territorio**
- **Garanzia 24 mesi**

TGR si riserva, nell'evoluzione tecnica dei suoi prodotti, di modificare gli articoli illustrati. Le immagini ed i dati riportati potranno quindi subire variazioni. NB: Nell'uso seguire attentamente ed attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, istruzioni ed avvertenze riportate sul libretto di istruzioni.