

Caratteristiche

Lettino da visita medica a due sezioni, con schienale regolabile e gambe pieghevoli. Disponibile anche con foro facciale.

Impiego

Articolo destinato a rendere maggiormente confortevoli le fasi di valutazione del paziente.

Target

Destinato all'uso in studi medici e ambulatoriali - privati o all'interno di luoghi ospedalieri - e in case di cura.

Avvertenze

La mancata osservanza delle indicazioni citate nel manuale d'uso può causare un uso improprio del prodotto.

Stoccaggio



Proteggere dall'umidità e dall'esposizione diretta ai raggi solari.



Caratteristiche tecniche

Materiale impiegato	- Intelaiatura: Acciaio verniciato - Pianale: pannello in fibra di legno - Imbottitura: poliuretano, densità 40 kg/m ³ , spessore 3 cm; ignifugo classe 1 IM - Rivestimento: ecopelle (PVC plastificato 88%, poliestere 22%) ignifuga di classe 1 IM; colore verde, grigio, blu e nero.
Portata	180 kg
Movimentazione	Gambe pieghevoli con piedini antistatici, di cui due regolabili; blocco tramite catenaccio con leva a doppia azione (perni Ø = 8 mm); schienale regolabile.
Altezza schienale - Regolazione angolare	19 possibili posizioni diverse; range angolare: da minimo 0° a massimo 63° circa.
Dimensioni ed ingombro	Chiuso: 187 x 56 x 17,5 cm Aperto: 187 x 56 x 78 cm Sezione reclinabile L 68 cm – sezione fissa L 116 cm.
Peso	Peso netto complessivo 27 Kg.
Confezionamento	Cartone con 1 pezzo pre-assemblato.

Modo d'uso

- 1) Aprire la confezione di cartone e coricare il lettino su uno dei due lati lunghi, tenendo il lettino fermo con una mano.
 - 2) Con l'altra mano aprire una gamba per volta tirandola dall'interno verso l'esterno; assicurarsi che formi un angolo di 90° con la seduta.
 - 3) Bloccare le gambe del lettino posizionando la leva del catenaccio, posto sotto lo schienale nella parte interna dell'intelaiatura, dalla posizione di "sblocco" (con il simbolo ) alla posizione di "blocco" (con il simbolo ) ; fare attenzione che la leva arrivi a fine corsa e assicurarsi che le gambe del lettino non si possano muovere in alcuna direzione.
 - 4) Afferrare il lettino con entrambe le mani e portarlo in posizione eretta, sollevandolo e ruotandolo in modo tale che i quattro piedini poggino sul pavimento.
 - 5) Prima che il paziente si sdrai sul lettino da visita, prendere la parte superiore dello schienale e sollevarlo fino a ottenere l'inclinazione desiderata.
- In fase di movimentazione verificare sempre lo spazio circostante a disposizione.
 - Assicurarsi sempre del corretto bloccaggio delle gambe del lettino prima di far accomodare il paziente.
 - In ogni momento dell'utilizzo e della movimentazione del lettino, assicurarsi che nessuno inserisca le mani nei meccanismi, nelle parti mobili o nello spazio presente tra schienale e sezione fissa.
 - Non utilizzare il dispositivo in luoghi soggetti a rischio esplosione.
 - Tenere il manuale d'uso sempre disponibile per la consultazione. Garanzia 24 mesi.

COREMEC S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza.
COREMEC S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

COREMEC S.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
Corso Vittime del lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. 011-35.89.481 - Fax 011-35.89.483
www.coremec.it email coremec@coremec.it

COREMEC S.r.l.
Export Department
e-mail: export@coremec.it