

Art. 6100 - Cintura addominale grande

Codice Articolo	6100
Misura	===
N°. Repertorio	67375
Codice CND	Y180999

Caratteristiche

Ausilio realizzato per il mantenimento del paziente in posizione seduta e per la prevenzione di cadute e scivolamenti. Per impiego esclusivamente con sedie e carrozzine.

Impiego

Dispositivo destinato esclusivamente al posizionamento nella zona addominale.

NON APPLICABILE PER LIMITARE ALTRE PARTI DEL CORPO.

Target

Reparti di degenza, lungodegenza, case protette, RSA.

Stoccaggio

Proteggere dall'umidità e dall'esposizione diretta ai raggi solari.

Conservare a temperatura ambiente.

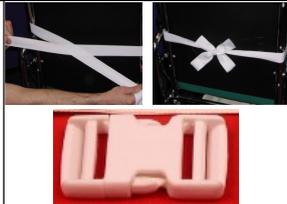
Controindicazioni

Dispositivo non adatto per pazienti agitati, psichiatrici, aggressivi, combattivi e con propensione al suicidio. Non adatto per paziente affetti da BPCO (broncopatie cronico ostruttive), con stomie (colostomizzati), tubi di drenaggio, ferite post-chirurgiche. L'ausilio non è da utilizzare con pazienti allettati.

Caratteristiche Tecniche	
Materiale Impiegato	Maglia, foam, fascia bianca rinforzata, profilo colorato, filo, anello in plastica, Velcro, velour
Finitura	Cucitura
Pulizia	Lavabili a max. 40°C con acqua e saponi neutri
Dimensione Lacci	Lunghezza cm 160 - Larghezza cm 4 - disponibile clip di fissaggio
Dimensione Fascia addominale	cm 125 x 18

Confezione: box da 8 pezzi

Modo d'Uso

			
Posizionare la cintura addominale sul paziente avendo cura di fissarla nella zona lombare con l'apposito Velcro.	Incrociare i lacci della cintura sulla zona lombare.	Riportare i lacci in posizione anteriore facendoli scorrere nel rispettivo anello laterale e praticare un nodo di sicurezza.	Incrociare i lacci posteriormente allo schienale della comoda e annodarli o utilizzare la clip di fissaggio.

LATEX FREE

Dispositivo Medico di Classe I

La mancata osservanza delle indicazioni riportate può causare un uso improprio del prodotto.

La Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza.

La Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale

C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)

Tel. +39-011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483

www.coremec.it

e-mail: coremec@coremec.it



COREMEC s.r.l.

Export Department

e-mail: export@coremec.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti

ST6100 _ Edizione _r2_2007