

Art. 6150 - Cintura addominale standard

<b>Codice Articolo</b>	6150
<b>Misura</b>	===
<b>N°. Repertorio</b>	67338
<b>Codice CND</b>	Y180999

**Caratteristiche**

Ausilio realizzato per il mantenimento del paziente in posizione seduta e per la prevenzione di cadute e scivolamenti. Per impiego esclusivamente con sedie e carrozzine.

**Impiego**

Dispositivo destinato esclusivamente al posizionamento nella zona addominale.

**NON APPLICABILE PER LIMITARE ALTRE PARTI DEL CORPO.**

**Target**

Reparti di degenza, lungodegenza, case protette, RSA.

**Stoccaggio**

Proteggere dall'umidità e dall'esposizione diretta ai raggi solari.

Conservare a temperatura ambiente.

**Controindicazioni**

Dispositivo non adatto per pazienti agitati, psichiatrici, aggressivi, combattivi e con propensione al suicidio. Non adatto per paziente affetti da BPCO (broncopatie cronico ostruttive), con stomie (colostomizzati), tubi di drenaggio, ferite post-chirurgiche. L'ausilio non è da utilizzare con pazienti allettati.

Caratteristiche Tecniche	
Materiale Impiegato	Maglia, foam, fascia bianca rinforzata, profilo colorato, filo, anello in plastica
Finitura	Cucitura
Pulizia	Lavabili a max. 40°C con acqua e saponi neutri
Dimensione Lacci	Lunghezza cm 150 - Larghezza cm 4
Dimensione Fascia addominale	cm 70 x 18

Confezione: box da 14 pezzi

**Modo d'Uso**




Posizionare la cintura addominale sul paziente.



Incrociare i lacci della cintura sulla zona lombare.



Riportare i lacci in posizione anteriore facendoli scorrere nel rispettivo anello laterale e praticare un nodo di sicurezza.

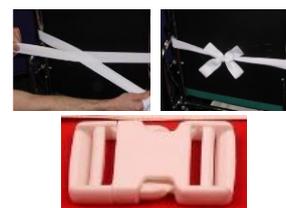

Incrociare i lacci posteriormente allo schienale della comoda e annodarli o utilizzare la clip di fissaggio.

**LATEX FREE**

**Dispositivo Medico di Classe I**

La mancata osservanza delle indicazioni riportate può causare un uso improprio del prodotto.

La Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza. La Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

**COREMEC s.r.l.**

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale  
C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)  
Tel. +39-011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483  
[www.coremec.it](http://www.coremec.it) e-mail: [coremec@coremec.it](mailto:coremec@coremec.it)



**COREMEC s.r.l.**  
Export Department  
e-mail: [export@coremec.it](mailto:export@coremec.it)

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti

ST 6150\_ Edizione \_r2\_2007